

Accu-Chek® LinkAssist

Mit der Accu-Chek LinkAssist Setzhilfe legen Sie Ihr Accu-Chek Infusionsset ganz einfach und nahezu schmerzfrei auch an schwer zugänglichen Körperstellen an.



- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| A Auslöseknopf | D Ladekammer |
| B Sicherheitshebel | E Fussteil mit Griffstück |
| C Spannelement | |



1 Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie das Infusionsset auspacken. Drücken Sie das Spannelement der Setzhilfe in das Basiselement.



2 Halten Sie zuerst das Infusionsset an der Schutzhülle und setzen Sie es von unten in die Öffnung der Setzhilfe, bis es einrastet.



3 Entfernen Sie die durchsichtige Nadelschutzhülle durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen.



4 Entfernen Sie beide Teile der Klebefolie von der selbsthaftenden Auflage.




5 Halten Sie die Basis der Setzhilfe fest in einer Hand und ziehen Sie mit der anderen Hand das Spannelement so weit wie möglich nach oben.




6 Entriegeln Sie die Sicherung.



7 Setzen Sie die Setzhilfe auf die vorbereitete Infusionsstelle. Drücken Sie den Auslöseknopf. Nehmen Sie die Setzhilfe ab.

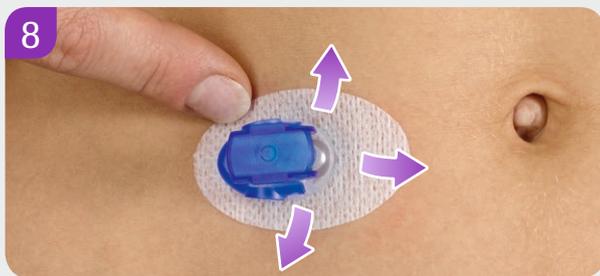


8 Drücken Sie die selbstklebende Auflage fest auf die Infusionsstelle und achten Sie darauf, dass guter Kontakt zur Haut besteht.

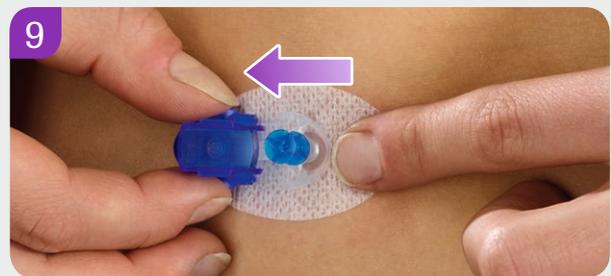

9 Halten Sie das Pflaster fest. Drücken Sie sanft die Seitenclips des blauen Haltegriffs zusammen und entfernen Sie diesen.



10 Halten Sie das Kanülengehäuse am Körper fest. Ziehen Sie die Führungsnadel an ihrem Haltegriff gerade heraus.

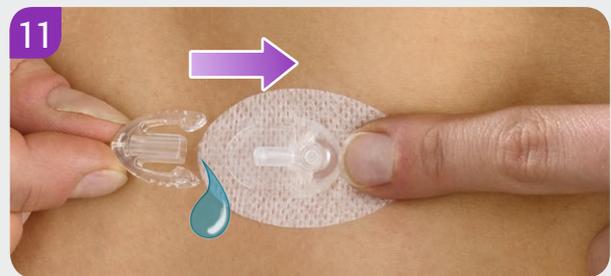

11 Verbinden Sie den gefüllten Infusionsschlauch mit der Verbindungsplatte. Bevor Sie die Behandlung mit der Insulinpumpe fortsetzen, müssen Sie das Kanülengehäuse und die biegsame Kanüle mit einem Insulin-Bolus von 1,0 E füllen.

Bitte beachten Sie auch die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanleitung. Sie enthält detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitsinformationen.

Experience what's possible.

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK LINKASSIST sind Marken von Roche. ©2017 Roche

www.accu-chek.ch
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®