

ACCU-CHEK® Instant

Roche



# EINFACH MESSEN

## Accu-Chek Instant

Das zuverlässige Blutzuckermessgerät für  
Diabetesbetroffene, die einfach messen möchten.  
Die Farbskala bietet eine klare Erkennung, ob  
das Ergebnis hoch, niedrig oder im Zielbereich liegt.



Kompatibel  
mit



# INTUITIV RICHTIG VERSTEHEN

Accu-Chek Instant vereinfacht die Blutzuckermessung, damit Sie die Blutzuckerwerte auf einen Blick verstehen und interpretieren können und dabei Vertrauen in die Diabetesbehandlung gewinnen.

Die Farbskala ermöglicht visuelle Sicherheit<sup>1</sup> und hilft, hohe und niedrige Blutzuckerwerte richtig zu identifizieren und zu interpretieren<sup>1</sup>.



## Blau

Der Messwert liegt oberhalb des Zielbereichs

## Grün

Der Messwert liegt innerhalb des Zielbereichs

## Rot

Der Messwert liegt unterhalb des Zielbereichs

## Breite Blutauftragsfläche

Das Blut kann beliebig entlang der gelben Markierung aufgetragen werden. Sogar seitlich.



# EINFACHES TESTEN IN 4 SCHRITTEN




## Teststreifen einführen

Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie mit dem Messen beginnen. Das Messgerät schaltet sich ein, wenn Sie den Teststreifen in das Gerät einführen.



## Blut gewinnen

Wenn das blinkende Tropfensymbol erscheint, verwenden Sie die Stechhilfe zur Blutprobengewinnung.

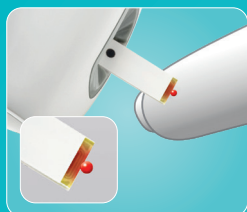

## Blut auftragen

Berühren Sie den gelben Rand des Teststreifens mit dem Blutstropfen. Entfernen Sie Ihren Finger vom Teststreifen, sobald das blinkende Sanduhrsymbol auf dem Display erscheint.



## Testergebnis ablesen

Das Testergebnis erscheint in weniger als 4 Sekunden auf dem Display. Der Pfeil zeigt an, ob Ihr Testergebnis innerhalb, über oder unter Ihrem Zielbereich liegt.



## Videoanleitung finden Sie online

Auf [www.accu-chek.ch](http://www.accu-chek.ch) finden Sie das Erklärvideo zum Accu-Chek Instant Blutzuckermessgerät.

# DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

## Grosses Display

Grosses beleuchtetes Display  
mit sehr gutem Kontrast

## Praktischer Auswurfknopf

Auf Knopfdruck Teststreifen  
hygienisch entsorgen



## Farbskala

Für schnelle und  
einfache Interpretation

## Geführter Einschub

Erleichtert das Einführen  
des Teststreifens

## Haben Sie Fragen zum Produkt?

Bei Fragen zu Accu-Chek Instant unterstützt Sie gerne unser  
Kundenservice unter der Telefonnummer 0800 803 303 oder  
via E-Mail [info@accu-chek.ch](mailto:info@accu-chek.ch).

1 Parkin CG, et al. Use of an integrated tool for interpretation of blood glucose data improves correctness of glycemic risk assessment in individuals with type 1 and type 2 diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2017, 11(1), 74–82.