

Unter www.accu-chek.com erfahren Sie, welche Diabetes Management Apps mit Ihrem Blutzuckermessgerät kompatibel sind.

WARNUNG



Gefahr lebensbedrohlicher Verletzungen
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Gefahr schwerwiegender gesundheitlicher Vorkommnisse
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Accu-Chek Guide Blutzuckermessgeräts. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise zur Handhabung sowie zusätzliche Informationen.


Infektionsgefahr

Bei der Entnahme eines Blutropfens können die Stechhilfe und die Kappe mit Blut in Berührung kommen. Die Stechhilfe ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

HINWEIS

- Halten Sie immer einen Satz Batterien als Vorrat bereit.
- Die Batterieleistung kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Temperatur und Batteriehersteller variieren.

Übersicht

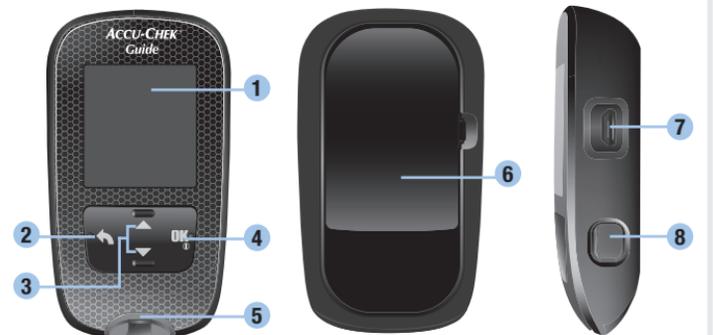

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1 Display | 5 Beleuchteter Teststreifeneinschub |
| 2 Zurück-Taste | 6 Batteriefachdeckel |
| 3 Auf- und Ab-Tasten | 7 Micro-USB-Anschluss |
| 4 Ein/Aus/Set/OK-Taste | 8 Teststreifen-Auswerfer |

Einstellen von Sprache und Zeitformat



Drücken Sie kurz auf **OK**, um das Messgerät einzuschalten. **Language** (Sprache) erscheint auf dem Display. Drücken Sie auf **↵** oder **↩**, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**.



Zeitformat erscheint auf dem Display. Drücken Sie auf **↵** oder **↩**, um **12 Stunden** (am/pm) oder **24 Stunden** auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**, um die ausgewählte Einstellung zu speichern und anschließend zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

Vorbereiten der Stechhilfe



Machen Sie sich mit der Accu-Chek FastClix Stechhilfe und Lanzettentrommel vertraut.




Hinweis: Jede Lanzettentrommel enthält 6 sterile Lanzetten. Sie können 6 Messungen durchführen, bevor Sie die Lanzettentrommel austauschen müssen.




Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe gerade ab. Drehen Sie die Kappe nicht.



Hinweis: Drücken Sie nicht den Auslösekноп, während Sie eine Lanzettentrommel einsetzen. Setzen Sie keine Lanzettentrommel ein, während Sie den Auslösekноп auf einer Fläche, z. B. einer Tischplatte, abstützen. Sonst wird möglicherweise eine Lanzette ausgelöst und könnte Sie unbeabsichtigt stechen.

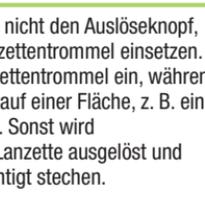

Stellen Sie an der Stechhilfe eine für Sie passende Stechtiefe ein. Beginnen Sie mit Stufe 2. Je nach Gewebedicke kann ein höherer Wert erforderlich sein.

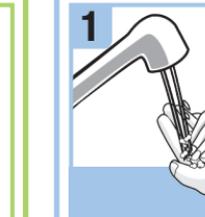

Wenn Sie bereit sind für die Messung...
Verwendung der Stechhilfe: Wenn Sie den Auslösekноп drücken, wird die Stechhilfe mit 1 Klick gespannt und ausgelöst.

Durchführen einer Blutzuckermessung




Waschen und trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie eine Blutzuckermessung durchführen.



Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Teststreifendose. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.



Entnehmen Sie einen Teststreifen aus der Teststreifendose. Verschließen Sie den Deckel wieder fest.

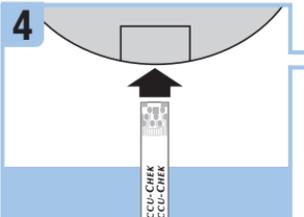

Schieben Sie den Teststreifen mit den metallischen Kontakten voran in das Messgerät ein.




Das Messgerät schaltet sich ein. **Messung wird vorbereitet** erscheint auf dem Display.



Drücken Sie die Stechhilfe fest gegen die Seite Ihrer Fingerbeere und drücken Sie den Auslösekноп vollständig nach unten, bis der Einstich erfolgt.



Berühren Sie mit der **gelben Blutauftragsfläche** des Teststreifens den Blutropfen. Tragen Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf.

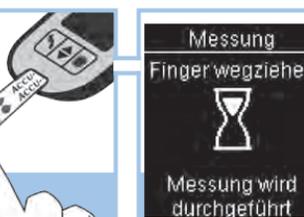

Nehmen Sie Ihren Finger vom Teststreifen weg, sobald **Messung wird durchgeführt** auf dem Display erscheint.



Der Messwert erscheint nach weniger als 4 Sekunden auf dem Display.



Zum Schluss nicht vergessen...
Bereiten Sie die Stechhilfe für die nächste Messung vor. Schieben Sie den Hebel einmal zur Seite und zurück, um die nächste Lanzette bereitzustellen. Das Fenster zeigt die Anzahl der verbleibenden Lanzetten an.

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 2021-07

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE und FASTCLIX sind Marken von Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care
07545843061A-1021
07545843061(01)-1021



Trova le App per la gestione del diabete compatibili con il tuo misuratore su www.accu-chek.com.

AVVERTENZA



Rischio di lesioni letali
Conservare batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Per ulteriori informazioni vedere il manuale per l'uso.


Rischio di un incidente grave dannoso per la salute
Questa guida introduttiva non sostituisce il manuale per l'uso del misuratore di glicemia Accu-Chek Guide. Il manuale per l'uso contiene istruzioni importanti e informazioni aggiuntive.

Rischio di infezione
Il pungidito e il cappuccio del pungidito possono venire a contatto con il sangue durante il prelievo. Il pungidito è indicato solo per l'uso personale.

NOTA

- Tenere sempre a disposizione delle batterie di scorta.
- La durata delle batterie può variare a seconda della temperatura e della marca.

Schema del misuratore

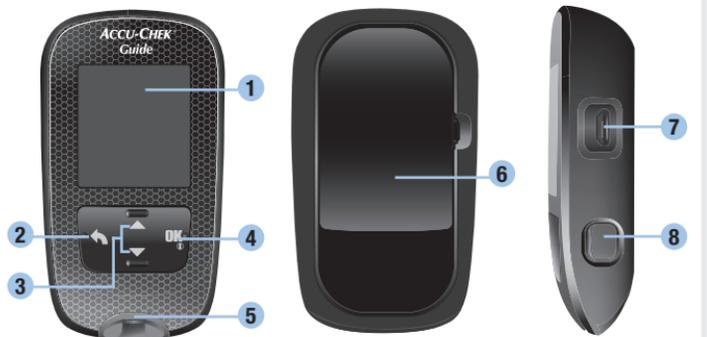


- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Display | 5 Fessura illuminata per la striscia reattiva |
| 2 Pulsante Indietro | 6 Coperchio del vano batterie |
| 3 Pulsanti freccia su e giù | 7 Porta micro USB |
| 4 Pulsante On/Off/Set/OK | 8 Espulsore della striscia reattiva |

Impostazione della lingua e del formato dell'ora



Accendere il misuratore premendo brevemente **OK**. Appare **Language** (lingua). Premere **OK** o **OK** per evidenziare la lingua desiderata. Premere **OK**.

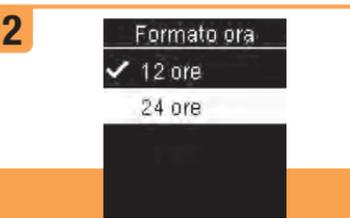

Appare **Formato ora**. Premere **OK** o **OK** per evidenziare **12 ore** (am/pm) o **24 ore**. Premere **OK** per impostare l'opzione e tornare alla schermata **Menu princip.**


Preparazione del pungidito




Fare pratica con le funzioni del pungidito Accu-Chek FastClix e del caricatore di lancette.



Nota: Ogni caricatore di lancette contiene 6 lancette sterili. È possibile eseguire 6 prelievi di sangue prima di dover sostituire l'intero caricatore di lancette.

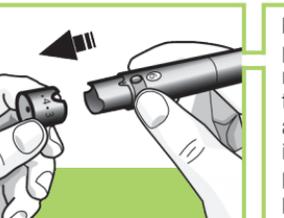

Togliere il cappuccio del pungidito tirandolo via dritto. Non ruotare il cappuccio.

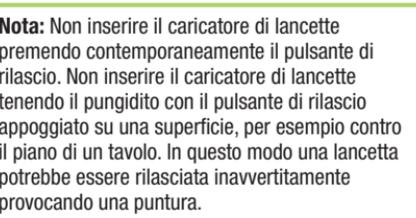


Nota: Non inserire il caricatore di lancette premendo contemporaneamente il pulsante di rilascio. Non inserire il caricatore di lancette tenendo il pungidito con il pulsante di rilascio appoggiato su una superficie, per esempio contro il piano di un tavolo. In questo modo una lancetta potrebbe essere rilasciata inavvertitamente provocando una puntura.



Inserire il caricatore di lancette nel pungidito con la parte bianca in avanti. Premere il caricatore di lancette finché scatta fermamente in sede.



Nota: Non togliere il caricatore di lancette finché non sono state usate tutte le 6 lancette, poiché, una volta tolto dal pungidito, il caricatore di lancette non può più essere usato.

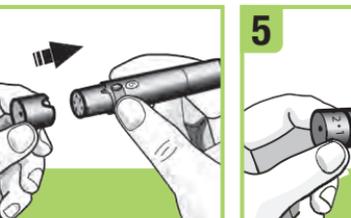

Rimettere il cappuccio sul pungidito. Assicurarsi che la rientranza nel cappuccio combaci con la sporgenza sulla parte anteriore del pungidito.




Impostare il livello adatto per la profondità di puntura. Iniziare con il livello 2. Per una cute più spessa, impostare un livello superiore.




Usare il pungidito: premendo il pulsante di rilascio, il pungidito si carica ed effettua la puntura con 1 clic.


Esecuzione di un test della glicemia

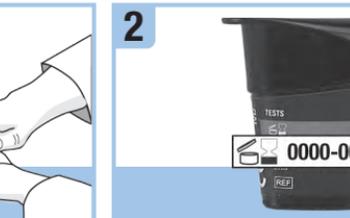

Lavare e asciugare le mani prima di eseguire un test della glicemia.

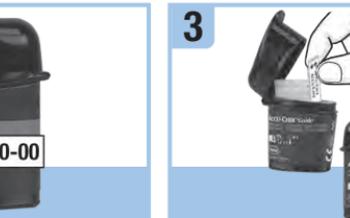


Controllare la data di scadenza sul flacone delle strisce reattive. Non usare le strisce reattive che hanno superato la data di scadenza.

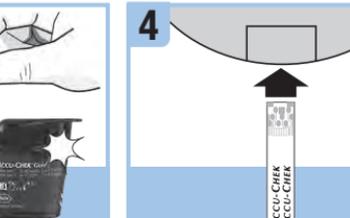


Togliere una striscia reattiva dal flacone delle strisce reattive. Chiudere perfettamente il flacone.



Inserire l'estremità metallica della striscia reattiva nel misuratore. Il misuratore si accende. Appare **Preparazione del test**.

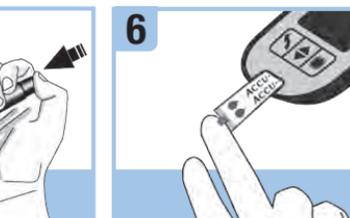

Premere fermamente il pungidito sul lato del polpastrello e premere il pulsante di rilascio affinché la lancetta venga rilasciata e punge la cute.

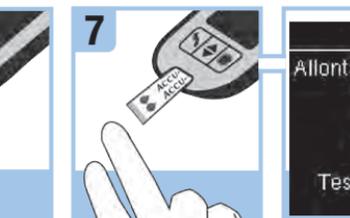

Con la goccia di sangue toccare il **bordo giallo** della striscia reattiva. Non applicare il sangue sulla parte superiore della striscia reattiva.



Allontanare il dito dalla striscia reattiva quando appare **Test in corso**.



Il risultato del test viene visualizzato sul display in meno di 4 secondi.



Prima di finire...
Preparare il pungidito per il prossimo test. Spostare la levetta in avanti e poi indietro per far avanzare la lancetta successiva. La finestrella indica il numero delle lancette rimaste.