

ACCU-CHEK® Instant

Roche



SIMPLEMENT MESURER

Accu-Chek Instant

Le lecteur de glycémie fiable pour les personnes atteintes de diabète désirant simplement savoir où ils en sont. L'échelle colorée indique clairement si la glycémie est haute, basse ou dans l'objectif glycémique.



Compatible
avec



COMPRENDRE INTUITIVEMENT

Accu-Chek Instant simplifie la mesure pour que vos patients puissent comprendre et interpréter d'un coup d'oeil leurs valeurs de glycémie, ce qui renforce leur confiance dans le traitement de leur diabète.

L'échelle colorée permet une sécurité visuelle¹ et aide à correctement reconnaître et interpréter les valeurs de glycémie hautes et basses¹.



Bleu

Le résultat glycémique est au-dessus de l'objectif glycémique.

Vert

Le résultat glycémique est dans l'objectif glycémique.

Rouge

Le résultat glycémique est au-dessous de l'objectif glycémique.

Zone d'application large

La goutte de sang peut être appliquée sur toute la zone jaune d'application, même sur le côté.



SIMPLEMENT TESTER EN 4 ÉTAPES




Insérer les bandelettes

Lavez-vous les mains à l'eau chaude savonneuse et séchez-les soigneusement avant de commencer votre mesure. Le lecteur s'allume lorsque vous insérez la bandelette dans le lecteur.



Prélever le sang

Lorsque le symbole de la goutte se met à clignoter, utilisez l'autopiqueur pour obtenir la goutte de sang.

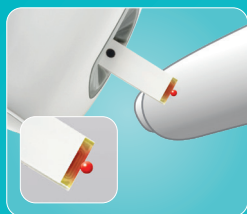

Appliquer le sang

Mettez la goutte de sang en contact avec le bord jaune de la bandelette. Retirez votre doigt de la bandelette dès que le symbole du sablier clignote à l'écran.



Lire le résultat du test

En moins de 4 secondes, le résultat s'affiche sur l'écran. La flèche vous indique si votre résultat est au-dessus, au-dessous ou dans l'objectif glycémique.



Des instructions vidéo sont disponibles en ligne

La vidéo explicative Accu-Chek Instant est disponible sur le site www.accu-chek.ch.

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

Grand écran

Grand écran éclairé,
contraste élevé

Bouton d'éjection pratique

Hygiène garantie grâce à
l'éjection des bandelettes par
simple pression



Échelle colorée

Pour une interprétation
rapide et facile

Aide à l'insertion

Facilite l'insertion de
la bandelette

Avez-vous des questions sur notre produit?

Veuillez contacter notre service clientèle au
0800 803 303 ou par e-mail info@accu-chek.ch.

1 Parkin CG, et al. Use of an integrated tool for interpretation of blood glucose data improves correctness of gly-
cemic risk assessment in individuals with type 1 and type 2 diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2017, 11(1), 74–82.