

ACCU-CHEK® Mobile

Roche

MANUEL D'UTILISATION



**SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE
LA GLYCÉMIE**



Contenu

Introduction	2
1 Votre nouveau système et son autopiqueur	5
2 Avant d'effectuer une mesure	8
3 Préparation de l'autopiqueur	10
4 Réalisation d'une mesure de glycémie	14
5 Réglages du lecteur	21
6 Utilisation du lecteur comme carnet de surveillance	25
7 Analyse des valeurs de glucose sur PC.....	27
8 Mode audio.....	33
9 Tests de contrôle	36
10 Menu Extras.....	39
11 Nettoyage et désinfection du système	40
12 Remplacement des piles.....	43
13 Conditions de mesure et de stockage.....	44
14 Messages et erreurs	45
15 Élimination du système	49
16 Informations techniques.....	50
17 Informations à la clientèle	51
18 Explication des symboles	52

Le présent manuel d'utilisation contient des avertissements, des précautions et des remarques :

 AVERTISSEMENT	 PRÉCAUTION	REMARQUE
Un AVERTISSEMENT indique un risque grave prévisible.	une PRÉCAUTION décrit une mesure que vous devez prendre pour utiliser le produit de manière sûre et efficace ou pour prévenir toute détérioration du produit.	Une REMARQUE est destinée à attirer votre attention sur d'importantes informations qui vous permettront une utilisation optimale du produit.

Introduction

Utilisation prévue

Le lecteur de glycémie Accu-Chek Mobile

Utilisé avec les cassettes-test Accu-Chek Mobile, le lecteur de glycémie Accu-Chek Mobile est destiné aux mesures quantitatives de glucose dans du sang total capillaire frais prélevé à l'extrémité du doigt et permet ainsi de surveiller l'efficacité du contrôle glycémique.

Utilisé avec les cassettes-test Accu-Chek Mobile, le lecteur de glycémie Accu-Chek Mobile est destiné à l'autocontrôle diagnostique in vitro par les personnes diabétiques.

L'autopiqueur Accu-Chek FastClix

L'autopiqueur Accu-Chek FastClix est un dispositif destiné au prélèvement de sang capillaire simple et pratiquement indolore sur l'extrémité du doigt. L'autopiqueur Accu-Chek FastClix n'est destiné qu'à un seul patient ! Il doit uniquement servir au prélèvement de sang chez une seule personne. Il existe un risque de transmission d'infections si l'autopiqueur est utilisé par d'autres personnes, notamment les membres d'une même famille, ou si les professionnels de santé emploient l'autopiqueur pour prélever du sang de différentes personnes. Cet autopiqueur ne convient donc pas à un usage professionnel en établissement hospitalier. Il ne s'agit pas d'un produit stérile. Les personnes ayant recours à l'autosurveillance de la glycémie sont considérées comme un groupe cible.

Les lancettes Accu-Chek FastClix

Une cartouche de lancettes contient six lancettes Accu-Chek FastClix. La cartouche de lancettes est destinée à être utilisée avec l'autopiqueur Accu-Chek FastClix. Chaque lancette qu'elle contient est destinée à n'être utilisée qu'une seule fois. La cartouche de lancettes Accu-Chek FastClix contient 6 lancettes et est destinée à être utilisée avec l'autopiqueur Accu-Chek FastClix pour un prélèvement de sang capillaire simple et

pratiquement indolore. La cartouche de lancettes est un article jetable composé de 6 lancettes chacune destinée à n'être utilisée qu'une seule fois. Chaque lancette présente un capuchon protecteur garantissant sa stérilité jusqu'à sa première utilisation. La cartouche de lancettes usagée empêche toute réutilisation.

Indications et contre-indications

Indication pour l'utilisation du système Accu-Chek Mobile

Le système Accu-Chek Mobile est destiné à aider à la surveillance de l'efficacité du contrôle glycémique.

Le système n'est pas destiné au diagnostic du diabète sucré, ni à la mesure de glycémie à partir d'échantillons de sang néonatal du cordon.

Indication pour l'utilisation de l'autopiqueur Accu-Chek FastClix

L'autopiqueur Accu-Chek FastClix est destiné à être utilisé dans le cadre de l'autosurveillance de la glycémie.

Contre-indications

Il n'y a aucune contre-indication.

Utilisateur prévu/population cible

Le système Accu-Chek Mobile

- Le système Accu-Chek Mobile est destiné à l'autocontrôle par les personnes diabétiques (patient unique – usage multiple).
- Utilisé avec les cassettes-test Accu-Chek Mobile, le lecteur de glycémie Accu-Chek Mobile n'est pas destiné à la mesure diagnostique in vitro près du patient effectuée par les professionnels de santé en milieu clinique.
- Le système Accu-Chek Mobile est uniquement destiné à l'auto-contrôle.

Type de lecteur

Accu-Chek Mobile (modèle U1)

L'autopiqueur Accu-Chek FastClix

Il est conçu pour être utilisé par des

personnes diabétiques ou des soignants qui aident les personnes diabétiques à utiliser le produit.

La population cible comprend des personnes diabétiques des groupes d'âge suivants : enfants, adolescents et adultes. Avant d'utiliser l'autopiqueur pour la première fois sur les enfants, consultez un professionnel de santé.

L'autopiqueur est destiné à être utilisé par un seul patient. Les lancettes sont destinées exclusivement à un usage unique.

Limites

- Le lecteur de glycémie Accu-Chek Mobile peut uniquement être utilisé avec la cassette-test Accu-Chek Mobile et est uniquement destiné à un usage hors du corps. Le système composé du lecteur et de la cassette-test est uniquement destiné à l'autocontrôle.
- Les personnes malvoyantes doivent être aidées par une personne voyante lors de la réalisation d'une mesure de glycémie.
- Le système ne convient pas au prélèvement sur site alternatif à l'aide d'un embout AST.

D'autres limitations figurent dans la notice d'utilisation de la cassette-test.

Autres produits destinés à être utilisés avec l'autopiqueur Accu-Chek FastClix

N'utilisez que des cartouches de lancettes Accu-Chek FastClix avec un autopiqueur Accu-Chek FastClix.

AVERTISSEMENT

• Risque d'infection

Tout objet en contact avec du sang humain constitue une source potentielle d'infection. **Le lecteur Accu-Chek Mobile et l'autopiqueur Accu-Chek FastClix sont destinés exclusivement à l'usage personnel !** Le lecteur et l'autopiqueur n'intègrent aucune fonction de prévention des infections croisées.

Le lecteur et l'autopiqueur ne doivent pas être utilisés pour mesurer la glycémie de plus d'une personne. Il existe un risque de transmission d'infections si le lecteur ou l'autopiqueur sont utilisés par d'autres personnes, y compris les membres d'une même famille, ou si les professionnels de santé emploient le lecteur pour effectuer des mesures de glycémie ou l'autopiqueur pour prélever le sang chez plusieurs personnes.

Le lecteur Accu-Chek Mobile et l'autopiqueur Accu-Chek FastClix ne sont pas destinés à un usage professionnel. N'utilisez pas le lecteur et l'autopiqueur en établissement hospitalier.

• Risque de suffocation

Ce produit contient de petites pièces pouvant être avalées.

- Conservez les petites pièces hors de portée des enfants en bas âge et des personnes susceptibles d'avalier les petites pièces.

• Risque de décision thérapeutique erronée

Le maniement du lecteur par des personnes malvoyantes peut donner lieu à des procédures incorrectes et des erreurs d'interprétation des affichages. Les personnes malvoyantes ne doivent pas nettoyer le lecteur sans l'assistance d'une personne voyante.

- Tout non-respect des instructions de réalisation d'une mesure de glycémie ou des instructions de conservation et de maniement peut entraîner une valeur de glucose incorrecte. Veuillez lire attentivement et suivre les instructions figurant dans le manuel d'utilisation et les notices d'utilisation de la cassette-test et des solutions de contrôle.

REMARQUE

Il est fortement recommandé de disposer d'une méthode de mesure auxiliaire. Ne pas réaliser de mesure peut retarder la prise de décisions thérapeutiques et entraîner de graves problèmes de santé.

Les méthodes de mesure auxiliaires peuvent par exemple reposer sur un lecteur et des bandelettes réactives auxiliaires ou une cassette-test. Demandez conseil à votre professionnel de santé ou votre pharmacien pour connaître les autres méthodes auxiliaires possibles.


Enregistrez votre lecteur de glycémie en ligne.*

Voir chapitre 17 *Informations à la clientèle* pour obtenir de plus amples détails.


*Pas disponible dans tous les pays.

1 Votre nouveau système et son autopiqueur

Aperçu du lecteur

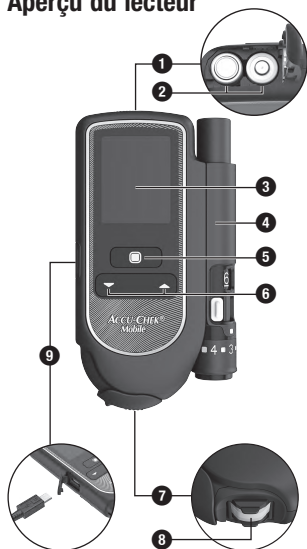


- 1** Couvercle du compartiment de la batterie
- 2** Piles voir chapitre 12 pour obtenir des informations relatives aux types de pile possibles
- 3** Écran
- 4** Autopiqueur (accolé)
- 5** Touche Marche/Arrêt et touche de Sélection
- 6** Touches Haut/Bas
- 7** Capot de protection
- 8** Zone réactive (positionnée à l'extrémité de la cassette pour la mesure)
- 9** Port USB – interface à utiliser pour une analyse des données sur un ordinateur

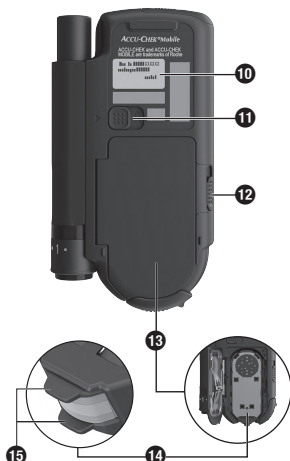

- 10** Plaque d'identification avec unité de mesure mg/dL ou mmol/L
Vérifiez que votre lecteur de glycémie affiche l'unité de mesure à laquelle vous êtes habitué.
- 11** Cran de sécurité permettant de dissocier l'autopiqueur du lecteur
- 12** Cran de sécurité permettant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la cassette
- 13** Couvercle du compartiment de la cassette
- 14** Cassette-test (insérée)
- 15** Butées

Aperçu de l'autopiqueur

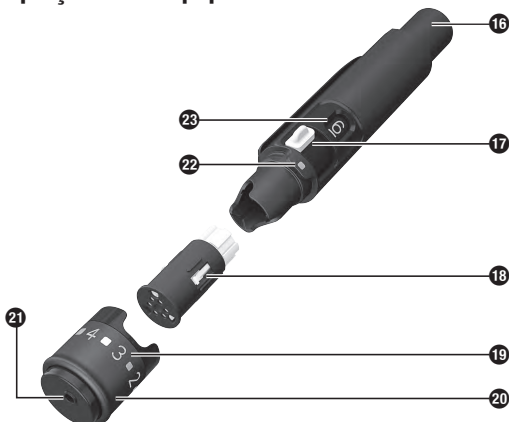

16 Bouton de déclenchement (armer et piquer)

17 Levier permettant de positionner une nouvelle lancette

18 Cartouche de lancettes contenant 6 lancettes

19 Réglage de la profondeur de piqûre (11 profondeurs de piqûre)

20 Embout de réglage

21 Orifice de sortie de la lancette







22 Repère de la profondeur de piqûre

23 Fenêtre indiquant le nombre de lancettes disponibles


Fonctionnement des touches et des menus






Dans ce chapitre vous trouverez des explications sur le fonctionnement des touches et des menus, des informations relatives à la structure des menus, ainsi que la signification des symboles qui y sont utilisés.

Touches du lecteur

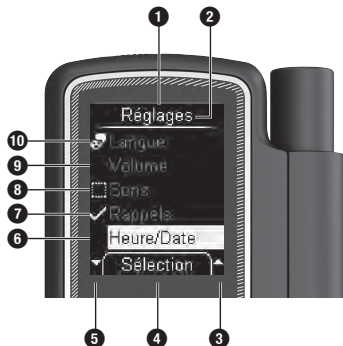Touche	Nom	Icône	Fonction
	Touche Marche/Arrêt et touche de Sélection		<p>Cette touche vous permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> d'allumer ou d'éteindre le lecteur ; maintenez la touche enfoncée (env. 2 secondes) d'exécuter la commande figurant au-dessus de la touche à l'écran (appuyez brièvement) <p>Exemple : la commande Sélection permet de sélectionner l'option en surbrillance sur le menu.</p>
	Touche Bas		<p>Cette touche 1 vous permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> de vous déplacer vers le bas dans un menu ou une liste de réduire des valeurs
	Touche Haut		<p>Cette touche 2 vous permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> de vous déplacer vers le haut dans un menu ou une liste d'augmenter des valeurs

Structure du menu



- Menu
- Titre d'affichage ou d'un menu (p. ex. *Réglages*)
- Ce symbole signifie que d'autres options sont accessibles au-dessus de l'option visible en haut de la liste.
- La commande affichée à cet endroit (p. ex. *Sélection*) est exécutée lorsque vous appuyez sur la touche . La commande affichée dépend de l'écran actif.
- Ce symbole signifie que d'autres options sont accessibles en dessous de l'option visible en bas de la liste.
- Une option sélectionnée est mise en surbrillance en jaune. Lorsque vous appuyez sur la touche , cette option est sélectionnée. Le menu respectif s'ouvre alors.
- Le symbole  indique que la fonction (p. ex. *Rappels*) est activée.
- Le symbole  indique que la fonction (p. ex. *Sons*) est désactivée.
- Option du menu non sélectionnée
- Les options du *menu principal* et l'option *Langue* du menu *Réglages* présentent un symbole sur le côté gauche (par exemple  pour l'option *Langue*).

Principe de fonctionnement

Mise en marche du lecteur

Maintenez la touche  enfoncée (env. 2 secondes) pour allumer le lecteur.

Après le test d'affichage, le lecteur indique tout d'abord le nombre de zones réactives disponibles dans la cassette-test. Le *menu principal* s'affiche ensuite.

Mise à l'arrêt du lecteur

Sélectionnez la commande *Éteindre* dans le *menu principal*.

ou


Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce la barre de progression s'affiche entièrement (au moins 2 secondes).

Retour à un menu supérieur

Retour permet d'ouvrir le menu supérieur au menu actif.

2 Avant d'effectuer une mesure

Vérification de l'unité de mesure

Voir *Aperçu du lecteur*,  *Plaque d'identification*.

AVERTISSEMENT

Risque de préjudice grave

Les valeurs de glucose peuvent être indiquées dans deux unités de mesure différentes (mg/dL ou mmol/L).

Une unité de mesure incorrecte est susceptible d'entraîner une interprétation erronée des résultats et de conduire à une mauvaise décision thérapeutique, ce qui risque de se traduire par de graves conséquences sur la santé.

N'utilisez jamais un lecteur de glycémie présentant une unité de mesure incorrecte ! Veillez à toujours utiliser un lecteur de glycémie affichant l'unité de mesure correcte à laquelle vous êtes habitué. L'unité de mesure affichée par votre lecteur ne peut pas être modifiée. Si vous ne savez pas quelle unité de mesure vous convient, contactez votre professionnel de santé. Si la

plaque d'identification n'affiche pas l'unité de mesure à laquelle vous êtes habitué, veuillez contacter le service clients.

Insertion d'une nouvelle cassette-test

Avant la première utilisation d'un nouveau lecteur, vous devez insérer une cassette-test.

Insérez la première cassette-test dans le lecteur avant de retirer le film protecteur des piles et de mettre le lecteur en marche.

AVERTISSEMENT


Risque de préjudice grave

Les cassettes-test endommagées et qui n'ont pas été conservées ou utilisées de manière appropriée peuvent provoquer l'obtention de valeurs de glucose incorrectes. Une telle situation peut donner lieu à des décisions thérapeutiques erronées.

- N'utilisez pas de cassette-test si l'emballage plastique ou le film de protection est endommagé. Les zones réactives sont sensibles à l'humidité atmosphérique.
- Conservez toujours les cassettes-test dans leur emballage plastique et gardez l'emballage fermé. L'emballage non ouvert protège la cassette-test de tout endommagement et de l'humidité.
- Transportez les cassettes-test exclusivement dans leur emballage plastique non ouvert ou dans le lecteur.
- Inspectez visuellement la cassette-test. Si la cassette-test est fissurée ou endommagée, ne l'utilisez pas. Éliminez la cassette-test.
- Lisez la notice d'utilisation jointe à la cassette-test. La notice d'utilisation contient d'autres informations importantes relatives notamment à leur durée de conservation et aux causes susceptibles d'être à l'origine de valeurs de glucose erronées.

1 Ouvrez l'emballage de la cassette-test en suivant la ligne perforée. Retirez l'emballage plastique.

2 Retirez la cassette-test de son emballage plastique.

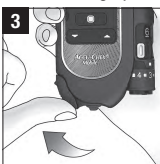

Ouvrez le capot de protection.

4 Retournez votre lecteur de sorte que la face arrière soit tournée vers vous.



Faites glisser le cran de sécurité du couvercle du compartiment de la cassette vers le haut dans le sens de la flèche pour ouvrir le couvercle du compartiment.



Insérez la cassette-test dans le lecteur face argentée vers le haut.




Appuyez sur le couvercle du compartiment de la cassette pour le fermer avec un CLIC audible.

8 Refermez le capot de protection.

Date limite d'utilisation de la cassette-test

La date limite d'utilisation d'une cassette-test est déterminée en fonction du délai d'utilisation et de la date de péremption.

Délai d'utilisation : période au cours de laquelle une cassette-test doit être utilisée après l'ouverture de l'opercule de l'emballage plastique. Le délai d'utilisation est indiqué en jours sur le carton d'emballage de la cassette-test et dans sa notice d'utilisation, à côté du symbole .

Date de péremption : date jusqu'à laquelle une cassette-test se conserve dans son emballage plastique. La date de péremption est indiquée sur le carton d'emballage de la cassette-test/l'opercule, à côté du symbole .

Si l'une de ces dates – délai d'utilisation ou date de péremption – est dépassée, vous ne devez plus utiliser cette cassette-test pour effectuer une mesure.

Lorsque vous lancez une mesure et que la date limite d'utilisation de la cassette-test est proche ou qu'elle est déjà dépassée, un message s'affiche.

Un premier message s'affiche 10 jours avant la date limite d'utilisation de la cassette-test, les messages suivants s'affichent 5, 2 et 1 jour(s) avant cette date.

Si la date limite d'utilisation de la cassette-test est dépassée, un message s'affiche.

Retrait du film protecteur

L'écran d'affichage du lecteur et les contacts des piles sont protégés par un film protecteur.




Retirez le film protecteur de l'écran.

2 Retirez le film protecteur des piles par l'arrière du lecteur.


Réglage de la langue


Le menu de réglage de la langue s'affiche automatiquement lors de la première mise

en marche du lecteur. Vous pouvez sélectionner la langue pré-réglée ou la remplacer par une autre langue.

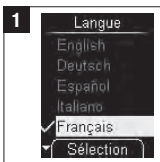


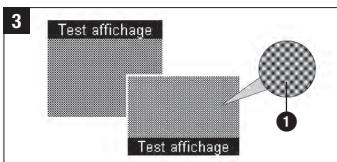
Utilisez ▲▼ pour naviguer jusqu'à la langue souhaitée. Appuyez sur  pour sélectionner la langue.

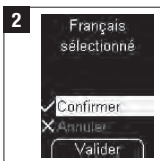

Appuyez sur  pour confirmer le choix de la langue.

REMARQUE

Si vous avez sélectionné par erreur une autre langue, vous avez la possibilité de la modifier ultérieurement. Le menu *Langue* est représenté par le symbole .



Vérifiez si l'écran ① présente des erreurs d'affichage. Le lecteur quitte le mode de test d'affichage automatiquement au bout de 2 secondes environ.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

Les erreurs d'interprétation des valeurs de glucose affichées à l'écran consécutives à des erreurs d'affichage peuvent donner

lieu à des décisions thérapeutiques erronées.

Vérifiez si l'écran présente des erreurs d'affichage. Les valeurs de glucose peuvent ne pas être affichées correctement. Si tel est le cas, contactez le service clients.

Le lecteur affiche alors le nombre de tests en réserve dans la cassette-test permettant d'effectuer d'autres mesures de glycémie. Le *menu principal* s'affiche ensuite.

3 Préparation de l'autopiqueur

L'autopiqueur vous permet de prélever du sang de l'extrémité du doigt. La profondeur de la piqûre est réglable (11 positions) et peut être adaptée aux différents types de peau. Introduisez une nouvelle cartouche contenant 6 lancettes stériles dans l'autopiqueur. Prélevez du sang une seule fois avec chaque lancette. Après avoir utilisé la sixième lancette, remplacez la cartouche de lancettes. L'autopiqueur est utilisable de deux façons : soit accolé au lecteur, soit dissocié du lecteur. L'autopiqueur ne convient pas au prélèvement sur site alternatif à l'aide d'un embout AST.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'infection

- Un autopiqueur ou une cartouche de lancettes qui sont entrés en contact avec du sang peuvent transmettre des infections.
- Ne partagez l'autopiqueur et la cartouche de lancettes avec personne, y compris les membres de votre famille, en raison du risque d'infection par des pathogènes hématogènes. Les professionnels de santé ne sauraient utiliser l'autopiqueur pour prélever du sang de différentes personnes.
- Les lancettes de la cartouche de lancettes peuvent être arrachées ou

endommagées par des contraintes mécaniques exercées sur l'autopiqueur, notamment suite à sa chute. Les lancettes peuvent alors dépasser et être aisément contaminées.

En cas de chute à terre de l'autopiqueur ou de la cartouche de lancettes ou d'exposition à d'autres contraintes mécaniques, assurez-vous de l'absence de détériorations, comme des fissures. Si l'autopiqueur ou la cartouche de lancettes sont endommagés ou si une lancette dépasse de la cartouche, n'utilisez pas l'autopiqueur ou la cartouche de lancettes.

PRÉCAUTION

Risque de lésion

- Tout contact cutané avec l'autopiqueur peut entraîner une irritation cutanée. En cas d'irritation ou d'inflammation cutanée, consultez votre professionnel de santé.
- Si la lancette est piquée dans une surface dure et non dans la peau, l'aiguille peut être endommagée. N'utilisez la lancette que pour obtenir une goutte de sang.
- Certains composants de l'autopiqueur, comme le bouton de déclenchement, peuvent être expulsés lors de l'utilisation. Ne pointez pas l'autopiqueur vers votre visage ni vers d'autres personnes.

Si vous trouvez des lancettes dans l'emballage, ne les utilisez pas. Éliminez les lancettes. Vous pouvez utiliser toutes les cartouches de lancettes présentes dans l'emballage. S'il vous arrive d'insérer une cartouche de lancettes avec des lancettes manquantes, vous ne pouvez pas prélever du sang à chaque fois que vous chargez une nouvelle lancette. Dans ce cas, chargez simplement la lancette suivante.

Insertion de la cartouche de lancettes

N'insérez que des cartouches de lancettes Accu-Chek FastClix dans l'autopiqueur Accu-Chek FastClix. L'emploi de toute autre lancette ou cartouche de lancettes risquerait d'entraver le bon fonctionnement de l'autopiqueur ou de l'endommager de manière permanente.

N'insérez pas une cartouche de lancettes tout en appuyant simultanément sur le bouton de déclenchement. N'insérez pas une cartouche de lancettes alors que le bouton de déclenchement est posé sur une surface, telle qu'une table. Vous risqueriez de déclencher une lancette et de vous piquer accidentellement.


AVERTISSEMENT

Risque d'infection


Si la cartouche de lancettes est endommagée, les lancettes peuvent être non stériles et provoquer une infection. Inspectez visuellement la cartouche de lancettes. Si la cartouche de lancettes est déformée, fissurée ou endommagée, ne l'utilisez pas. Éliminez la cartouche de lancettes.

PRÉCAUTION

Risque d'infection

- Un site de prélèvement non nettoyé peut entraîner des infections. Nettoyez le site de prélèvement avant de prélever du sang.
- Si la date de péremption de la cartouche de lancettes est dépassée, les lancettes peuvent être non stériles. N'utilisez que des cartouches de lancettes dont la date de péremption n'est pas dépassée. La date de péremption est indiquée sur le carton d'emballage à côté du symbole .
- Un autopiqueur ou un embout qui sont entré en contact avec du sang peuvent transmettre des infections.

Nettoyez et désinfectez toujours l'autopiqueur et l'embout avant que quelqu'un d'autre ne les manipule, par exemple pour vous aider.

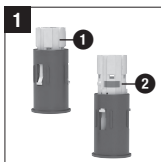

Préparez une nouvelle cartouche de lancettes 1.

Vous pouvez reconnaître les cartouches de lancettes usagées à leur bande rouge 2.



Retirez l'embout de l'autopiqueur.



Insérez la nouvelle cartouche de lancettes en insérant d'abord la partie blanche.



Remplacez l'embout. L'embout est placé correctement lorsque vous le poussez jusqu'à la butée. Vous devez entendre et sentir que l'embout est bien enclenché.

Réglage de la profondeur de piqûre

Vous pouvez régler la lancette sur 11 profondeurs de piqûre différentes. Les profondeurs de piqûre réglables comprennent 6 niveaux intermédiaires et 5 niveaux entiers. Réglez la profondeur de piqûre individuellement. Cela vous permet

d'assurer un prélèvement pratiquement indolore et de réguler la quantité de sang. L'indicateur de la profondeur de piqûre de l'autopiqueur (carré argenté) permet de repérer sur quelle position la profondeur de piqûre est réglée. Plus haut est le numéro, plus profonde est la piqûre. Des réglages intermédiaires sont disponibles entre les indicateurs de profondeur de piqûre.

Si vous n'avez pas l'habitude de manipuler l'autopiqueur, il est conseillé d'essayer tout d'abord une profondeur moyenne de piqûre, la position 3 par exemple.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de lésion

Si la profondeur de piqûre est trop élevée, le prélèvement peut blesser les enfants.

Avant d'utiliser l'autopiqueur pour la première fois sur les enfants, consultez votre professionnel de santé. Commencez par la profondeur de piqûre la plus faible.

Réglages



1 = repère de la profondeur de piqûre

2 = profondeur de piqûre réglable intermédiaire



Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque.

Chargement d'une nouvelle lancette

Si vous avez inséré une nouvelle cartouche de lancettes, une nouvelle lancette est automatiquement disponible.

Si vous avez déjà utilisé l'autopiqueur pour prélever du sang, vous devrez alors utiliser une nouvelle lancette pour votre prochain prélèvement de sang. Les étapes suivantes vous présentent comment positionner une nouvelle lancette :



Faites coulisser le levier **1** en direction de **A**, puis replacez-le en position initiale **B**.



La fenêtre **2** sur le côté de l'autopiqueur affiche maintenant une lancette disponible de moins. Si l'affichage des lancettes disponibles **2** indique un 1, cela

signifie que le levier **1** est bloqué. Ne tentez pas de déplacer le levier au-delà du mécanisme de blocage.

Changement de la cartouche de lancettes

Une fois que vous avez utilisé la sixième et dernière lancette, l'affichage de l'autopiqueur indique un 1. Remplacez la cartouche de lancettes usagée par une nouvelle cartouche.


Lorsque la cartouche de lancettes est usagée, un mécanisme de blocage empêche qu'elle soit de nouveau insérée dans l'autopiqueur. Éliminez les cartouches de lancettes usagées conformément à la réglementation locale en vigueur.



Retirez l'embout de l'autopiqueur.



Retirez la cartouche de lancettes de l'autopiqueur.

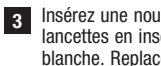

Insérez une nouvelle cartouche de lancettes en insérant d'abord la partie blanche. Replacez l'embout.

Dissociation de l'autopiqueur



Faites glisser le cran de sécurité de l'autopiqueur dans le sens de la flèche jusqu'à la butée. Maintenez-le dans cette position.




Retirez l'autopiqueur de son logement en le faisant glisser dans le sens de la flèche.

Refixation de l'autopiqueur



Lorsque vous refixez l'autopiqueur, les glissières de celui-ci et celles du lecteur doivent s'emboîter.

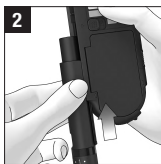

Faites glisser l'autopiqueur le long du lecteur dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé.

4 Réalisation d'une mesure de glycémie

Après avoir inséré une cartouche de lancettes dans l'autopiqueur et réglé la profondeur de piqure, vous pouvez effectuer une mesure de glycémie.

Veuillez tenir compte des remarques importantes relatives à la mesure de glycémie qui suivent :

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

- La réalisation erronée d'une mesure de glycémie peut donner lieu à des valeurs de glucose incorrectes susceptibles de conduire à une mauvaise décision thérapeutique, ce qui risque de se traduire par de graves conséquences sur la santé.

Respectez par conséquent les instructions suivantes pour effectuer correctement une mesure de glycémie.

- L'application d'une goutte de sang par des personnes malvoyantes peut donner lieu à des valeurs de glucose incorrectes.


Les personnes malvoyantes ne doivent en aucun cas appliquer la goutte de sang sans l'assistance d'une personne voyante.

Lorsque vous utilisez le mode audio : veuillez prêter attention au signal sonore. Familiarisez-vous au chapitre *Mode audio*.


REMARQUE

Lorsque le lecteur vous demande d'appliquer une goutte de sang, vous avez 2 minutes environ pour appliquer le sang sur la zone réactive. Si vous n'appliquez pas de sang durant ce laps de temps, le lecteur s'éteint et la zone réactive est perdue.


Faire

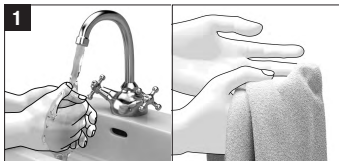


Avant la mesure de glycémie : lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et rincez-les soigneusement afin d'éliminer tous les résidus visibles et invisibles de glucose provenant notamment de restes de nourriture ou de boisson. Essuyez-vous bien les mains avec un chiffon propre.

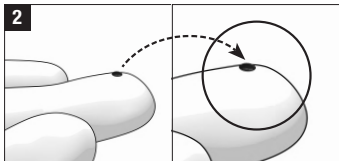

Utilisez toujours une petite goutte de sang frais bien formée.

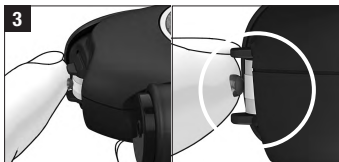


Déposez la goutte de sang **uniquement** au centre de la zone réactive. Effleurez la zone réactive située entre les butées à l'extrémité de la cassette uniquement avec la goutte de sang. Pour ce faire, effleurez légèrement les butées avec le doigt sans exercer de pression. Maintenez le doigt le plus immobile possible.

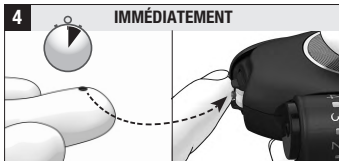


Veillez à appliquer le sang sur la zone réactive immédiatement après avoir obtenu la goutte de sang. Enlevez votre doigt de la cassette-test dès que le signal sonore retentit et que le message *Mesure en cours* s'affiche à l'écran.

REMARQUE : vous n'entendrez les signaux sonores que s'ils ont été activés.


Ne pas faire

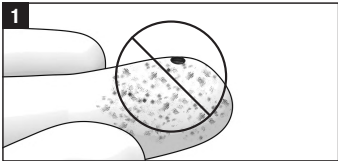

N'effectuez **aucune** mesure de glycémie si le site de prélèvement n'est pas lavé, est souillé ou collant (p. ex. en raison de la présence de résidus de glucose provenant de restes de nourriture ou de boisson).

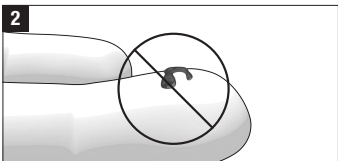

N'effectuez **aucune** mesure de glycémie avec une goutte de sang étalée ou mal formée. Veillez à ne pas étaler la goutte de sang sur la zone réactive.

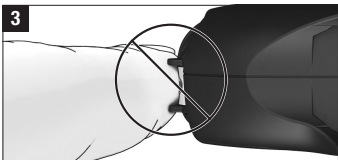

N'appuyez **pas** le doigt sur la zone réactive située entre les butées à l'extrémité de la cassette. Évitez toute secousse ou tremblement.



N'attendez **pas** pour appliquer la goutte de sang sur la zone réactive. Veillez à ne pas maintenir les butées au niveau de votre doigt une fois que le signal sonore a retenti et que le message *Mesure en cours* s'est affiché à l'écran.

Lancement de la mesure de glycémie

Vous pouvez commencer la mesure de glycémie de 2 manières différentes : en ouvrant le capot de protection ou à partir du *menu principal*.

Lancer la mesure de glycémie par l'ouverture du capot de protection :



Ouvrez le capot de protection.

Si le lecteur était éteint, il s'allume.

Un signal sonore retentit et le lecteur lance un test d'affichage.

2 Vérifiez l'absence d'erreurs d'affichage à l'écran.

3 Le test d'affichage est suivi de l'affichage du nombre de zones réactives disponibles, puis d'un message vous invitant à vous laver les mains.

Dans le même temps, le lecteur positionne une zone réactive à l'extrémité de la cassette.

REMARQUE

Pendant le positionnement d'une zone réactive, veillez à ne pas toucher à l'extrémité de la cassette et à ne pas tenir d'objet à proximité de cette dernière.


Quelques secondes après que la zone réactive a été positionnée, le message *Appliquer goutte* apparaît et un signal sonore retentit.

Vous pouvez également ouvrir le capot de protection d'un lecteur déjà allumé. Le lecteur active alors l'écran *Mesure*.

Lancer une mesure de glycémie via le menu princip. :

- 1 Lorsque le lecteur est éteint : allumez le lecteur en appuyant sur .

- 2 Sélectionnez *Mesure*.

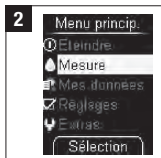

- 3 Le test d'affichage est suivi de l'affichage du nombre de zones réactives disponibles, puis d'un message vous invitant à vous laver les mains. Ouvrez le capot de protection. Si vous souhaitez interrompre la mesure, appuyez sur .

- 4 Suite à l'affichage du message *Veillez vous laver les mains !*, une nouvelle zone réactive est positionnée et le message *Appliquer goutte* s'affiche.

Prélèvement d'une goutte de sang

En général, le sang peut être prélevé sur n'importe quel doigt. Il est recommandé de prélever le sang capillaire en piquant sur le côté de l'extrémité du doigt, car c'est à cet endroit que le prélèvement de sang est le moins douloureux.

Utilisez une nouvelle lancette à chaque prélèvement. Cela permet de réduire les risques d'infection et d'assurer un prélèvement pratiquement indolore.

Utilisez l'autopiqueur uniquement lorsque l'embout est en place.


⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'infection

- Si une lancette a déjà été utilisée, elle peut transmettre des infections. N'utilisez une lancette qu'une seule fois pour prélever du sang.
- Dans de rares cas, la lancette ne revient pas dans l'autopiqueur après avoir prélevé du sang. Assurez-vous que la lancette ne dépasse pas après avoir prélevé du sang. Si la lancette dépasse, mettez prudemment l'autopiqueur de côté. Tenez l'autopiqueur hors de portée des autres personnes et contactez le service clients.

⚠ PRÉCAUTION

Risque d'infection

- Un site de prélèvement non nettoyé peut entraîner des infections. Nettoyez le site de prélèvement avant de prélever du sang.
- Si la date de péremption de la cartouche de lancettes est dépassée, les lancettes peuvent être non stériles. N'utilisez que des cartouches de lancettes dont la date de péremption n'est pas dépassée. La date de péremption est indiquée sur le carton d'emballage à côté du symbole .



Appuyez fermement l'autopiqueur sur le site de prélèvement choisi.

Enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'à la butée.

La lancette est armée et déclenchée en une étape. La lancette pique la peau.

- 2 Pour faciliter la formation d'une goutte de sang, massez le doigt de la base vers l'extrémité. Veillez à appliquer la goutte de sang sur la zone réactive immédiatement après l'avoir obtenue.

REMARQUE

N'attendez pas pour appliquer la goutte de sang sur la zone réactive.

La quantité de sang obtenue dépend de la profondeur de piqûre et de la force avec laquelle vous avez appuyé l'autopiqueur sur la peau.

Si la quantité de sang obtenue est insuffisante, appliquez l'autopiqueur plus fermement la fois suivante. Si cela ne suffit pas, augmentez petit à petit la profondeur de piqûre.

Si, au contraire, la quantité de sang obtenue est excessive, réduisez la profondeur de piqûre.


Utilisez toujours une petite goutte de sang frais bien formée.

Application d'une goutte de sang

Vous pouvez tenir le lecteur dans votre main ou le poser pour appliquer du sang sur la zone réactive. Vous devez pouvoir voir la zone réactive lorsque vous appliquez la goutte de sang.

N'appliquez que la quantité de sang nécessaire.

Le sang en excès risque d'être contaminé et de provoquer des infections au cours d'une mesure ultérieure.

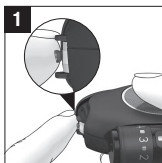

Déposez la goutte de sang **uniquement** au centre de la zone réactive.


Les butées doivent vous permettre d'appliquer correctement la goutte de sang.

- Déposez la goutte de sang sur la zone réactive sans appuyer le doigt.
- Pour ce faire, effleurez légèrement les butées avec le doigt sans appuyer ce dernier sur la zone réactive se situant entre les deux butées.
- Maintenez le doigt le plus immobile possible.

- 2** La goutte de sang est absorbée par la zone réactive.

Enlevez votre doigt de la cassette-test dès que le signal sonore retentit et que le message *Mesure en cours* s'affiche à l'écran.

La zone réactive a absorbé suffisamment de sang. Le symbole du sablier indique que la mesure est en cours.

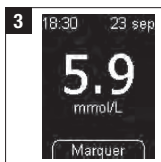

La mesure est terminée après 5 secondes env. en fonction de la concentration de glucose dans le sang. La valeur de glucose s'affiche à

l'écran et le signal sonore retentit. Le lecteur enregistre simultanément les valeurs de glucose.

Refermez le capot de protection pour éteindre le lecteur.

Symboles associés à des valeurs de glucose

Les symboles suivants peuvent être affichés avec la valeur de glucose :

Icône	Signification
	Les piles sont presque à plat.
	Pendant la mesure, la température s'est trouvée en dehors de la plage autorisée de +10 à +40 °C.
	La valeur de glucose se situe au-dessus de la valeur limite supérieure de l'objectif glycémique réglé.
	La valeur de glucose se situe au-dessous de la valeur limite inférieure de l'objectif glycémique réglé.

Symbole au lieu de valeurs de glucose

Le lecteur mesure les valeurs de glycémie comprises entre 0,6 et 33,3 mmol/L. Si la valeur de glucose se situe en dehors de cet intervalle, un des symboles suivants s'affiche à l'écran :

Icône	Signification
LO	La valeur de glucose est inférieure à 0,6 mmol/L.
HI	La valeur de glucose est supérieure à 33,3 mmol/L.

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de préjudice grave

L'affichage **LO** peut signifier que votre valeur de glucose est très basse (selon les circonstances, il peut s'agir d'une grave hypoglycémie). L'affichage **HI** peut signifier que votre valeur de glucose est très élevée (selon les circonstances, il peut s'agir d'une grave hyperglycémie).

Si **LO** ou **HI** correspond à ce que vous ressentez, suivez immédiatement les conseils de votre professionnel de santé. Si, au contraire, **LO** ou **HI** ne correspond pas à ce que vous ressentez, effectuez un test de contrôle à l'aide de solution de contrôle. Recommencez la mesure de glycémie. Consultez votre professionnel de santé si vous estimez que le résultat de cette deuxième mesure ne reflète toujours pas votre état.

Marquage de valeurs de glucose

Vous pouvez marquer une valeur de glucose afin de décrire certains événements survenus en rapport avec cette valeur de glucose ou d'indiquer des caractéristiques particulières de la valeur de glucose. Vous ne pouvez marquer une valeur de glucose que tant qu'elle est affichée après une mesure.

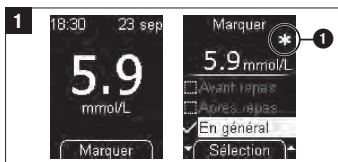

Le menu *Marquer* s'affiche. Vous pouvez ici marquer la valeur de glucose. Vous avez le choix entre 4 marquages différents. Le symbole correspondant au marquage s'affiche à droite au-dessus de la valeur de glucose. Dans l'exemple, la valeur de glucose est marquée par le symbole *En général* ①.

Icône	Signification
	<i>Avant repas</i> (symbole « pomme ») : pour les valeurs de glucose mesurées avant le repas.
	<i>Après repas</i> (symbole « trognon de pomme ») : pour les valeurs de glucose mesurées après le repas.
	<i>En général</i> (symbole « étoile ») : vous pouvez vous-même définir la signification de ce symbole.
	<i>Test de contrôle</i> (symbole « flacon à pinceau ») : pour les tests de contrôle lors desquels vous appliquez de la solution de contrôle à la place de sang sur la zone réactive.

Suppression d'un marquage

- 1 Sélectionnez le marquage que vous désirez supprimer.

Le marquage activé est identifiable au symbole affiché à droite au-dessus de la valeur de glucose.

- 2 Appuyez sur pour supprimer le marquage.

Évaluation des valeurs de glucose

Les valeurs de glucose obtenues dépendent entre autres de facteurs tels que

l'alimentation et la prise de médicaments, l'état de santé, le stress et l'exercice physique.

AVERTISSEMENT

• **Risque de préjudice grave**

Les valeurs de glucose incorrectes (résultats incorrects) risquent de conduire à une décision thérapeutique incorrecte et d'entraîner de graves conséquences sur la santé.

- Ne modifiez pas votre traitement sans avoir consulté au préalable votre professionnel de santé.
- Consultez votre professionnel de santé si la valeur de glucose se trouve en dessous ou au-dessus de l'objectif glycémique que vous avez défini avec votre professionnel de santé.
- Si la valeur de glucose reflète votre état, suivez les conseils de votre professionnel de santé.
- En cas de valeurs glycémiques trop basses ou trop élevées, veuillez consulter immédiatement votre professionnel de santé.
- Les valeurs de glucose anciennes ne correspondent plus à votre état de santé actuel.
- N'utilisez que des valeurs de glucose ayant été obtenues il y a moins de 15 minutes dans le cadre de votre traitement.
- Si la valeur de glucose ne correspond pas à votre état de manière récurrente, vérifiez les points de contrôle indiqués au paragraphe *Raisons justifiant l'obtention de valeurs de glucose peu plausibles et de messages d'erreur.*

PRÉCAUTION

Risque de préjudice grave

Des valeurs de glucose incorrectes peuvent conduire à des recommandations thérapeutiques erronées.

Procédez à un test de contrôle à l'aide des solutions de contrôle Accu-Chek Mobile si vous estimez que la valeur de glucose ne reflète pas votre état et qu'elle est par exemple élevée ou basse contre toute attente. Recommencez ensuite la mesure de glycémie. Consultez votre professionnel de santé si vous estimez que la valeur de glucose de cette deuxième mesure ne reflète toujours pas votre état.

Raisons justifiant l'obtention de valeurs de glucose peu plausibles et de messages d'erreur

En cas d'affichage répété de valeurs de glucose peu plausibles ou de messages d'erreur à l'écran de votre lecteur, la vue d'ensemble suivante peut vous permettre d'en résoudre la cause.

Veuillez contacter le service clients si aucune de ces causes ne correspond à votre situation.

Cause	Solution
Avez-vous noté et tenu compte des limitations relatives à l'usage du lecteur dans certains états de santé et à l'usage de certains médicaments ?	Reportez-vous au paragraphe <i>Limitations</i> de la notice d'utilisation de la cassette-test.
Le site de prélèvement est souillé ou collant. Certaines souillures peuvent être invisibles.	Avant la mesure de glycémie : lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et rincez-les soigneusement afin d'éliminer tous les résidus visibles et invisibles de glucose provenant notamment de restes de nourriture ou de boisson. Essuyez-vous bien les mains avec un chiffon propre.

Cause	Solution
La goutte de sang a été appliquée trop tôt.	Appliquez la goutte de sang sur la zone réactive uniquement lorsque l'instruction <i>Appliquer goutte</i> s'affiche à l'écran.
La goutte de sang a été appliquée trop tard.	Veillez à appliquer la goutte de sang sur la zone réactive immédiatement après l'avoir obtenue.
La goutte de sang a coulé ou a été étalée.	Utilisez toujours une petite goutte de sang frais bien formée.
La goutte de sang a été appliquée sur les côtés ou sur le bord de la zone réactive.	Déposez la goutte de sang uniquement au centre de la zone réactive.
Le doigt a été appuyé trop fortement sur la zone réactive.	Appliquez la goutte de sang sur la zone réactive située entre les butées à l'extrémité de la cassette. Pour ce faire, effleurez légèrement les butées avec le doigt sans appuyer ce dernier sur la zone réactive se situant entre les deux butées. Seule la goutte de sang doit toucher la zone réactive de la cassette.
Secousses ou tremblements au cours de l'application de la goutte de sang.	Maintenez votre doigt et le lecteur sans trembler pendant l'application de la goutte de sang.
La zone réactive est restée trop longtemps en contact avec la goutte de sang.	Enlevez votre doigt de la zone réactive dès que le signal sonore retentit et que le message <i>Mesure en cours</i> s'affiche à l'écran.

Cause	Solution
La goutte de sang a été utilisée pour une deuxième mesure.	Utilisez une nouvelle goutte de sang frais pour chaque mesure.
La température était trop faible ou trop élevée lors de la mesure.	Les mesures de glycémie doivent être effectuées à une température comprise entre +10 °C et +40 °C. Placez le lecteur dans un endroit où la température est au minimum de +10 °C et au maximum de +40 °C, puis attendez qu'il revienne à température ambiante.
Le lecteur de glycémie ou la cassette-test ont été conservés dans de mauvaises conditions.	Conservez le lecteur de glycémie et les cassettes-test conformément aux conditions de stockage indiquées (voir chapitre <i>Conditions de mesure et de stockage</i> ainsi que les instructions figurant dans la notice d'utilisation de la cassette-test).
Une source d'erreur décrite dans la notice d'utilisation de la cassette-test correspond à votre situation.	Vérifiez si l'une des sources d'erreur indiquées correspond à votre situation.
Le lecteur de glycémie est tombé par terre.	Effectuez un test de contrôle.

AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

Le fait que votre lecteur soit tombé peut expliquer que vous ayez obtenu des

valeurs de glucose peu plausibles ou que des messages d'erreur s'affichent.

Réalisez un test de contrôle à l'aide d'une solution de contrôle pour s'assurer du fonctionnement correct du lecteur. Si le résultat de contrôle dépasse l'intervalle, adressez-vous au service clients.

5 Réglages du lecteur

Aperçu des réglages


Menu	Possibilité de sélection et de réglage
Langue	Différentes langues
Volume	5 niveaux de réglage (<i>muet</i> et 4 niveaux de volume sonore)
Sons	<i>Sign. sonores</i> : activer ou désactiver les signaux sonores <i>Rappels</i> : activer ou désactiver le signal sonore lors des rappels <i>Mode Audio</i> : activer ou désactiver le mode audio
Rappels	Jusqu'à 7 horaires de rappel par jour – réglage libre des rappels quotidiens
Heure/date	<i>Heure</i> : régler l'heure <i>Date</i> : régler la date <i>Format h/d</i> : régler le format h/d (8 formats h/d) (format pour heure et date)
Objectif glycémique	Réglage de la valeur limite inférieure et supérieure Activer ou désactiver l'objectif glycémique
Luminosité	3 niveaux

Suivez les instructions suivantes pour ouvrir le menu *Réglages* : Ouvrez le menu *Réglages* à partir du *menu princip.*. Vous pouvez ici choisir les différents menus de configuration tel qu'indiqué au tableau.

Réglage de la langue

Vous pouvez sélectionner parmi les

différentes langues disponibles la langue de l'affichage textuel de votre lecteur.

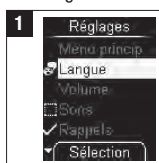

Sélectionnez *Langue* dans le menu *Réglages*.

2 Naviguez jusqu'à la langue souhaitée.

3 Confirmez le choix de la langue.

Correction d'un réglage incorrect de la langue



Vous pouvez modifier la langue comme suit :

- 1** Allumez le lecteur en appuyant sur . Attendez jusqu'à ce que l'affichage à l'écran ne change plus. Appuyez 2 fois sur . Le menu *Réglages* () est à présent en surbrillance.
- 2** Appuyez sur la touche . Le menu *Langue* () est à présent en surbrillance. Appuyez sur la touche . Le menu *Langue* s'ouvre.
- 3** Sélectionnez la langue de votre choix avec . Appuyez sur la touche . La langue sélectionnée est affichée. Appuyez sur la touche . Le lecteur revient au menu *Réglages*.

Réglage du volume

Vous disposez de 5 niveaux de réglage pour le volume des signaux sonores.

Plus le nombre de barres pleines est élevé plus le volume est élevé. Pour le niveau de réglage de volume 1 (*muet*), aucun signal sonore ne retentit.

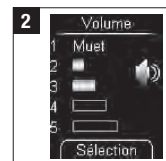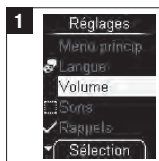

Réglage des sons

Dans le menu *Sons*, vous pouvez activer ou désactiver les signaux sonores, le signal sonore lors des rappels et le mode audio. Les réglages des sons se distinguent de la manière suivante :

Sign. sonores : lorsque *Sign. sonores* est activé, un signal sonore retentit à chaque mesure,

- lorsque le lecteur positionne une zone réactive à l'extrémité de la cassette,
- lorsque *Appliquer goutte* s'affiche à l'écran et que vous appliquez du sang ou de la solution de contrôle sur la zone réactive,
- lorsque *Mesure en cours* s'affiche à l'écran et que la mesure démarre,
- lorsque le résultat s'affiche à l'écran,
- lorsqu'un message d'erreur s'affiche à l'écran.

Pour pouvoir entendre les signaux sonores, le volume doit être réglé à l'aide des niveaux de réglage de volume 2 à 5.


Rappels : lorsque *Rappels* est activé, un signal sonore retentit pour chaque rappel configuré.

Mode Audio : lorsque le Mode Audio est activé, le lecteur vous guide à l'aide des signaux sonores mentionnés ci-avant lors de la mesure de glycémie.

Activation et désactivation des sons

Les sons, les *signaux sonores*, les *rappels* et le *mode audio* peuvent uniquement être activés et désactivés.

Procédure à suivre présentée à l'aide de l'exemple *Sign. sonores* :

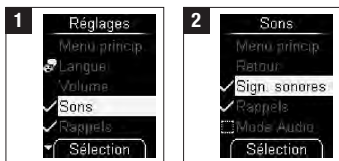

REMARQUE

- Si vous souhaitez utiliser des rappels, vous devez activer à la fois *Rappels* et *Sign. sonores*.
- Si vous souhaitez utiliser le mode audio, vous devez activer à la fois *Mode Audio* et *Sign. sonores*.

Réglage des rappels

⚠ PRÉCAUTION

Risque d'hypoglycémie

Vous risquez de rater le rappel de mesure de glycémie si vous ne configurez pas les signaux sonores pour la fonction de rappel de manière à pouvoir les entendre.

Pour pouvoir utiliser les rappels, vous devez activer les *rappels* et *signaux sonores*, puis régler le volume du signal sonore en fonction de vos besoins.

Configurez le volume sonore pour les rappels de manière à les percevoir en fonction de votre situation et de votre environnement personnels.

Vous pouvez régler jusqu'à 7 horaires de rappel.

Lorsque le lecteur est éteint, *Rappel* s'affiche chaque jour à l'écran accompagné de l'heure de rappel à l'heure réglée. Des signaux sonores retentissent en même temps à condition que la fonction *Rappels* ait été activée dans le menu *Sons*.

Désactivation du signal sonore du message *Rappel*



Si le rappel de mesure est affiché, vous pouvez désactiver les signaux sonores. Appuyez sur ▼ ou ▲.

Si vous n'appuyez sur aucune touche, le lecteur s'éteint automatiquement au bout de

20 secondes. Le rappel ne sera réitéré que le jour suivant.




Si vous effectuez une mesure de glycémie dans un intervalle de moins de 10 minutes avant l'heure de rappel, le rappel sera annulé.

Réglage d'un nouveau rappel

- 1 Sélectionnez *Nouveau* dans le menu *Rappels*.
- 2 Réglez les heures et les minutes, puis confirmez pour continuer.
Dans le format 12 heures uniquement : Sélectionnez *am* ou *pm*.
- 3 L'horaire de rappel s'affiche à l'écran du lecteur. Le rappel est également activé.
- 4 Le lecteur revient au menu *Rappels*. L'horaire de rappel réglé s'affiche à l'écran.

Activation ou désactivation d'un rappel

La liste des rappels existants s'affiche.

- 1 Naviguez jusqu'au rappel que vous souhaitez activer/désactiver.
- 2 Appuyez sur  pour activer () ou désactiver () les rappels.

Modification ou suppression d'un rappel

- 1 Sélectionnez l'horaire de rappel que vous souhaitez modifier ou supprimer.
- 2 Sélectionnez *Modifier* ou *Supprimer*.



Réglage de l'heure, de la date et du format heure/date

Les réglages de l'heure et de la date ont été paramétrés en usine. Nous vous recommandons de vérifier l'heure et la date et de les corriger en cas de divergence par rapport à l'heure et à la date actuelles.

Toutes les valeurs de glucose sont enregistrées avec l'heure et la date de la mesure. L'analyse des valeurs de glucose se

rapportant à ces données sera pertinente seulement à la condition que l'heure et la date soient correctes.

Réglage de l'heure

- 1 Naviguez jusqu'à la fonction *Heure* du menu *Heure/Date*.
- 2 Réglez les heures et les minutes avec  et .

Réglage de la date

L'ordre d'affichage des données jour, mois et année dépend du format heure/date sélectionné lors du réglage. En dehors de l'ordre de ces données, la procédure de réglage est la même.

Vous avez le choix entre ces différents ordres de données :

Jour.Mois.Année





Mois/Jour/Année





Année/Mois/Jour



- 1 Naviguez jusqu'à la fonction *Date* du menu *Heure/Date*.
- 2 Réglez le jour, le mois et l'année avec  et .

Réglage du format heure/date

- 1 Naviguez jusqu'à la fonction *Format h/d* du menu *Heure/Date*.
- 2 Réglez le format heure/date de votre choix avec  et .

Saisie de l'objectif glycémique

Vous pouvez saisir votre objectif glycémique personnel (réglage par défaut : Off). Les valeurs de glucose se situant au-dessus des valeurs limites de l'objectif glycémique que vous avez fixées apparaissent à l'écran accompagnés du symbole \uparrow . Les valeurs de glucose se situant en-dessous des valeurs limites de l'objectif glycémique que vous avez fixées apparaissent à l'écran accompagnés du symbole \downarrow .

L'objectif glycémique correspond aux valeurs limites dans lesquelles vos valeurs de glucose doivent se situer au cours d'un traitement optimal. Définissez avec votre professionnel de santé l'objectif glycémique adapté à votre cas personnel.

Pour déterminer l'objectif glycémique, réglez la valeur limite inférieure et supérieure de ce dernier. La valeur limite inférieure peut être comprise entre 2,8 et 5,5 mmol/L. La valeur limite supérieure peut être comprise entre 5,5 et 11,1 mmol/L. Ces deux valeurs limites peuvent être réglées en augmentant ou en réduisant la valeur d'une unité correspondant à 0,1 mmol/L.


AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

Utiliser la limite inférieure de l'objectif glycémique ne remplace pas la formation sur l'hypoglycémie offerte par votre professionnel de santé ou l'équipe chargée du suivi de votre diabète.

Si vous désirez utiliser la valeur limite inférieure de l'objectif glycémique comme indicateur d'une possible hypoglycémie, n'oubliez pas la chose suivante : cet avertissement n'a de sens que si cette valeur limite a été correctement paramétrée. Nous vous conseillons donc vivement de consulter votre professionnel de santé avant de fixer cette valeur limite.


Saisie d'un objectif glycémique

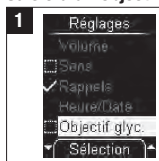

Dans le menu *Réglages*, sélectionnez *Objectif glyc.*

2 Sélectionnez *Modifier*.

3 Saisissez les limites inférieure et supérieure.

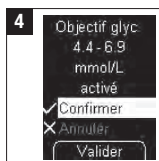

L'objectif glycémique réglé s'affiche à l'écran. Il est également activé dans le même temps.

5 Sélectionnez *Retour* pour revenir au menu *Réglages*.

Un objectif glycémique activé est identifié à l'aide du symbole \checkmark et un objectif glycémique désactivé est à son tour identifié à l'aide du symbole \boxtimes .


Pour modifier votre objectif glycémique, sélectionnez *Modifier* à l'écran de l'objectif glycémique.

Réglage de la luminosité

Vous disposez de 3 niveaux de réglage pour régler la luminosité des affichages textuels et des symboles.

Plus le nombre de barres pleines est élevé, plus la luminosité de l'écran est élevée.

1 Sélectionnez *Luminosité* dans le menu *Réglages*.

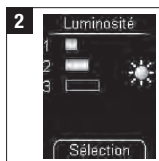

Réglez la luminosité.

6 Utilisation du lecteur comme carnet de surveillance

Le lecteur dispose d'une mémoire d'une capacité de 2000 résultats accompagnés de l'heure et de la date. Le lecteur de glycémie enregistre les informations suivantes :

- tous les résultats
- tous les symboles affichés en rapport avec le résultat glycémique
- tous les marquages réglés

Lorsque la mémoire est pleine, le résultat glycémique le plus ancien est supprimé lors de la nouvelle mesure pour faire de la place au nouveau résultat.

Le menu *Mes données* vous permet d'accéder aux options suivantes :

- *Totalité résultats* : afficher tous les résultats enregistrés en mémoire
- *Moyennes* : afficher les moyennes des 7, 14, 30 ou 90 derniers jours
- *Analyse sur ordinateur* : afficher et analyser les valeurs de glucose mémorisées sur un ordinateur (PC)

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de décision thérapeutique erronée

L'utilisation de valeurs de glucose anciennes en vue de modifier votre traitement peut donner lieu à des ajustements thérapeutiques inappropriés. N'apportez aucune modification à votre traitement en vous fondant sur une seule valeur de glucose dans la mémoire. Consultez votre professionnel de santé avant de modifier votre traitement sur la base de valeurs de glucose mémorisées.

Consultation des résultats en mémoire

1 Dans le *menu principal*, sélectionnez *Mes données* .

2 Sélectionnez *Totalité résultats*.

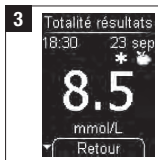

Le dernier résultat enregistré s'affiche. Les symboles enregistrés en même temps que le résultat s'affichent à droite au-dessus de ce dernier.


4 Appuyez sur  jusqu'à ce que le lecteur se mette en marche (plus de 2 secondes).

Le dernier résultat enregistré s'affiche.



5 Appuyez sur  pour consulter le résultat précédent.

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de décision thérapeutique erronée

Veuillez noter que la vérification de l'écran peut être contournée en allumant le lecteur après avoir appuyé sur la touche  et l'avoir maintenue enfoncée.

Les erreurs d'affichage à l'écran peuvent provoquer des erreurs d'interprétation des valeurs de glucose affichées. Réalisez une vérification manuelle de l'écran avant d'utiliser une valeur de glucose antérieure provenant d'une mesure exécutée dans un délai de moins de 15 minutes.

Si vous maintenez la touche  ou  enfoncée, les différents résultats en mémoire se mettent à défiler de plus en plus rapidement. Lorsque le défilement s'interrompt, le résultat le plus ancien ou le plus récent s'affiche.

Aucun résultat enregistré

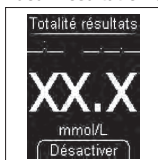

Si *XX.X mmol/L*, avec des traits horizontaux, s'affiche pour la date et l'heure lors de la consultation de la mémoire, cela signifie que la

dernière mesure n'a pas fourni de résultat. Dans ce cas, lors de la dernière mesure,


soit un message d'erreur s'est affiché à l'écran, soit vous n'avez pas appliqué de sang (ou de solution de contrôle) après le message *Appliquer goutte*. Dès qu'une mesure suivante fournit un résultat, l'affichage XXX ou XX.X est supprimé de la mémoire.

Si aucun résultat n'est enregistré dans le lecteur, XXX XX.X mmol/L s'affiche également.

Consultation de la moyenne des valeurs de glucose

Le lecteur peut calculer des moyennes à partir des valeurs de glucose en mémoire.

Moyennes

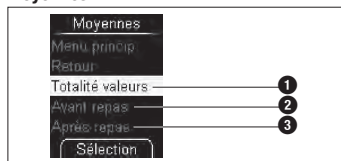


Vous pouvez choisir à partir de quelles valeurs de glucose les moyennes doivent être calculées :


- *Totalité résultats* **1**
- Uniquement les valeurs de glucose marquées *Avant repas* **2**
- Uniquement les valeurs de glucose marquées *Après repas* **3**

Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez sélectionner la période au cours de laquelle les valeurs de glucose ont été obtenues : les 7, 14, 30 ou 90 derniers jours.

La moyenne est calculée à partir de toutes les valeurs de glucose qui correspondent à votre sélection. Les valeurs de glucose suivantes ne sont pas prises en compte dans le calcul des moyennes :

- Valeurs mesurées avec une solution de contrôle (marquées )
- Valeurs mesurées situées en dehors de l'intervalle de mesure (identifiées par la mention **LO** ou **HI**)

Périodes

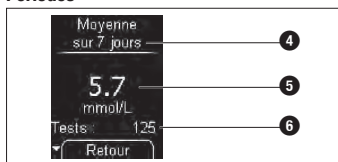

La sélection de la période **4** permet uniquement de définir la moyenne qui s'affiche en premier à l'écran. Vous pouvez choisir entre les différentes périodes avec les touches ▲▼. La moyenne calculée **5** s'affiche, ainsi que le nombre de valeurs de glucose à partir desquelles cette valeur a été calculée (désignées sous le terme de *Tests*) **6**.

1 Dans le *menu principal*, sélectionnez *Mes données*.

2 Sélectionnez *Moyennes*.

3 Sélectionnez *Totalité résultats*, *Avant repas*, ou *Après repas*.

4 Sélectionnez la période au cours de laquelle les valeurs de glucose doivent avoir été obtenues : les 7, 14, 30, ou 90 derniers jours.

Avant / Après repas



Les moyennes *Avant repas* sont marquées avec le symbole  **1**. Les moyennes *Après repas* sont marquées avec le symbole  **2**.

Les valeurs de glucose suivantes ne sont pas prises en compte dans le calcul des moyennes :

- Valeurs de glucose en dehors de la période sélectionnée
- Valeurs de glucose sans horodatage

- Valeurs mesurées avec une solution de contrôle
- Valeurs mesurées situées en dehors de l'intervalle de mesure (identifiées par la mention **LO** ou **HI**)

7 Analyse des valeurs de glucose sur PC

Vous avez **deux possibilités** d'afficher les valeurs de glucose à l'ordinateur à partir du menu *Analyse PC* :

- avec la fonction **Transf. donn.**, vous effectuez le transfert des valeurs de glucose vers l'ordinateur. Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion du diabète spécifique (par exemple le logiciel Accu-Chek Smart Pix) pour afficher les données sur un PC et les analyser.
- avec la fonction **Rapports**, vous pouvez afficher et analyser à l'ordinateur les valeurs de glucose, en utilisant un navigateur et la fonction de journal intégrée au lecteur, aucun logiciel supplémentaire n'étant nécessaire.

PRÉCAUTION

Risque de décision thérapeutique erronée

Le lecteur peut être manipulé en cas de connexion à des dispositifs non sûrs. Vous risquez d'obtenir des valeurs de glucose incorrectes.

Ne raccordez le lecteur qu'à des dispositifs sûrs et de confiance. Ne vous connectez pas à un PC tiers ou public. Contactez le service clients avant d'utiliser un quelconque logiciel spécifique.

Risque de préjudice grave

Afin d'éviter tout choc électrique, n'utilisez que des dispositifs certifiés USB lors du transfert de vos données.

N'utilisez aucun dispositif endommagé.

Définition d'un réglage par défaut

Vous pouvez définir le comportement du lecteur une fois qu'il est allumé lorsqu'il est raccordé à un PC.

- 1** Dans le menu *principal*, sélectionnez *Mes données*.
- 2** Dans le menu *Mes données*, sélectionnez *Analyse sur ordinateur*.
- 3** Dans le menu *Analyse sur ordinateur*, sélectionnez *Par défaut*.
- 4** Dans le menu *Par défaut*, sélectionnez *Transfert de données* ou *Rapports*.

L'analyse des valeurs de glucose sera lancée par la fonction *Transf. donn.* ou *Rapports*, en fonction du réglage par défaut que vous aurez défini.

Il est impossible d'effectuer une mesure pendant le transfert de valeurs de glucose.

REMARQUE

Un logiciel de gestion du diabète spécifique pour l'analyse des valeurs de glucose enregistrées vous sera nécessaire uniquement si vous souhaitez utiliser la fonction de transfert des données.

Il n'est pas nécessaire d'avoir installé un logiciel supplémentaire pour pouvoir afficher un rapport (Accu-Chek Mobile report) dans un navigateur Internet.

Connexion du lecteur à un PC

- 1** Raccordez la petite extrémité du câble USB au port USB du lecteur.
Connectez l'extrémité plus large du câble USB au port USB du PC.
- 2** En fonction du réglage par défaut défini, le lecteur lance l'analyse des résultats avec la fonction *Transf. donn.* ou *Rapports*.
Débranchez le câble USB après avoir analysé les valeurs de glucose sur le PC.

Lancement d'un transfert de données

1



Pendant la connexion à l'ordinateur et le transfert des données, des informations concernant ces opérations sont affichées à l'écran.

2

Si nécessaire, lancez le logiciel de gestion du diabète installé sur le PC. Une fois le transfert des valeurs de glucose terminé, le lecteur s'éteint automatiquement.

Affichage des rapports

1



Assurez-vous que le lecteur est connecté au PC.

Vous serez informé de la progression de la connexion à l'écran.

Le symbole d'ordinateur à l'écran du lecteur clignote une fois la connexion établie avec le PC.

2

Ouvrez le gestionnaire de fichiers de votre système d'exploitation. Dans le gestionnaire de fichiers, le lecteur apparaît en tant que périphérique de stockage de masse USB.

3

Double-cliquez sur l'icône correspondante (ACCU-CHEK) pour afficher le contenu du dossier. Double-cliquez sur le fichier « Start.html » pour l'ouvrir.

Le navigateur Internet s'ouvre et les rapports paramétrés sont affichés.

Rapports

Les rapports peuvent être affichés sur PC dans un navigateur Internet et imprimés. Aucune connexion à Internet n'est nécessaire pour afficher les rapports. Les rapports sont enregistrés dans le lecteur et peuvent être consultés à partir de celui-ci. Lorsque la connexion entre le lecteur et le PC est établie, les rapports suivants sont affichés dans une page de votre navigateur Internet :

- **Rapport évolution générale**

Ce rapport vous montre l'évolution de plusieurs valeurs de glucose au cours de l'intervalle de temps sélectionné.

- **Rapport journée standard**

Ce rapport vous montre toutes les données dans une grille de 24 heures.

- **Rapport semaine standard**

Ce rapport vous montre toutes les valeurs de glucose en fonction du moment où la mesure a été effectuée et du jour de la semaine concerné.

- **Rapport liste**





Les valeurs de glucose sont répertoriées dans la liste en fonction de la date et de l'heure de la mesure.

Symboles


Dans les diagrammes correspondant aux rapports, les valeurs de glucose sont reportées dans l'analyse au moyen de différents symboles.

Les symboles et éléments graphiques figurant dans les diagrammes ont la signification suivante :

Symbole	Signification
	<i>Mesure</i> : valeur de glucose tirée d'une mesure
	<i>Mesures multiples</i> : valeurs de glucose tirées de plusieurs mesures

Symbole	Signification
	<i>Moyenne</i> : moyenne des valeurs de glucose au cours de la période sélectionnée
	<i>Objectif glycémique</i> : objectif glycémique adaptable à votre cas personnel pour les valeurs de glucose (représenté sur l'écran sous forme de barre verte)
	<i>Résultat(s) au-dessus du graphique</i> : la valeur de glucose ne peut pas être représentée car elle se situe au-dessus du diagramme
	<i>Jour non travaillé</i> : jours normalement non travaillés (week-ends)

Interface utilisateur Accu-Chek Mobile Report

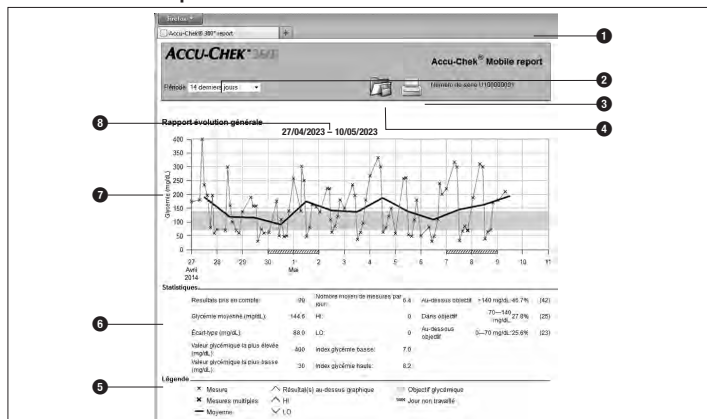

Éléments de commande :

- 1 Fenêtre du navigateur Internet
 - 2 Menu déroulant permettant de sélectionner la période
 - 3 Touche *Impression des rapports*
 - 4 Touche *Enregistrer fichier*
- Fenêtres d'affichage :
- 5 Légende d'explication des symboles
 - 6 Statistiques pour l'analyse des valeurs de glucose
 - 7 Diagramme (représentation graphique du rapport)
 - 8 Période

REMARQUE

Les valeurs de glucose sont représentées en fonction de la version du lecteur avec les unités de mesure **mg/dL** ou **mmol/L**.

Impression des rapports

Tous les rapports que vous voyez à l'écran peuvent aussi être imprimés ensemble.

Pour imprimer les rapports, n'utilisez pas la fonction d'impression de votre navigateur, mais la touche *Imprimer* (🖨) de l'interface utilisateur.

Données analysées


Les données suivantes ne sont pas incluses dans l'analyse statistique :

- Valeurs de glucose en dehors de la période sélectionnée
- Valeurs de glucose sans horodatage
- Valeurs mesurées avec une solution de contrôle
- Valeurs mesurées situées en dehors de l'intervalle de mesure (identifiées par la mention **HI** ou **LO**)

Les réglages effectués sur le lecteur sont appliqués pour l'analyse des données :

- Langue
- Date
- Heure


Rapport évolution générale

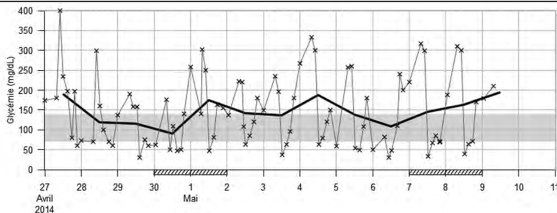

Le **rapport évolution générale** vous indique l'évolution des valeurs de glucose sur la période sélectionnée.

Pour vous aider dans votre analyse, l'objectif défini pour les valeurs glycémiques est représenté par une barre verte en arrière-plan de la courbe. Les jours normalement non travaillés (week-ends) sont par ailleurs identifiés par des hachures sur l'abscisse (axe horizontal, x).


Rapport journée standard

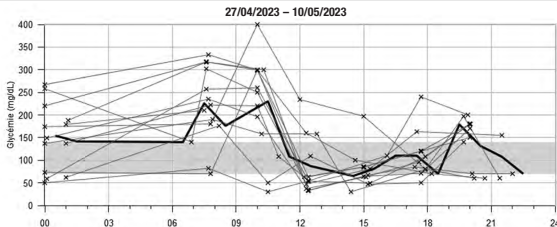

Le **rapport journée standard** vous permettra de reconnaître des schémas qui se répètent tous les jours. À cette fin, toutes les données sont intégrées à une grille de 24 heures, et toutes les mesures effectuées (à peu près) à la même heure de la journée sont donc représentées au même endroit sur l'axe du temps.

Toutes les valeurs de glucose sont reportées à l'endroit correspondant au moment de la journée auquel elles ont été mesurées.

Rapport semaine standard

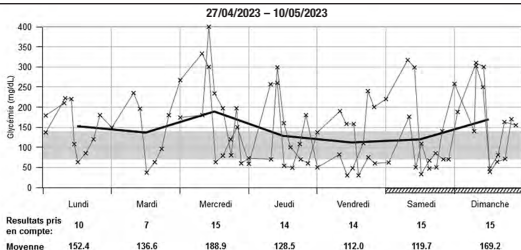

Le *rapport semaine standard* vous permettra de reconnaître des schémas qui se répètent en fonction du jour de la semaine.

Toutes les valeurs de glucose sont portées sur le diagramme à l'endroit correspondant au moment où elles ont été mesurées et au jour de la semaine correspondant.

Sous le diagramme est indiqué le nombre de mesures et de moyennes pour le jour de la semaine concerné.

Rapport liste

Date et heure	Valeur glycémique (mg/dL)	Événement
09.05.2014 07:30	210	Avant repas
01:01	179	
08.05.2014 20:00	170	Après repas
17:45	71	Avant repas
15:00	64	Après repas
12:27	39	Avant repas
10:18	300	Après repas
07:37	310	Avant repas
01:10	188	
07.05.2014 22:00	70	Après repas
20:10	70	Après repas
17:27	85	Avant repas
15:17	67	Après repas
12:25	33	Avant repas
10:05	299	Après repas
07:41	317	Avant repas

Les valeurs de glucose sont répertoriées dans la *liste* en fonction de la date et de l'heure de la mesure. Toutes les valeurs de glucose sont représentées par ordre chronologique, accompagnées d'informations supplémentaires correspondant à certains événements.

Analyse externe des données

Si vous souhaitez analyser les valeurs de glucose avec un logiciel externe, vous avez la possibilité de sauvegarder les données en tant que fichier CSV (CSV = Comma Separated Values). Les fichiers CSV peuvent être ouverts, entre autres, dans un éditeur de texte ou un tableur.

Un fichier CSV contient toujours l'ensemble des valeurs de glucose enregistrées dans le lecteur. Les valeurs de glucose qui ont déjà été transférées auparavant seront à nouveau incluses dans le transfert.

1 Cliquez sur la touche  de l'interface utilisateur.

Il se peut, en fonction de la configuration de votre ordinateur, que le fichier CSV s'ouvre directement dans un tableur. Dans ce cas, vous pouvez enregistrer le tableau via la fonction d'enregistrement du programme de tableur.

2 Sélectionnez l'option d'enregistrement du fichier dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

L'emplacement du fichier CSV sur votre ordinateur dépend des réglages de votre système d'exploitation relatifs au transfert de fichiers.

Le fichier CSV contient les informations suivantes :

- *Numéro de série* du lecteur.
- *Date du transfert, heure du transfert*, date et heure auxquelles le lecteur a transféré les valeurs de glucose à l'ordinateur.
- *Date, heure, résultat* et *unité* des résultats enregistrés dans le lecteur.
- *Marquages* affectés aux résultats, signalées par un « X ».

REMARQUE

Dans le fichier CSV, la date apparaît toujours au format JJ.MM.AAAA, l'heure au format 24 heures (hh:mm). Le format heure/date réglé sur le lecteur n'a pas d'influence sur le format de la date et de l'heure dans le fichier CSV.

Paramètres de sécurité du navigateur Internet

Les paramètres de votre navigateur Internet peuvent influencer sur le traitement des rapports.

Ces rapports utilisent des pages contenant des « *contenus actifs* » (JavaScript). Ces *contenus actifs* peuvent être bloqués en fonction des paramètres de sécurité correspondants dans le navigateur Internet. Le blocage du JavaScript peut éventuellement être à l'origine de messages d'avertissement ou de restrictions des fonctions. Dans ce cas, pour garantir le bon fonctionnement de votre système, vérifiez ces paramètres du JavaScript dans le navigateur Internet.

Vous pouvez souvent définir des paramètres de sécurité différents pour Internet et pour le traitement des rapports (par exemple lorsque vous saisissez vos données d'identification sur votre ordinateur ou que vous utilisez les profils de l'utilisateur du navigateur Internet). Vous pouvez traiter les rapports sans aucune restriction si vous définissez correctement les paramètres de sécurité du navigateur Internet (par ex. en sélectionnant *Autoriser le contenu actif à s'exécuter dans les fichiers de la zone ordinateur* ou l'option équivalente).

Erreurs et dépannage

Erreur	Dépannage
L'icône correspondant au lecteur ACCU-CHEK, sous lequel se trouve le fichier « <i>Start.html</i> », n'apparaît pas sur l'ordinateur.	Assurez-vous que l'option <i>Rapports</i> dans les réglages par défaut est sélectionnée pour l'analyse des données sur PC. Assurez-vous que votre ordinateur ou votre système d'exploitation est compatible avec le transfert de données via USB. Assurez-vous que le connecteur USB est bien enfoncé dans la prise USB de l'ordinateur.
Si le lecteur n'est toujours pas identifié en tant que système.	Branchez l'appareil sur une autre prise USB de votre ordinateur (vous pouvez éventuellement utiliser un duplicateur [ou hub] USB ou choisir l'une des prises USB à l'avant et à l'arrière de votre ordinateur).

Contactez le service clients si le problème persiste.

8 Mode audio

Les modalités d'activation du mode audio sont expliquées au paragraphe *Réglage des sons*.

En mode audio, le lecteur émet des signaux sonores vous guidant pas-à-pas dans l'exécution de la mesure de glycémie ; la valeur de glucose est également signalée par une suite de signaux sonores (bips). Le lecteur émet par ailleurs des signaux sonores lorsque les piles sont faibles, que la cassette-test est vide ou qu'un message d'erreur s'affiche à l'écran.

Il est indispensable de bien savoir comment fonctionne le mode audio et d'être parfaitement en mesure de distinguer les bips annonçant les valeurs de glucose des autres signaux sonores pour pouvoir identifier une valeur de glucose en toute fiabilité.

Les différents signaux sonores utilisés sont expliqués en détail par la suite. Vous pouvez également commander auprès du service clients le logiciel de formation à l'identification des valeurs de glucose en mode audio (programme BeepLearn) ; celui-ci est disponible sous forme de CD.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

- L'usage du mode audio par des personnes malvoyantes n'ayant pas été familiarisées de manière adéquate et étant encore novices peut donner lieu à des procédures erronées et des erreurs de fonctionnement.

Les personnes malvoyantes sont autorisées à utiliser le mode audio uniquement lorsqu'elles se sont familiarisées au fonctionnement du mode audio avec l'assistance d'une personne voyante et qu'elles sont sûres

d'être en mesure de déterminer les valeurs de glucose annoncées en mode audio en toute fiabilité.

L'utilisation du mode audio requiert une attention particulière. En cas d'utilisation incorrecte, l'utilisateur du lecteur est susceptible de mal interpréter les valeurs de glucose. Un dosage d'insuline incorrect établi sur la base de valeurs de glucose erronées peut entraîner des effets néfastes graves pour la santé pouvant entraîner la mort. Si des valeurs de glucose que vous avez déterminées en mode audio vous paraissent douteux et présentent un écart par rapport à des valeurs de glucose normales, vous devez exécuter d'autres mesures de contrôle en présence d'une personne voyante afin de contrôler le résultat.

- Le maniement du lecteur par des personnes malvoyantes peut donner lieu à des procédures incorrectes et des erreurs de fonctionnement. Des déficiences visuelles peuvent par ailleurs provoquer des erreurs d'interprétation des affichages à l'écran. Les personnes malvoyantes ne doivent pas nettoyer le lecteur sans l'assistance d'une personne voyante.
- Un lecteur contaminé peut affecter la fonctionnalité correcte du lecteur. Le lecteur doit donc être régulièrement contrôlé par une personne voyante qui s'assurera de l'absence de souillures et de contaminations externes visibles.

Les signaux sonores émis peuvent avoir deux sons différents. Les bips d'avertissement sont plus aigus (son 2, représenté ci-dessous par —) que les autres (son 1, représenté ci-dessous par —). Le tableau suivant indique à quel son correspond tel ou tel événement.

Signaux sonores

Son 1 : —

**Son 2 : —
(avertissement)**

Mise en marche du lecteur

Annonce d'un message d'erreur

Signaux sonores

Positionnement d'une zone réactive à l'extrémité de la cassette	Notification prévenant que les piles sont faibles
Demande d'appliquer du sang ou de la solution de contrôle	Signal prévenant que la cassette-test est vide
Début de la mesure	
Signal prévenant que la valeur de glucose va être indiquée	
Communication de la valeur de glucose	

Signal sonore au moment de la mise en marche du lecteur

Lorsque le mode audio est activé, vous entendez un bip (—) dès que vous allumez le lecteur, indépendamment de la manière dont vous l'avez mis en marche.

Signaux sonores pendant la mesure

Après le bip indiquant que le lecteur a été mis en marche, vous entendrez 1 bip (—) pendant la mesure :

- lorsque le lecteur positionne une zone réactive à l'extrémité de la cassette,
- lorsque vous devez appliquer le sang ou la solution de contrôle,
- lorsque la mesure commence.

Vous entendez la valeur de glucose exprimée par différents bips.

Plusieurs bips signifient que le lecteur affiche un message d'erreur (—).

Annnonce de la valeur de glucose après une mesure

En mode audio, la valeur de glucose d'une mesure s'affiche à l'écran et est également exprimée par des signaux sonores (bips). Les bips qui retentissent alors expriment non pas le nombre qui s'affiche à l'écran, mais les différents chiffres qui composent ce nombre.

Exemples

Le résultat 7,6 mmol/L est exprimé par 0 – 7 – virgule décimale – 6.



Chaque chiffre est exprimé par le nombre de bips correspondant ; ainsi, le chiffre 4 est indiqué par 4 bips (— — — —). Le zéro est exprimé par un long bip (————). La virgule décimale du résultat glycémique est exprimée par un très court bip (—).

Les résultats inférieurs à 0,6 mmol/L et qui sont donc indiqués à l'écran par **LO**, sont annoncés de la manière suivante : 0 – 0 – virgule décimale – 0.

Les résultats supérieurs à 33,3 mmol/L et qui sont donc indiqués à l'écran par **HI**, sont annoncés de la manière suivante : 9 – 9 – virgule décimale – 9.

La signification des symboles **LO** et **HI** est expliquée au paragraphe *Affichage de symboles au lieu de valeurs de glucose*.


La valeur de glucose est exprimée à trois reprises. Chaque résultat est précédé de deux courts bips (==). Voici donc ce que vous entendez : == valeur de glucose == valeur de glucose == valeur de glucose.

Les informations ou avertissements s'affichant à l'écran sous forme de symboles, p. ex.  ou , en même temps que la valeur de glucose ne sont pas exprimés de manière sonore.

Si vous éteignez le lecteur avec la touche Marche/Arrêt (■) lorsque la valeur de glucose est exprimée par des bips, l'annonce acoustique est interrompue et 1 long bip retentit (■).

Les chiffres composant le résultat sont annoncés comme suit : les dizaines d'abord, puis les unités, la virgule décimale ensuite, et enfin les dixièmes. Chacun de ces groupes est séparé par une courte pause. Les dizaines sont toujours exprimées, même si la valeur de glucose est inférieure à 10. Dans ce cas, un long bip annonce les dizaines, ce qui correspond à un zéro. La virgule décimale est exprimée par un très court bip (■).

13.8 mmol/L :

2 courts bips d'introduction – 1 bip – pause
– 3 bips – pause – 1 très court bip – pause
– 8 bips = 


4,0 mmol/L :

2 courts bips d'introduction – 1 bip long
(signifiant 0 pour les dizaines) – pause –
4 bips – pause – 1 très court bip – pause
– 1 long bip = 

Communication de valeurs de glucose mémorisées


Seule la dernière des valeurs de glucose enregistrées est annoncée par un signal sonore.


La valeur de glucose est exprimée à trois reprises. L'annonce sonore est toujours identique à celle d'une valeur de glucose directement après la mesure. Voici ce que vous entendez : — valeur de glucose — valeur de glucose — valeur de glucose.

Lorsque vous consultez directement les valeurs de glucose enregistrées en appuyant sur la touche , vous entendez tout d'abord le bip indiquant que le lecteur a été mis en marche, puis, directement après, la valeur de glucose :

— valeur de glucose — valeur de glucose — valeur de glucose.

Si XXX est affiché à l'écran pour la dernière valeur de glucose, cela signifie que la dernière mesure n'a pas fourni de valeur de glucose. Dans ce cas, vous entendez les mêmes signaux sonores que lors d'un message d'erreur.

Les marquages de résultats ne sont pas exprimés par un bip sonore (p. ex.  Avant repas).

Il n'y a pas d'annonce sonore lorsque le dernier résultat enregistré est un test de contrôle signalé par  lorsqu'aucun résultat n'est enregistré ou si vous consultez une valeur moyenne.

Announce warnings and error messages

Si les piles sont faibles ou si la cassette-test est vide, le lecteur émet un avertissement sonore. Celui-ci se compose de 2 courts bips (==) qui retentissent à trois reprises (== == ==).

L'avertissement retentit à différents moments.

Piles presque vides :

L'avertissement sonore retentit lorsque vous mettez le lecteur en marche et un message correspondant est affiché à l'écran.

Cassette-test vide :

L'avertissement sonore retentit lorsque vous éteignez le lecteur et qu'il indique que le nombre de zones réactives disponibles est égal à zéro.

Si des messages d'erreur s'affichent à l'écran, ils sont indiqués de manière sonore par deux courts bips (= =) qui retentissent à quatre reprises (= = = = =). Cette suite de bips ne retentit qu'une seule fois. La série de bips qui se fait entendre est la même pour tous les messages d'erreur.

9 Tests de contrôle

Vous pouvez vérifier si le lecteur fournit des valeurs de glucose correctes. Pour ce test de contrôle, on applique une solution de contrôle sur la zone réactive à la place du sang. À la fin du test de contrôle, le lecteur contrôle automatiquement si le résultat de contrôle avec la solution de contrôle est correct et vous informe du résultat du test. Ce test de contrôle, qui s'effectue à l'aide des solutions de contrôle Accu-Chek Mobile, doit être effectué :

- après avoir nettoyé l'intérieur de l'extrémité de la cassette et le capot de protection ainsi que la lentille de mesure et la partie avant de l'ouverture de l'appareil,
- lorsque vous avez des doutes sur la validité d'une valeur de glucose.

Solutions de contrôle



Différentes solutions de contrôle sont disponibles en fonction de votre pays. La couleur du texte figurant sur les étiquettes des différentes solutions de contrôle varie (Control1 = bleu ❶ ou Control2 = rouge ❷).

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

La réalisation de tests de contrôle par des personnes malvoyantes peut donner lieu à des procédures incorrectes et des erreurs d'interprétation des affichages.

Les personnes malvoyantes ne doivent en aucun cas exécuter de tests de contrôle sans l'assistance d'une personne voyante.

Risque de décision thérapeutique erronée

Un test de contrôle erroné est susceptible d'entraîner l'obtention de valeurs de glucose erronées et donc une mauvaise recommandation thérapeutique ayant de graves conséquences sur la santé. Respectez par conséquent les instructions relatives à la réalisation d'un test de contrôle.

Risque de préjudice grave

Des solutions de contrôle conservées ou utilisées de manière inappropriée peuvent fournir des résultats de contrôle hors intervalle. Il n'est alors plus garanti que les valeurs de glucose soient correctes. Conservez et utilisez les solutions de contrôle de la manière décrite au chapitre *Conditions de mesure et de stockage*.

Risque d'infection

Les flacons à pinceau usagés sont susceptibles de transmettre des infections. Éliminez les flacons à pinceau usagés à titre de matériel infectieux conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Préparation du test de contrôle

Pour effectuer un test de contrôle, vous devez disposer :

- du lecteur, dans lequel aura été insérée une cassette-test

- d'un flacon à pinceau encore scellé contenant la solution de contrôle
Accu-Chek Mobile

La solution contenue dans les flacons à pinceaux est à usage unique.

Lisez la notice d'utilisation jointe à la solution de contrôle.

Exécution d'un test de contrôle

Un test de contrôle s'effectue dans l'ensemble comme une mesure de glycémie normale, mis à part que vous appliquez de la solution de contrôle à la place du sang sur la zone réactive.

- Ouvrez le capot de protection ou sélectionnez *Mesure* dans le *menu princ.*.
Quelques secondes après que la zone réactive a été positionnée, le message *Appliquer goutte* apparaît et un signal sonore retentit.
- Tournez le bouchon du flacon à pinceau et retirez-le.
- Tenez le flacon à pinceau légèrement penché, pinceau dirigé vers le bas.
Appuyez légèrement sur le flacon à pinceau jusqu'à ce qu'une goutte se forme sur le pinceau.

Application de la solution de contrôle

Vous pouvez tenir le lecteur dans votre main ou le poser pour appliquer de la solution de contrôle sur la zone réactive. Vous devez pouvoir voir la zone réactive lorsque vous appliquez la solution de contrôle.





Effleurez le centre de la zone réactive à l'extrémité de la cassette avec la pointe du pinceau pour déposer de la solution de contrôle.

- Éloignez le pinceau imbibé de solution de contrôle de la zone réactive dès que le signal sonore retentit et *Mesure en cours* apparaît à l'écran.

La zone réactive a absorbé suffisamment de solution de contrôle. La mesure est

terminée au bout de 5 secondes, et le résultat de contrôle est affiché.

- Sélectionnez *Marquer* lorsque le résultat du test de contrôle est affiché.
- Sélectionnez *Contrôle*.
- Sélectionnez la couleur du texte figurant sur l'étiquette de l'applicateur (**bleu** ou **rouge**).
- Le résultat de contrôle signalé par le marquage  pour *Contrôle* s'affiche.
Appuyez sur la touche .
- Le lecteur indique la valeur limite supérieure et inférieure de l'intervalle de concentration. L'intervalle de concentration affiché dépend de la couleur de la solution de contrôle que vous avez sélectionnée.
- Le lecteur contrôle automatiquement si le résultat se situe dans les limites de l'intervalle de concentration affiché.
- Sélectionnez *Continuer*. Le lecteur revient au *menu princ.*.
Éteignez le lecteur et refermez le capot de protection.
Éliminez le flacon à pinceau usagé conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Contrôle du résultat de contrôle

Accu-Chek® Mobile Control		
	mg/dL	mmol/L
1	35-75	1,9-4,2
2	115-155	6,4-8,6

① = unité de mesure

② = solution de contrôle utilisée

③ = intervalle de concentration

Vous pouvez également contrôler vous-même si le résultat se situe dans les limites de l'intervalle de concentration.

Comparez le résultat avec les intervalles de concentration figurant sur le carton d'emballage de la cassette-test.

Le résultat de contrôle doit se situer dans les limites de l'intervalle de concentration

③ qui y est mentionné.

Remarque : les valeurs indiquées dans l'illustration sont uniquement affichées à titre d'exemple.

Causes de l'affichage du message **Contrôle pas OK**

Lorsque *Contrôle pas OK Recommencer contrôle* s'affiche, cela signifie que le résultat ne se situe pas dans les limites de l'intervalle de concentration stipulé sur le flacon. La vue d'ensemble suivante peut vous aider à résoudre cette problématique.

Veuillez contacter le service clients si aucune de ces causes ne correspond à votre situation.

AVERTISSEMENT

Risque de préjudice grave

Des valeurs de glucose erronées peuvent conduire à une décision thérapeutique erronée et entraîner de graves conséquences sur la santé.

Lorsque *Contrôle pas OK Recommencer contrôle* s'affiche, il n'est pas certain que le lecteur et la cassette-test fonctionnent correctement. Les valeurs des mesures de glycémie risquent alors d'être erronées. Suivez les instructions fournies dans le tableau suivant.

Cause	Solution
La solution de contrôle a été appliquée trop tôt.	Appliquez de la solution de contrôle sur la zone réactive uniquement lorsque l'instruction <i>Appliquer goutte</i> s'affiche à l'écran.
La solution de contrôle a été appliquée trop tard.	Veillez à appliquer la solution de contrôle sur la zone réactive immédiatement après avoir ouvert le flacon à pinceau.
La mauvaise couleur a été sélectionnée.	Dans le menu <i>Test de contrôle</i> , veillez à toujours sélectionner la couleur qui correspond à celle de la mention figurant sur l'étiquette du flacon à pinceau.
La solution de contrôle est périmée.	Réalisez un test de contrôle uniquement avec de la solution de contrôle dont la date de péremption n'est pas dépassée. Vous pouvez trouver la date de péremption sur le fond du flacon à pinceau à côté du symbole  .
La solution de contrôle a été conservée ou utilisée dans de mauvaises conditions.	Conservez et utilisez la solution de contrôle conformément aux instructions figurant dans la notice d'utilisation de la solution de contrôle (voir paragraphe <i>Conservation et usage corrects des solutions de contrôle</i>).

Cause	Solution
La température était trop faible ou trop élevée lors de la mesure.	Les tests de contrôle et les mesures de glycémie doivent être effectués à une température comprise entre +10 °C et +40 °C. Placez le lecteur dans un endroit où la température est au minimum de +10 °C et au maximum de +40 °C, puis attendez qu'il revienne à température ambiante.
Le lecteur de glycémie ou la cassette-test ont été conservés dans de mauvaises conditions.	Conservez le lecteur de glycémie et les cassettes-test conformément aux conditions de stockage indiquées (voir <i>Conditions de mesure et de stockage</i> ainsi que les instructions figurant dans la notice d'utilisation de la cassette-test).
Le lecteur de glycémie est tombé par terre.	Contactez le service clients.

AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

Le fait que votre lecteur soit tombé peut donner lieu à l'obtention de résultats de contrôle hors intervalle et à l'affichage consécutif du message *Test de contrôle pas OK*.

Si tel est le cas, contactez le service clients.

10 Menu Extras

Au menu *Extras*, les opérations suivantes sont possibles :

Test affichage : procède à un test d'affichage spécifique.

Date pérempt. : indique la date limite d'utilisation de la cassette-test.

Chang. cassette : prépare le lecteur au retrait d'une cassette-test qui contient encore des zones réactives non utilisées (p. ex. quand vous nettoyez ou désinfectez le lecteur).

Vérification des éléments d'affichage à l'écran

En dehors du test d'affichage qui a lieu automatiquement après avoir allumé le lecteur, vous pouvez procéder à un test d'affichage à partir du menu *Extras* afin de vérifier que l'affichage soit complet. Ici, le test d'affichage n'apparaît pas seulement 2 secondes environ, il reste affiché jusqu'à ce que vous l'annuliez (durant 1 minute au maximum).




Dans le *menu princip.*, sélectionnez *Extras* (.

Sélectionnez *Test*

affichage.

Appuyez sur *Continuer* pour démarrer la vérification de l'écran.

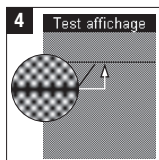

Vérifiez si l'écran présente des erreurs d'affichage.

AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

Les erreurs d'interprétation des valeurs de glucose affichées à l'écran consécutives à des erreurs d'affichage peuvent donner lieu à des décisions thérapeutiques erronées.

Si l'écran présente des erreurs d'affichage, les valeurs de glucose sont

susceptibles de ne pas être affichées correctement. Si tel est le cas, contactez le service clients.

- 5** Appuyez sur *Continuer* pour revenir au menu Extras.

Date limite d'utilisation de la cassette-test

Vous pouvez vérifier la date limite d'utilisation de la cassette-test de la manière suivante :

- 1** Dans le *menu principal*, sélectionnez *Extras* (🔑).
- 2** Sélectionnez *Date pérempt..* La date limite d'utilisation s'affiche.
- 3** Sélectionnez *Retour* pour revenir au menu Extras.

Vérification des zones réactives disponibles

Lorsque le lecteur est éteint :

- 1** Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que le lecteur se mette en marche (plus de 2 secondes).
Le nombre de zones réactives disponibles est alors affiché. Le lecteur s'éteint ensuite au bout de quelques secondes.

Préparation du changement de la cassette-test

La préparation du changement de la cassette-test est uniquement nécessaire si vous souhaitez retirer une cassette-test entamée dont les zones réactives ont été utilisées en partie seulement :



Dans le menu *Extras*, sélectionnez *Chang. cassette*.

- 2** Le lecteur vous invite alors à ouvrir le capot de protection.

Vous pouvez réinsérer une cassette-test entamée ultérieurement. Vous devez alors conserver cette cassette à un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Lorsque vous réinsérez une cassette-test entamée alors qu'une cassette-test se trouvait dans le lecteur, la cassette-test entamée perd une zone réactive.

Changement de cassette-test

Si la cassette-test insérée dans le lecteur est vide ou défectueuse ou encore si sa date limite d'utilisation est dépassée, le message d'erreur correspondant s'affiche après le test d'affichage et l'affichage du nombre de zones réactives disponibles. Le lecteur s'éteint alors automatiquement au bout de quelques secondes.

Si vous avez préparé le changement de cassette-test à partir de *Chang. cassette*, le lecteur vous invite à changer la cassette-test. Le lecteur s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes.

Suivez les étapes de manipulation décrites au paragraphe *Insertion d'une nouvelle cassette-test* et retirez l'ancienne cassette-test.

Éliminez les cassettes-test usagées conformément à la réglementation locale en vigueur.

11 Nettoyage et désinfection du système

Nettoyage et désinfection du lecteur

Lorsque le lecteur est sale, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage. Si le lecteur est contaminé par du sang, nettoyez et désinfectez-le.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'infection

Le lecteur et ses composants sont susceptibles d'être entrés en contact avec

du sang. Afin de prévenir la transmission d'infections, nettoyez et désinfectez le lecteur et ses composants avant usage.

Risque de décision thérapeutique erronée

Le nettoyage et la désinfection du lecteur par des personnes malvoyantes peut donner lieu à des procédures incorrectes et des erreurs de fonctionnement. Les personnes malvoyantes ne doivent pas nettoyer le lecteur sans l'assistance d'une personne voyante.

REMARQUE

- Pour nettoyer le lecteur, utilisez **exclusivement** de l'eau froide. Pour désinfecter le lecteur, utilisez **exclusivement** de l'isopropanol à 70 %. Tout autre produit de nettoyage ou de désinfection pourrait endommager le lecteur ou altérer ses capacités de mesure.
- Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon ou d'un coton-tige légèrement humidifié. Ne vaporisez rien sur le lecteur et ne le plongez pas dans le liquide de nettoyage.

Nettoyage extérieur

Si le boîtier ou l'écran du lecteur est souillé :

- 1 Nettoyage : nettoyez le boîtier ou l'écran à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau froide.
- 2 Désinfection : Répétez l'étape 1 à l'aide d'un chiffon imbibé d'isopropanol à 70 %.

Nettoyage intérieur

Vous devez nettoyer ou désinfecter l'intérieur du lecteur ou l'extrémité de la cassette uniquement si le message *Cassette sale* : *nettoyer selon manuel (E-4)* est affiché. La source de ce message d'erreur peut provenir de la présence de souillures à l'intérieur de l'extrémité de la cassette.

Si vous constatez que la zone autour de l'extrémité de la cassette ou que les butées sont manifestement souillées et si vous souhaitez effectuer un nettoyage ou une désinfection du lecteur, procédez de la manière suivante :

- 1 Dans le menu *Extras*, sélectionnez *Chang. cassette*.
Le lecteur vous invite à ouvrir le capot de protection.
- 2 Ouvrez le capot de protection.
Le lecteur vous invite à changer la cassette-test. Le lecteur s'éteint ensuite automatiquement au bout de 2 secondes environ.
- 3 Retirez la cassette-test de son compartiment.

REMARQUE

Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le lecteur. Évitez de rayer la lentille de mesure.



Vérifiez si des souillures se trouvent à l'intérieur de l'extrémité de la cassette.
Si tel est le cas, éliminez les souillures avec soin.

En cas de présence de souillures ou de sang sur les butées, tamponnez-les délicatement au moyen d'un coton-tige légèrement humidifié.


Si la lentille de mesure présente manifestement des traces de saleté, nettoyez et désinfectez l'intérieur du lecteur.



Passer un chiffon ou un coton-tige légèrement humidifié sur la lentille de mesure et sur la partie avant de l'ouverture de l'appareil.



Laissez le couvercle du compartiment de la cassette ouvert et refermez le capot de protection.

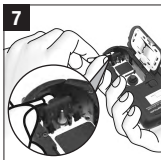

Passez un coton-tige légèrement humidifié sur la partie intérieure du capot de protection.

Retirez les éventuels résidus du coton-tige.

Laissez le lecteur sécher complètement.



Ouvrez à nouveau le capot de protection.

9 Insérez à nouveau la cassette-test dans le lecteur.

Nettoyage et désinfection de l'autopiqueur

⚠ PRÉCAUTION

Risque d'infection

L'autopiqueur et l'embout sont susceptibles d'être entrés en contact avec du sang.

Afin de prévenir la transmission d'infections, nettoyez et désinfectez toujours l'autopiqueur et l'embout avant que quelqu'un d'autre ne les manipule, par exemple pour vous aider.

Afin de prévenir toute transmission d'infections, vous devez nettoyer et désinfecter régulièrement l'autopiqueur et l'embout :

- au moins une fois par semaine,
- en cas de résidus de sang,
- toujours avant que quelqu'un d'autre ne manipule l'autopiqueur, par exemple pour vous aider.

Vous devez utiliser des chiffons non pelucheux dans lesquels vous pourrez enrouler entièrement l'autopiqueur, de l'eau et de l'isopropanol à 70 %. Avant de désinfecter l'autopiqueur et l'embout, vous

devez les nettoyer au préalable afin d'enlever toute trace de sang ou autres salissures.

Les personnes malvoyantes ne doivent pas nettoyer l'autopiqueur sans l'assistance d'une personne voyante.

Pour ne pas endommager l'autopiqueur et l'embout :

- N'immergez jamais l'autopiqueur ni l'embout dans quelque liquide que ce soit.
- Utilisez uniquement de l'eau pour nettoyer et de l'isopropanol à 70 % pour désinfecter.

Préparation

- 1 Retirez l'autopiqueur du lecteur.
- 2 Retirez l'embout de l'autopiqueur.
- 3 Retirez la cartouche de lancettes de l'autopiqueur.

Nettoyage


- 1 Imbibez légèrement un chiffon avec de l'eau.

Essuyez avec soin l'extérieur de l'autopiqueur (voir étapes de manipulation *Désinfection*).

- 2 Essuyez avec soin l'extérieur et l'intérieur de l'embout (voir étapes de manipulation *Désinfection*).


- 3 Essuyez l'autopiqueur et l'embout avec un chiffon sec.

Désinfection

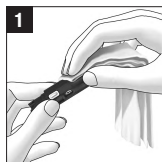


1 Imbibez un chiffon d'isopropanol à 70 %.

Essuyez avec soin l'extérieur de l'autopiqueur pendant 2 minutes.

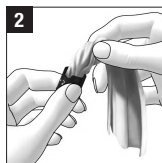

2 Essuyez avec soin l'extérieur et l'intérieur de l'embout pendant 2 minutes.

Remplacez l'embout.

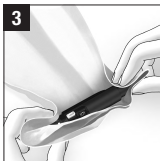

Enroulez entièrement l'autopiqueur dans le chiffon.

Laissez-y reposer l'autopiqueur pendant 8 minutes.

Sortez de nouveau l'autopiqueur, puis laissez-le sécher à l'air.

Si vous utilisez des batteries, veuillez prêter attention au point suivant :

- Le nombre de mesures effectuées par des batteries rechargées est nettement inférieur à celui effectué avec des piles normales.
- À partir du moment où le message de changement des piles apparaît pour la première fois à l'écran, moins de 50 mesures peuvent encore être effectuées ; si l'appareil fonctionne avec des piles anciennes et faibles, il se peut qu'aucune mesure ne soit plus possible.

12 Remplacement des piles

Le message *Piles faibles Insérer nouvelles piles* s'affiche lorsque les piles sont faibles. Il s'affiche à chaque fois que vous éteignez le lecteur et que vous n'avez pas encore changé les piles. À partir du moment où le message s'affiche pour la première fois, vous pouvez procéder encore à 50 mesures environ.

Changez les piles dès que possible.

Vous avez besoin de 2 piles alcalines au manganèse du type AAA, LR 03, AM 4 ou Micro (1,5 V) ou de 2 batteries rechargeables NiMH (type AAA). N'utilisez pas de piles au lithium. Changez toujours les deux piles ou piles rechargeables en même temps.

Les piles fournies vous permettent de procéder à approx. 500 mesures ou d'effectuer des mesures durant un an environ.

Le nombre de mesures peut varier en fonction du fabricant des piles lorsque vous insérez de nouvelles piles. Pour pouvoir continuer à effectuer un grand nombre de mesures, veillez à utiliser si possible des piles à haute performance (contenu énergétique élevé et décharge spontanée faible).

Certains réglages augmentent la consommation d'énergie et diminuent ainsi la durée de vie des piles.

Les réglages suivants augmentent la consommation d'énergie :

- Luminosité de l'écran réglée sur 3
- Volume réglé sur 4 ou 5
- Mode Audio activé


Les résultats glycémiques et les réglages restent enregistrés sur le lecteur lorsque vous changez les piles ou que vous conservez le lecteur sans piles.

Le lecteur est équipé d'une pile de sauvegarde intégrée. Elle alimente l'appareil tant que les piles n'ont pas été insérées et permet ainsi de maintenir le fonctionnement de l'horloge. La pile de sauvegarde a une durée de vie de 2 ans environ. Elle ne peut pas être remplacée par une nouvelle pile de sauvegarde.

À partir du moment où cette pile de sauvegarde est vide, le lecteur n'est plus en mesure de déterminer la date et l'heure réglées, et des traits horizontaux s'affichent à l'écran à la place de ces informations. Dans ce cas, réglez à nouveau l'heure et la date.

REMARQUE


- Enlevez les piles uniquement lorsque le lecteur est éteint.
- Si vous n'utilisez pas le lecteur pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Le changement des piles par des personnes malvoyantes peut donner lieu à des procédures incorrectes et des erreurs de fonctionnement. Les personnes malvoyantes ne doivent pas changer les piles sans l'assistance d'une personne voyante.

 Éliminez les piles usagées conformément à la réglementation locale en vigueur en matière d'environnement.

L'administration municipale vous indiquera la marche à suivre pour éliminer le lecteur.



Faites glisser le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche jusqu'à la butée.

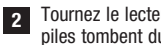

2 Tournez le lecteur de sorte que les piles tombent du compartiment.



3 Insérez deux nouvelles piles dans le compartiment. Respectez la polarité (+ et -) des piles.



4 Rabattez le couvercle du compartiment des piles.

13 Conditions de mesure et de stockage

Le système Accu-Chek Mobile peut être utilisé en intérieur et en extérieur en cas de satisfaction de l'ensemble des conditions requises, c'est-à-dire si la température, le taux d'humidité de l'air et la luminosité ambiante sont dans l'intervalle autorisé et en l'absence de source d'interférences potentielles dans un environnement proche.

Température

Pour connaître les températures de mesure et les conditions de stockage, veuillez consulter le chapitre *Informations techniques*.

REMARQUE

Si la température excède +50 °C, la pile risque de couler, ce qui risque d'endommager le lecteur.

Les mesures de glycémie et les tests de contrôle doivent être effectués à une température comprise entre +10 °C et +40 °C.

Il est toutefois possible de procéder à une mesure de glycémie à une température comprise entre +8 °C et +10 °C ou entre +40 °C et +42 °C. L'avertissement *Température trop basse* ou *Température trop élevée* apparaît alors à l'écran.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

Les valeurs de glucose utilisées pour prendre des décisions thérapeutiques malgré le message d'avertissement *Température trop basse* ou *Température trop élevée* peuvent se traduire par de graves conséquences sur la santé. Les valeurs de glucose risqueraient d'être erronées.

N'apportez pas de modification à votre traitement sur la base de ces valeurs de glucose. Placez le lecteur dans un endroit où la température se situe entre +10 °C et +40 °C et attendez qu'il revienne à température ambiante.

Il est impossible d'effectuer une mesure à des températures inférieures à +8 °C et supérieures à +42 °C. Dans ce cas, le message d'erreur E-8 *Température trop basse : recommencer la mesure dans un endroit plus chaud* ou bien *Température trop haute : recommencer la mesure dans un endroit plus frais*.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décision thérapeutique erronée

- Une accélération du réchauffement ou du refroidissement, par exemple en plaçant

le lecteur dans un réfrigérateur ou sur un radiateur, peut détériorer ce dernier et donner lieu à des mesures de glucose incorrectes.

N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du lecteur.

- Un brusque changement de température peut être à l'origine de condensation sur ou à l'intérieur même du lecteur. Dans de telles circonstances, n'allumez pas le lecteur. Veillez à ce que le lecteur soit lentement amené à température ambiante. Ne conservez jamais le lecteur dans une pièce humide (salle de bain par exemple).

Ne conservez pas l'autopiqueur à température très basse ou très élevée, comme dans une voiture surchauffée par exemple.

Luminosité

Tous les textes, chiffres et symboles s'affichant à l'écran apparaissent en jaune. En cas de forte luminosité, ils risquent d'être difficiles à visualiser. Si nécessaire, faites de l'ombre – par exemple avec votre corps.

REMARQUE

Éloignez le lecteur de toute source lumineuse puissante (p. ex. exposition directe au rayons du soleil). Elle pourrait en effet porter atteinte au bon fonctionnement du lecteur et entraîner l'affichage de messages d'erreur.

Interférences locales

REMARQUE

- Les champs électromagnétiques générés par ex. par des installations radar ou des antennes, des sources de haute tension ou de rayons X, les dispositifs de diathermie et d'électrocautérisation, des routeurs Wi-Fi, des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des points d'accès et des fours à micro-ondes

peuvent perturber le fonctionnement correct du lecteur.

- Les champs électromagnétiques puissants sont susceptibles de causer une perte temporaire de fonction qui peut nécessiter une réinitialisation du lecteur.
- Veillez à maintenir une distance de plus de 30 cm entre le lecteur et toute source de radiofréquence (RF). En cas de suspicion de perturbation des performances par des interférences électromagnétiques, il convient de restaurer un fonctionnement correct en augmentant la distance entre l'équipement et la source d'interférence. L'environnement électromagnétique doit être évalué avant la mise en marche du dispositif.
- Des décharges électrostatiques peuvent perturber le bon fonctionnement du lecteur. Une décharge électrostatique très élevée peut interrompre le fonctionnement du dispositif. N'utilisez pas le lecteur dans un environnement très sec. Veillez par ailleurs à ne pas utiliser le lecteur à proximité de matériaux synthétiques.


14 Messages et erreurs

Messages



Date limite d'utilisation

Ce message s'affiche au début d'une mesure, 10 jours avant la date de péremption de la cassette-test. Ce message est renouvelé 5, 2 et 1 jour(s) avant le délai d'utilisation de la cassette-test.

Appuyez sur la touche  pour démarrer la mesure.




Changement de piles

Ce message s'affiche lorsque les piles sont faibles. Il s'affiche à chaque fois que vous éteignez le lecteur et que vous n'avez pas encore changé les piles. À partir du moment où le message s'affiche pour la première fois, vous pouvez procéder encore à 50 mesures environ. Changez les piles dès que possible.




Capot de protection

Ce message s'affiche si vous éteignez le lecteur et que le capot de protection est encore ouvert. Refermez le capot de protection.

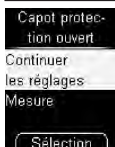

Réglages

Ce message s'affiche lorsque vous venez de modifier un réglage (la date, p. ex.) ou que vous effectuez un réglage pour la première fois (un rappel, p. ex.) et que vous ouvrez le capot de protection. Sélectionnez l'une des deux options.

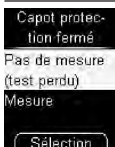

Zone réactive

Ce message s'affiche lorsque vous fermez le capot de protection après que le lecteur ait positionné une nouvelle zone réactive. Sélectionnez l'une des deux options.



Rappel

Lorsque vous avez réglé un rappel, ce message s'affiche à l'heure réglée. Sélectionnez l'une des trois options. En cas de sélection de l'option *Sommeil*, le lecteur émettra à nouveau un rappel dans 15 minutes.



Température

Ce message s'affiche au début d'une mesure, lorsque la température ambiante ou la température du lecteur se situe entre +8 °C et +10 °C ^① ou entre +40 °C et +42 °C ^②. Sélectionnez l'une des deux options.



Défaillances et causes possibles

Procédure à suivre

Le lecteur refuse de s'allumer.

Les piles sont presque épuisées, vides ou bien n'ont pas été insérées dans le lecteur.

Insérez de nouvelles piles.

Vous avez inséré les piles dans le mauvais sens.

Retirez les piles puis remettez-les dans leur compartiment.

La température ambiante est basse et les piles sont faibles.

Placez le lecteur dans un endroit où la température se situe entre +10 °C et +40 °C et attendez qu'il revienne à température ambiante. Insérez de nouvelles piles.

Défaillances et causes possibles

Procédure à suivre

La condensation a affecté les composants électroniques.

Laissez le lecteur sécher lentement.

Le lecteur est défectueux.

Contactez le service clients.

L'heure et la date sont remplacées par des traits.

Le lecteur ne dispose plus de l'heure ni de la date.

Régalez à nouveau l'heure et la date.

Le lecteur a été stocké sans pile et la pile de sauvegarde intégrée est vide.

Le lecteur est bien allumé, mais l'écran reste vide.

L'écran est défectueux.

Contactez le service clients.

Messages d'erreur

Vous trouverez dans les pages suivantes une description de l'ensemble des messages d'erreur que vous pouvez rencontrer et la procédure à suivre pour les résoudre.

- Le fait que votre lecteur soit tombé peut également expliquer que vous ayez obtenu des valeurs de glucose peu plausibles ou que des messages d'erreur s'affichent. Si tel est le cas, contactez le service clients.
- Une chute du lecteur avec l'autopiqueur accolé au lecteur risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'autopiqueur. Dans les cas extrêmes, une lancette dépassant de l'embout est susceptible de provoquer une blessure. Si tel est le cas, contactez le service clients.
- Si des messages d'erreur s'affichent fréquemment, contactez le service clients.

Cassette périmée
Insérer nouv. cassette

(E-1)

E-1

Le délai d'utilisation ou la date de péremption de la cassette-test est dépassé(e).

Cassette vide :
Insérer nouv. cassette

(E-1)

E-1

Ce message s'affiche lorsque vous avez lancé une mesure et que toutes les zones réactives de la cassette-test ont été utilisées.

Cassette défectueuse :
Insérer nouv. cassette

(E-1)

E-1

Retirez la cassette-test du lecteur et insérez-la à nouveau.
ou
Insérez une nouvelle cassette-test dans le lecteur.

Cassette non valable :
Insérer cassette appropriée

(E-1)

E-1

Insérez une cassette-test adaptée à ce type de lecteur.

Cassette?
Insérer nouv. cassette

(E-2)

E-2

Il n'y a pas de cassette-test dans le lecteur.

Erreur lecteur :
Recommencer la mesure

(E-3)

E-3

Une erreur est survenue au niveau du lecteur ou le lecteur est défectueux. Veuillez vous adresser au service clients si le message d'erreur s'affiche lorsque vous allumez à nouveau le lecteur. Il est possible que le lecteur soit défectueux.

Application
incorrecte du
sang :
voir manuel
d'utilisation

(E-4)

E-4

Vous n'avez pas appliqué suffisamment de sang sur la zone réactive.

ou

Vous avez appliqué la goutte de sang sur les côtés ou sur le bord de la zone réactive.

Recommencez la mesure en utilisant une quantité plus importante de sang.

Déposez la goutte de sang **uniquement** au centre de la zone réactive.


Cassette
sale :
nettoyer selon
manuel
utilisateur

(E-4)

Suivant

E-4

Retirez toute souillure de l'intérieur de l'extrémité de la cassette et nettoyez le cas échéant la lentille de mesure avec précaution.

Appuyez sur  si vous souhaitez accéder directement au menu *Nettoyage* à partir de ce menu.

Erreur de
manipulation :
voir manuel
d'utilisation

(E-5)

E-5

Vous...

- avez des doigts qui ne sont pas lavés, sales ou collants,
- avez appliqué une goutte de sang qui est souillée (p. ex. en raison de la présence de restes de nourriture et de boisson ou de résidus de glucose sur le doigt),

- avez appuyé le doigt sur la zone réactive,
- avez déplacé la bande de la cassette-test,
- avez étalé du sang sur la zone réactive,
- n'avez pas immobilisé votre doigt ou
- n'avez pas immédiatement retiré le doigt de la cassette-test après le signal sonore.

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et rincez-les soigneusement. Séchez-vous soigneusement les mains à l'aide d'une serviette propre avant de prélever du sang.

Déposez la goutte de sang sur la zone réactive sans appuyer le doigt. Pour ce faire, effleurez légèrement les butées avec le doigt. Maintenez le doigt le plus immobile possible.

Déposez la goutte de sang ou la solution de contrôle **uniquement** au centre de la zone réactive sans appuyer sur la zone réactive.

Enlevez votre doigt de la cassette-test ou retirez le pinceau imbibé de solution de contrôle de la zone réactive dès que le signal sonore retentit et que le message *Mesure en cours* s'affiche à l'écran. Le signal sonore vous aide à obtenir une valeur de glucose fiable.

Trop clair :
recommencer
la mesure
à l'ombre

(E-6)

E-6

Placez-vous à l'ombre ou faites de l'ombre à votre lecteur – avec votre corps, p. ex.

Recommencez la mesure.

Goutte appliquée
trop tôt :
recommencer
la mesure

(E-6)

E-6

Appliquez du sang ou de la solution de contrôle sur la zone réactive uniquement lorsque l'instruction *Appliquer goutte* s'affiche.

Recommencez la mesure.

Panne du
lecteur :
contactez le
service
après-vente

(E-7)

E-7

Lorsque le message d'erreur s'affiche à nouveau après la mise en marche du lecteur :

Contactez le service clients.

Température
trop basse :
recommencer
la mesure
dans un endroit
plus chaud
(E-8)

E-8

Placez le lecteur dans un endroit où la température minimale est de +10 °C et attendez qu'il revienne à température ambiante.

Température
trop haute :
recommencer
la mesure
dans un endroit
plus frais
(E-8)

E-8

Placez le lecteur dans un endroit où la température maximale est de +40 °C et attendez qu'il revienne à température ambiante.

Piles
vides :
remplacer
les piles
(E-9)

E-9

Insérez deux piles neuves.

lecteur usagés impliquent donc un risque d'infection.

Le lecteur ne tombe pas dans le champs d'application de la Directive Européenne 2012/19/UE (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques). Éliminez votre lecteur, les cassettes-test et les cartouches de lancettes usagés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.



Éliminez les piles usagées conformément à la réglementation locale en vigueur en matière d'environnement.

Éliminez tout autopiqueur non usagé comme un déchet plastique.

L'administration municipale vous indiquera la marche à suivre pour éliminer le lecteur.

Retrait de la pile de sauvegarde

En plus des deux piles, le lecteur est équipé d'une pile de sauvegarde intégrée, placée sur la paroi intérieure du compartiment des piles. Vous devez également retirer celle-ci du lecteur avant de l'éliminer.

Retirez la pile de sauvegarde en procédant comme suit :

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'infection


- Un autopiqueur usagé éliminé de manière inappropriée implique un risque d'infection.

Afin de prévenir la transmission des infections, éliminez l'autopiqueur usagé à titre de matériel infectieux conformément aux règlements en vigueur dans votre pays.

- Une cassette-test usagée est susceptible de transmettre des infections.

Éliminez les cassettes-test usagées à titre de matériel infectieux conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Lors du prélèvement d'une goutte de sang et de la mesure de votre glycémie, l'autopiqueur et le lecteur peuvent entrer en contact avec du sang. Un autopiqueur et un

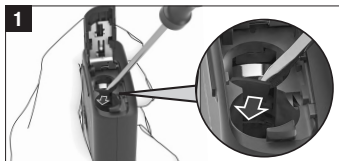

Coupez la traverse fixant la pile de sauvegarde à l'aide d'un petit tournevis.

La pile de sauvegarde se détache et tombe dans le compartiment des piles.



Retournez le lecteur pour récupérer la pile de sauvegarde.

16 Informations techniques

Type de lecteur

Accu-Chek Mobile (modèle U1)

Référence article/n° série

Voir la plaque d'identification apposée au dos du lecteur

Principe de mesure

Reportez-vous à la notice d'utilisation de la cassette-test.

Intervalle de mesure

Reportez-vous à la notice d'utilisation de la cassette-test.

Volume de sang nécessaire

Reportez-vous à la notice d'utilisation de la cassette-test.

Durée de mesure

5 secondes environ (selon la concentration)

Alimentation électrique

2 piles alcalines au manganèse (1,5 V, type AAA, LR 03, AM 4 ou Micro) ou 2 batteries rechargeables NiMH (type AAA), pile de sauvegarde : pile bouton lithium 3 V, type CR1025

Durée de vie de la pile

Avec les piles fournies : approx. 500 mesures ou un an environ (moins si la luminosité est réglée sur 3, ou si le volume est réglé sur 4 ou 5, ou en mode audio du fait de la consommation d'énergie plus importante liée à ce mode)

Arrêt automatique

Au bout de 1 ou 2 minute(s), selon la dernière action effectuée

Température

Pour la mesure : +10 à +40 °C

Pour le stockage :

Lecteur sans piles et sans cassette-test : -25 à +70 °C

Lecteur avec piles et sans cassette-test : -10 à +40 °C

Lecteur avec piles et avec cassette-test : +2 à +30 °C

Humidité de l'air

Pour la mesure et le stockage : entre 15 et 85 % d'humidité relative

Altitude

entre 0 et 4000 m au-dessus du niveau de la mer

Capacité de la mémoire

2000 résultats accompagnés de l'heure et de la date et de la valeur moyenne sur 7, 14, 30 et 90 jours

Dimensions

121 × 63 × 20 mm avec autopiqueur

Poids

environ 129 g avec autopiqueur, piles, cassette-test et cartouche de lancettes

Écran

Écran OLED (Organic Light Emitting Diode)

Interface

USB (Micro B)

Évaluation des performances par l'utilisateur

Reportez-vous à la notice d'utilisation de la cassette-test.

Calibration et traçabilité

Le système a été calibré à l'aide de sang total présentant différents taux de glucose. Les valeurs de référence ont été déterminées à l'aide de la méthode à l'hexokinase calibrée par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse avec dilution isotopique/ID-GCMS (ordre). Cette méthode de référence a été standardisée au moyen de la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse avec dilution isotopique (ID-GCMS), la meilleure méthode

d'assurance qualité métrologique (ordre), et répond au standard NIST (traceable).

Conditions de fonctionnement de l'autopiqueur

Utilisez l'autopiqueur et ses accessoires dans les conditions de fonctionnement suivantes :

Plage de températures autorisée : +5 à +45 °C

Humidité relative de l'air : 5 à 90 %

Compatibilité électromagnétique

Ce lecteur répond aux exigences en matière d'émissions et d'immunité électromagnétiques conformément à la norme EN CEI 61326-2-6. Ses émissions électromagnétiques sont donc faibles. Il n'y a pas lieu de s'attendre à des interférences qui auraient des répercussions sur d'autres appareils électriques.

En cas de suspicion de perturbation des performances par des interférences électromagnétiques, il convient de restaurer un fonctionnement correct en augmentant la distance entre l'équipement et la source d'interférence.

L'environnement électromagnétique doit être évalué avant la mise en marche du dispositif.

Déclaration de conformité

Roche déclare que l'équipement radioélectrique du type lecteur de glycémie Accu-Chek Mobile est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://declarations.accu-chek.com>

Composants du système

Lecteur Accu-Chek Mobile (modèle U1) Cassettes-test Accu-Chek Mobile

Utilisez exclusivement des cassettes-test Accu-Chek Mobile lorsque vous mesurez la glycémie avec le lecteur Accu-Chek Mobile.

Solutions de contrôle Accu-Chek Mobile

Utilisez exclusivement ces solutions de contrôle lorsque vous effectuez un test de contrôle du lecteur Accu-Chek Mobile avec la cassette-test correspondante.

REMARQUE

Adressez-vous au service clients pour savoir où vous pouvez vous procurer les cassettes-test et solutions de contrôle.

17 Informations à la clientèle

Effets et prévalence de la maladie

Pour obtenir de plus amples informations sur les effets et la prévalence du diabète dans votre région, consultez le site web de la Fédération internationale du diabète sur www.idf.org ou envoyez un e-mail à info@idf.org. Pour obtenir des conseils ou connaître le numéro de la ligne d'assistance, consultez l'organisation nationale du diabète de votre pays.

Signalement d'incidents graves

Pour un patient/utilisateur/tiers au sein de l'Union Européenne et au sein de pays disposant d'un régime réglementaire identique ; en cas de survenue d'un incident grave au cours de l'utilisation du présent dispositif ou suite à son utilisation, veuillez en informer le fabricant et votre autorité nationale.

Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des Performances Cliniques (RCSPC)

Vous trouverez le RCSPC suite au lancement de la base de données européenne relative aux dispositifs médicaux (Eudamed) ici : <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Service clients

Adressez-vous au service clients pour toute question concernant la manipulation du lecteur Accu-Chek Mobile ou de l'autopiqueur Accu-Chek FastClix, ainsi qu'en cas de valeurs de glucose peu plausibles ou de défaillance présumée du lecteur, de la cassette-test, de l'autopiqueur ou de la cartouche de lancettes. N'essayez ni de réparer, ni de modifier le lecteur ou l'autopiqueur vous-même. Nous vous invitons à téléphoner au service clients qui vous aidera à régler le problème auquel vous êtes confronté, que celui-ci concerne le lecteur, la cassette-test, l'autopiqueur ou la cartouche de lancettes de Roche.

Pour enregistrer votre lecteur, appelez le service clients.*

Suisse

Service clientèle Accu-Chek 0800 803 303
appel gratuit
www.accu-chek.ch

18 Explication des symboles

L'emballage, la plaque d'identification du lecteur, l'autopiqueur et l'emballage des lancettes sont susceptibles de comporter les symboles ci-dessous.



Suivre les instructions d'utilisation (symbole bleu, noir ou blanc)



Attention, se référer aux consignes de sécurité figurant dans les instructions d'utilisation du produit.



Limite de température



Limite d'humidité de l'air



Date de péremption

La date de péremption indiquée sur le kit de lecteur de glycémie correspond à la date d'expiration la plus proche des composants du kit, qu'il s'agisse des piles du lecteur de glycémie, de la cassette-test ou de la cartouche de lancettes.



Délai d'utilisation de la cassette-test après ouverture de l'emballage plastique : 90 jours



Tous les composants de la boîte peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Éliminez les cassettes-test usagées conformément à la réglementation locale en vigueur.



Date de fabrication



À usage unique



Patient unique – usage multiple



Méthode de stérilisation utilisant l'irradiation



Identifiant unique du dispositif



Indique le mandataire établi en Suisse



Fabricant



Numéro de référence



Dispositif médical



Dispositif médical de diagnostic in vitro

*Pas disponible dans tous les pays.

	Numéro de lot
	Numéro de série
	Dispositif d'autodiagnostic
	Conforme aux exigences en vigueur fixées par la législation européenne
	Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS-210 d'Industrie Canada.
	La marque de conformité signifie que le produit est conforme aux normes en vigueur et établit un lien de traçabilité entre l'appareil et le fabricant, l'importateur, ou tout mandataire chargé de l'introduction de l'appareil sur les marchés australien et néo-zélandais, et responsable à ce titre de la conformité aux normes correspondantes.
La signification des autres symboles est indiquée dans les instructions d'utilisation et les notices d'utilisation fournies avec les composants dans l'emballage.	
	Certifié par l'organisation USB Implementers Forum



Autopiqueur **Accu-Chek FastClix**
DISPOSITIF MÉDICAL



Lancettes **Accu-Chek FastClix**
DISPOSITIF MÉDICAL



Lecteur de glycémie **Accu-Chek Mobile**
DISPOSITIF MÉDICAL DE DIAGNOSTIC
IN VITRO

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK 360°,
ACCU-CHEK SMART PIX et FASTCLIX sont des marques de Roche.



Les logos USB-IF sont des marques de l'organisation
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

© 2024 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

www.accu-chek.com

Mise à jour : 2024-02