

AVERTISSEMENT

Risque de lésions mortelles
Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation.

Risque de survenue d'un grave incident de santé
Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel d'utilisation de votre lecteur de glycémie Accu-Chek Guide. Le manuel d'utilisation fournit des consignes importantes à respecter en termes de manipulation ainsi que d'autres informations.

Risque d'infection
Au cours du prélèvement d'une goutte de sang, l'autopiqueur et l'embout peuvent entrer en contact avec du sang. L'autopiqueur est réservé exclusivement à l'usage personnel.

REMARQUE

- Ayez toujours des piles de rechange en réserve.
- La durée de vie des piles peut varier en raison de facteurs tels que la température et le fabricant.

MISE À JOUR : 2024-09

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE et FASTCLIX sont des marques de Roche. Le nom et les logos **Bluetooth**® sont des marques déposées du groupe Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Roche est soumise à un contrat de licence.
© 2024 Roche Diabetes Care
07545754021A-1124
07545754021(01)-1124



ACCU-CHEK® Guide



**POUR COMMENCER
GUIDE DE DÉMARRAGE**




Pour trouver des applications de gestion du diabète compatibles avec votre lecteur, visitez www.accu-chek.app/bgm.



ACCU-CHEK®

Vue d'ensemble du lecteur

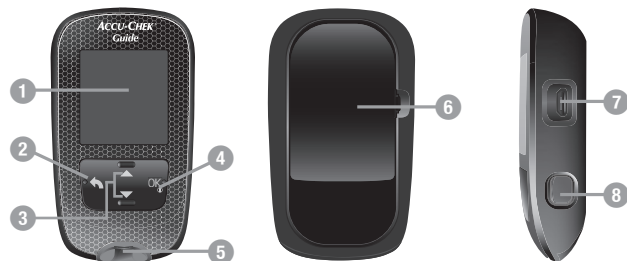


- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Écran | 5 Fente d'insertion de la bandelette réactive avec éclairage |
| 2 Touche Précédent | 6 Couvercle du compartiment des piles |
| 3 Touches Haut et Bas | 7 Micro-port USB |
| 4 Touche Marche/Arrêt/Réglage/OK | 8 Éjecteur de bandelette réactive |

Réglage de la langue et du format de l'heure




Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. **Language** (langue) s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **↩** ou **→** pour mettre en surbrillance la langue souhaitée. Appuyez sur la touche **OK**.

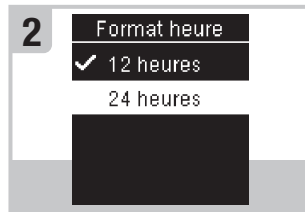


Format heure s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **↩** ou **→** pour mettre en surbrillance **12 heures** (am/pm) ou **24 heures**. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au **Menu principal**.

Préparation de l'autopiqueur

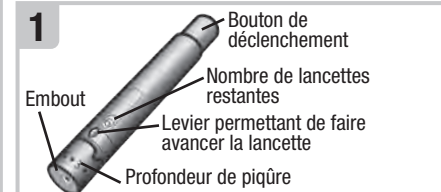


Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'autopiqueur Accu-Chek FastClix et de la cartouche de lancettes.

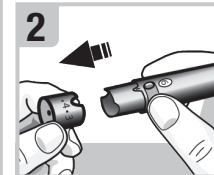


Retirez l'embout de l'autopiqueur en tirant dessus. Ne cherchez pas à visser ou dévisser l'embout.

Remarque : N'insérez pas une cartouche de lancettes tout en appuyant simultanément sur le bouton de déclenchement. N'insérez pas une cartouche de lancettes alors que le bouton de déclenchement est posé sur une surface, telle qu'une table. Vous risqueriez de déclencher une lancette et de vous piquer accidentellement.

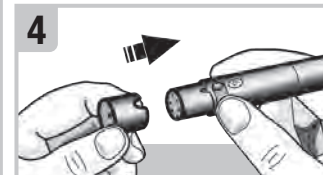

Remplacez l'embout sur l'autopiqueur. Assurez-vous que l'encoche de positionnement de l'embout coïncide avec la partie saillante de l'autopiqueur.

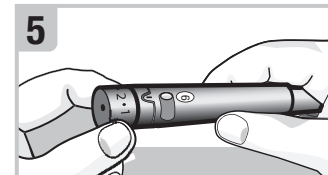


Réglez la profondeur de piqûre de la lancette pour réduire au minimum la sensation d'inconfort éprouvée lors de la piqûre. Commencez sur 2. Pour une peau épaisse, réglez sur un chiffre plus élevé.

1 cartouche de lancettes = 6 lancettes



Remarque : Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes stériles. Vous pouvez effectuer 6 mesures avant de remplacer la cartouche de lancettes.

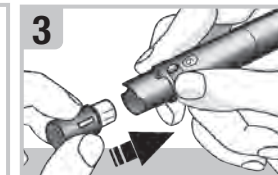

Insérez la cartouche de lancettes par son extrémité blanche dans l'autopiqueur. Poussez la cartouche de lancettes à fond ; un clic confirme son bon positionnement.



Remarque : Ne retirez pas la cartouche de lancettes tant que les 6 lancettes n'ont pas été utilisées ; il n'est en effet pas possible de la réemployer une fois extraite de l'autopiqueur.

Lorsque vous êtes prêt pour la mesure...



Utilisation de l'autopiqueur : appuyez sur le bouton de déclenchement de l'autopiqueur pour armer et piquer, cela en 1 seul clic.

Réalisation d'une mesure de glycémie




Lavez-vous et séchez-vous les mains avant d'effectuer une mesure de glycémie.




Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées.




Retirez une bandelette réactive du tube de bandelettes réactives. Puis refermez-le correctement.

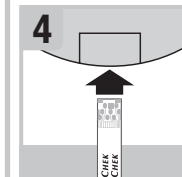

Insérez l'extrémité métallique de la bandelette réactive dans le lecteur.

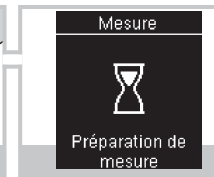

Le lecteur s'allume. **Préparation de mesure** s'affiche à l'écran.

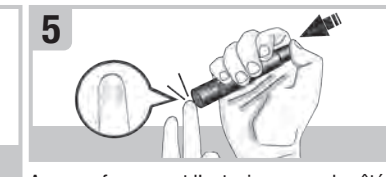

Appuyez fermement l'autopiqueur sur le côté de l'extrémité du doigt et enfoncez entièrement le bouton de déclenchement afin de ponctionner le doigt.



Mettez l'**extrémité jaune** de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang obtenue. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive.



Retirez votre doigt de la bandelette réactive lorsque **Mesure en cours** s'affiche à l'écran.



Le résultat glycémique s'affiche à l'écran en moins de 4 secondes.

Et avant de terminer...



Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant coulisser le levier vers l'avant puis en le ramenant vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

ACCU-CHEK® Guide

Roche

MANUEL D'UTILISATION

LECTEUR DE GLYCÉMIE



Table des matières

| | | | |
|--|----|--|----|
| Introduction..... | 1 | Chapitre 6: Communication sans fil et liaison du lecteur | 39 |
| Chapitre 1: Votre nouveau système | 4 | Chapitre 7: Entretien et dépannage du lecteur | 45 |
| Chapitre 2: Mesures de glycémie | 9 | Chapitre 8: Informations techniques | 53 |
| Chapitre 3: Tests de contrôle | 17 | Chapitre 9: Garantie | 58 |
| Chapitre 4: Réglages du lecteur..... | 20 | | |
| Chapitre 5: Consultation des données | 31 | | |

Introduction

Le présent manuel d'utilisation contient des avertissements, des précautions et des remarques :



AVERTISSEMENT

Un **AVERTISSEMENT** indique un risque grave prévisible.



PRÉCAUTION

Une **PRÉCAUTION** décrit une mesure que vous devez prendre pour utiliser le produit de manière sûre et efficace ou pour prévenir toute détérioration du produit.

REMARQUE

Une **REMARQUE** est destinée à attirer votre attention sur d'importantes informations qui vous permettront une utilisation optimale du produit.

Le système Accu-Chek Guide

Utilisé avec les bandelettes réactives Accu-Chek Guide, le lecteur de glycémie Accu-Chek Guide est destiné aux mesures quantitatives de glucose dans du sang total capillaire frais prélevé à l'extrémité du doigt, à la paume, à l'avant-bras ou au bras et permet ainsi de surveiller l'efficacité du contrôle glycémique.

Utilisé avec les bandelettes réactives Accu-Chek Guide, le lecteur de glycémie Accu-Chek Guide est destiné à l'autocontrôle diagnostique in vitro par les personnes atteintes de diabète.

Utilisé avec les bandelettes réactives Accu-Chek Guide, le lecteur de glycémie Accu-Chek Guide est destiné à la mesure diagnostique in vitro près du patient effectuée par les professionnels de santé en milieu clinique. La mesure sur sang veineux, artériel et néonatal est limitée à un usage professionnel. Ce système n'est pas destiné au diagnostic du diabète sucré, ni à la mesure de glycémie à partir d'échantillons de sang néonatal du cordon.

Utilisateur prévu / population cible

- Destiné à l'autocontrôle par les personnes atteintes de diabète (patient unique – usage multiple).
- Destiné à la mesure près du patient effectuée par les professionnels de santé (plusieurs patients – usage multiple).
- Le système peut être utilisé dans les environnements de soins de santé professionnels tels que les cabinets médicaux, au sein des services de médecine générale, en cas de soupçon de diabète et en cas d'urgence.

Type de lecteur

Modèle Accu-Chek Guide 921, 922, 923, 925, 926, 929, 930

Produit REF

07400870, 07400918, 07400926, 07400934, 07400942, 07400969, 08453063, 08453071

Le système comprend :

lecteur de glycémie Accu-Chek Guide avec piles, bandelettes réactives Accu-Chek Guide* et solutions de contrôle Accu-Chek Guide*.

*Certains de ces articles ne sont éventuellement pas inclus dans le kit. Ils peuvent être achetés séparément.

Introduction

AVERTISSEMENT



Risque de suffocation

Ce produit contient de petites pièces pouvant être avalées. Conservez les petites pièces hors de portée des enfants en bas âge et des personnes susceptibles d'avalier les petites pièces.

Risque de lésions mortelles

- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Toute ingestion ou insertion dans le corps entraîne un risque de brûlures chimiques ou de perforation des tissus mous, voire un risque de mort. De graves brûlures peuvent survenir dans les 2 heures suivant une ingestion. En cas de suspicion d'ingestion ou d'insertion d'une pile dans une quelconque partie du corps, demandez immédiatement des soins médicaux.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, interrompez toute utilisation du produit et conservez-le hors de portée des enfants. Contactez Roche.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection

Tout objet en contact avec du sang humain constitue une source potentielle d'infection (voir : Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition; CLSI document M29-A4, May 2014). Professionnels de santé : voir aussi la section Message aux professionnels de santé du chapitre Informations techniques.

Risque de survenue d'un grave incident de santé

Tout non-respect des instructions de mesure ou des instructions de conservation et de manipulation des bandelettes réactives peut entraîner l'obtention d'un résultat incorrect et risque d'entraîner un traitement inapproprié. Veuillez lire attentivement et suivre les instructions figurant dans le manuel d'utilisation et les notices d'utilisation des bandelettes réactives et solutions de contrôle.

Introduction

Importance de la régularité des mesures de glycémie

La manière dont vous gérez votre diabète au quotidien peut être considérablement améliorée par des mesures de glycémie régulières. Nous avons fait en sorte que ces mesures s'effectuent le plus simplement possible.

Informations importantes sur votre nouveau lecteur

- Il est fortement recommandé de disposer d'une méthode de mesure auxiliaire. Ne pas réaliser de mesure peut retarder la prise de décisions thérapeutiques et entraîner de graves problèmes de santé. Les méthodes de mesure auxiliaires peuvent par exemple reposer sur un lecteur et des bandelettes réactives auxiliaires. Demandez conseil à votre professionnel de santé ou votre pharmacien pour connaître les autres méthodes auxiliaires possibles.
- Le lecteur peut vous demander de choisir une langue ainsi qu'un format de l'heure (12 heures ou 24 heures) lorsque vous l'allumez pour la première fois.
- Vérifiez l'heure et la date affichées sur le lecteur avant de procéder à une mesure. Ajustez l'heure et la date si nécessaire.
- Les affichages de données présentés tout au long du présent manuel sont donnés à titre d'exemple. Vos données seront différentes.
- Contactez votre professionnel de santé si vous avez suivi les étapes du manuel et que vous continuez d'avoir des symptômes qui ne semblent pas correspondre à vos résultats glycémiques ou si vous avez des questions.

Signalement d'incidents graves


Pour un patient/utilisateur/tiers au sein de l'Union Européenne et au sein de pays disposant d'un régime réglementaire identique ; en cas de survenue d'un incident grave au cours de l'utilisation du présent dispositif ou suite à son utilisation, veuillez en informer le fabricant et votre autorité nationale.

1 Votre nouveau système

Le lecteur Accu-Chek Guide



Vue avant

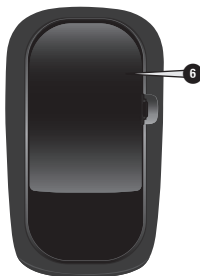

Vue arrière



Vue de côté

1. Écran

Affiche les résultats, les messages et les résultats glycémiques dans la mémoire.

2. Touche Précédent

Permet de revenir à l'affichage ou au champ précédent.

3. Touches Haut et Bas

Appuyez pour naviguer parmi les options de menu ou pour augmenter ou diminuer des nombres.

4. Touche Marche/Arrêt/Réglage/OK

Pour allumer ou éteindre le lecteur et pour confirmer les options.

5. Fente d'insertion de la bandelette réactive avec éclairage

Insérez-y la bandelette réactive.

6. Couvercle du compartiment des piles

Soulevez pour remplacer les piles.

7. Micro-port USB

Permet de transférer les données du lecteur vers un ordinateur (PC).

8. Éjecteur de bandelette réactive

Appuyez sur cette touche pour retirer la bandelette réactive.



9. Tube de bandelettes réactives*

(exemple)


10. Bandelette réactive* – Extrémité métallique

Insérez la bandelette réactive dans le lecteur par cette extrémité.

11. Bandelette réactive* – Extrémité jaune

Appliquez ici la goutte de sang ou la solution de contrôle.

1 Votre nouveau système

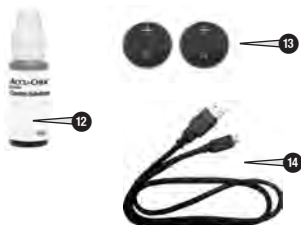

12. Flacon de solution de contrôle*

13. Piles






14. Câble USB*

Connecte le lecteur à un PC.

*Certains de ces articles ne sont éventuellement pas inclus dans le kit. Ils peuvent être achetés séparément.

Fonctions des touches

Ce tableau présente les fonctions de la touche Précédent, des touches Haut et Bas et de la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK sur le lecteur. Ces fonctions sont utilisées dans l'ensemble du présent manuel. Reportez-vous au chapitre Réglages du lecteur pour obtenir des instructions spécifiques sur la préparation du lecteur.

| Touche | Fonction |
|---|---|
|  Touche Précédent | Retourner à l'affichage précédent. Retourner au champ précédent. |
|   Touches Haut et Bas | Faire défiler un menu vers le haut et vers le bas. Augmenter ou diminuer un nombre. |
|  Touche Marche/ Arrêt/Réglage/OK | Appuyez brièvement sur la touche pour allumer le lecteur. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour éteindre le lecteur. Appuyez sur la touche pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche pour accéder au champ ou à l'affichage suivant. Appuyez sur la touche pour enregistrer une option. Lorsque le lecteur est éteint, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour vérifier l'écran du lecteur.  |

1 Votre nouveau système

Menus du lecteur





















1. Titre de l'affichage ou de menu
2. Options de menu
3. Défilement de l'affichage vers le bas
4. Défilement de l'affichage vers le haut






| Affichage | Description |
|-----------|--|
| | D'autres options de menu supplémentaires sont disponibles sous la dernière option. Appuyez sur la touche sur le lecteur pour afficher les options. |
| | D'autres options de menu supplémentaires sont disponibles au-dessus de la première option. Appuyez sur la touche sur le lecteur pour afficher les options. |
| | D'autres options de menu supplémentaires sont disponibles au-dessus et au-dessous des options. Appuyez sur la touche ou sur le lecteur pour afficher les options. |
| | Option mise en surbrillance (Mesure) Appuyez sur la touche pour accéder au menu Mesure . |
| | Champ mis en surbrillance (HH = Heure) Appuyez sur la touche ou pour avancer ou reculer l'heure. Appuyez sur la touche pour confirmer le réglage de l'heure et passer au champ des minutes. |

1 Votre nouveau système

Symboles

Voici une liste des symboles qui s'affichent à l'écran du lecteur.

| Symbole | Description |
|---|---|
|  | Au-dessus de l'objectif glycémique |
|  | Après repas |
|  | Au coucher |
|  | Avant repas |
|  | Au-dessous de l'objectif glycémique |
|  | Mesure de glycémie |
|  | Coche / test de contrôle OK / option ou réglage sélectionné |
|  | Flacon de solution de contrôle |
|  | Test de contrôle pas OK |
|  | Modifier |
|  | Erreur |
|  | À jeun |
|  | Mode avion |
|  | Aide |
|  | Pile faible |
|  | Mes données |
|  | Aucun marquage |
|  | Autre |

| Symbole | Description |
|---|----------------------------|
|  | Tous |
|  | Réglages |
|  | Rappel de mesure |
|  | Avertissement |
|  | Dans l'objectif glycémique |

1 Votre nouveau système

Réglage de la langue et du format de l'heure

Le lecteur peut vous demander de choisir une langue ainsi qu'un format de l'heure (12 heures ou 24 heures) lorsque vous l'allumez pour la première fois.

1



Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. **Language** (langue) s'affiche à l'écran.

2



Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre la langue en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage de la langue souhaitée et retourner au **Menu principal**.

3



Si le lecteur vous demande de régler le format de l'heure :

Format heure s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour

mettre en surbrillance **12 heures** (am/pm) ou **24 heures**.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au **Menu principal**.

REMARQUE


Contactez Roche si vous avez sélectionné la mauvaise langue et que vous ne pouvez plus la corriger.

2 Mesures de glycémie

AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

L'utilisation de la mauvaise unité de mesure est susceptible de conduire à une interprétation erronée de votre niveau de glycémie réel et risque d'entraîner un traitement inapproprié. Les résultats glycémiques peuvent être affichés dans deux unités de mesure différentes : mg/dL ou mmol/L. L'étiquette située à l'arrière du lecteur indique l'unité de mesure. Si le lecteur affiche la mauvaise unité, contactez Roche. Si vous ne savez pas quelle unité de mesure vous convient, contactez votre professionnel de santé.

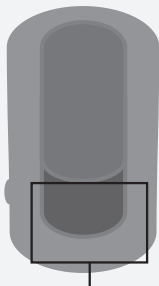

mg/dL ou mmol/L est indiqué ici

Utilisation du système Accu-Chek Guide

AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

- Le lecteur et/ou la bandelette réactive risquent d'être endommagés si vous avez laissé tomber le lecteur seul ou avec une bandelette réactive insérée. Éliminez la bandelette réactive et réalisez un test de contrôle avec une solution de contrôle et une nouvelle bandelette réactive non usagée afin de vous assurer que le lecteur et les bandelettes réactives fonctionnent correctement. Puis, recommencez la mesure de glycémie avec une nouvelle bandelette réactive.
- Une bandelette réactive qui n'est pas conservée ou utilisée de manière appropriée est susceptible d'être à l'origine d'un résultat glycémique incorrect.
- Ne conservez pas les bandelettes réactives à des températures élevées ni dans des endroits humides (salle de bain ou cuisine) ! La chaleur et l'humidité pourraient endommager les bandelettes réactives.
- Utilisez uniquement des bandelettes réactives Accu-Chek Guide.
- Utilisez la bandelette réactive aussitôt après l'avoir retirée du tube de bandelettes réactives.
- N'appliquez pas de sang ou de solution de contrôle sur la bandelette réactive avant de l'avoir insérée dans le lecteur.
- Afin de protéger les bandelettes réactives de l'humidité, refermez directement le tube de bandelettes réactives après avoir retiré une bandelette réactive.
- Conservez les bandelettes réactives non utilisées dans leur tube d'origine fermé.
- Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. N'utilisez pas les bandelettes réactives au-delà de cette date.

2 Mesures de glycémie

- Conservez le tube de bandelettes réactives et le lecteur à l'abri de la chaleur et de l'humidité, dans une chambre par exemple.
- Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour obtenir des informations relatives aux conditions de stockage des bandelettes réactives et aux conditions de fonctionnement du système.

Réalisation d'une mesure de glycémie à partir de sang prélevé à l'extrémité du doigt

REMARQUE

- Procédez au réglage correct du lecteur avant de procéder à votre première mesure de glycémie.
- Vous aurez besoin du lecteur, d'une bandelette réactive et d'un autopiqueur équipé d'une lancette pour pouvoir effectuer une mesure de glycémie.
- Vous ne pouvez pas effectuer une mesure de glycémie tant que votre lecteur est connecté à un PC à l'aide d'un câble USB.
- Vous pouvez commencer la mesure de glycémie de 2 manières différentes.
 - Insérez une bandelette réactive dans le lecteur.
 - Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. Sélectionnez **Mesure** > **OK**.

1



Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et séchez-les soigneusement. Préparez l'autopiqueur.

2




Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées.

3



Retirez une bandelette réactive du tube de bandelettes réactives. Puis refermez-le correctement.

4

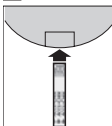

Insérez l'extrémité métallique de la bandelette réactive dans le lecteur.



Le lecteur s'allume.

Préparation de mesure s'affiche à l'écran.

5



Lorsque **Appliquer goutte** s'affiche à l'écran, piquez l'extrémité de votre doigt à l'aide de l'autopiqueur.

6



Massez doucement votre doigt de manière à activer le flux sanguin. Cela facilite l'obtention d'une goutte de sang.

2 Mesures de glycémie

7



Mettez l'**extrémité jaune** de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang obtenue. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive.

8



Retirez votre doigt de la bandelette réactive lorsque **Mesure en cours** s'affiche à l'écran.

9



ou




Le résultat glycémique s'affiche à l'écran. Vous avez la possibilité d'ajouter un marquage au résultat glycémique en appuyant sur la touche **OK** OU de continuer à l'étape 11 pour terminer la mesure.

10




ou

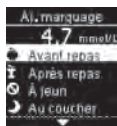

Aj. marquage s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance un marquage. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le marquage associé au résultat glycémique. Reportez-vous au paragraphe Ajout de marquages à des résultats glycémiques du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails.

11

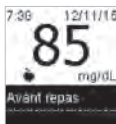

ou



Le résultat final s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** ou pour confirmer le marquage et retourner au **Menu principal**. Si vous souhaitez modifier le marquage, appuyez sur la touche pour sélectionner le marquage. Appuyez sur la touche **OK** pour retourner au menu **Aj. marquage**.

REMARQUE

Réalisation d'une **mesure de glycémie** : si l'affichage **Rés. contrôle** apparaît à l'écran, une erreur est survenue.

- Ne prenez aucune mesure sur la base du résultat glycémique.
- Éliminez la bandelette réactive et répétez la mesure de glycémie avec une nouvelle bandelette réactive.

2 Mesures de glycémie

12



Retirez et éliminez la bandelette réactive usagée en la tirant du lecteur ou en appuyant sur l'éjecteur de bandelette réactive situé sur le côté du lecteur.





Appuyez sur cette touche pour éjecter la bandelette réactive.

Avertissements relatifs à la glycémie

Un avertissement s'affiche si votre résultat glycémique dépasse l'intervalle de mesure du lecteur. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le message d'avertissement LO ou HI, OU le lecteur passe automatiquement à l'affichage du résultat LO ou HI.

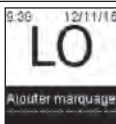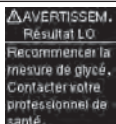

La glycémie peut être au-dessous de l'intervalle de mesure du système. Reportez-vous au paragraphe Résultats glycémiques inhabituels du présent chapitre.

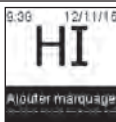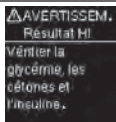

La glycémie peut être au-dessus de l'intervalle de mesure du système. Reportez-vous au paragraphe Résultats glycémiques inhabituels du présent chapitre.

Ajout de marquages à des résultats glycémiques

REMARQUE

L'analyse de vos résultats glycémiques enregistrés dans votre lecteur vous permet ainsi qu'à votre professionnel de santé d'évaluer de manière efficace votre gestion du diabète. Cette analyse constitue un outil précieux pour améliorer votre gestion du diabète. Soyez vigilant(e) lors de l'ajout de marquages à vos résultats glycémiques. Des marquages incorrects peuvent générer la détection erronée de groupes par le lecteur si la fonction Groupes est réglée sur **Activer**.







Vue d'ensemble

Il est très important de régler l'heure et la date correctes sur le lecteur. Le réglage de l'heure et de la date correctes permet une interprétation précise des informations pour vous et votre professionnel de santé.


- Vous pouvez ajouter des marquages à vos résultats glycémiques afin de vous permettre et de permettre à votre professionnel de santé d'analyser les groupes détectés par le lecteur (reportez-vous au paragraphe Groupes du chapitre Réglages du lecteur pour obtenir de plus amples détails).
- Si la fonction Groupes est réglée sur **Activer**, vous ne pouvez PAS modifier le marquage associé à un résultat glycémique lorsqu'un groupe a été détecté (reportez-vous au paragraphe Groupes du chapitre Réglages du lecteur pour obtenir de plus amples détails).
- L'ajout d'un marquage entraîne l'enregistrement de ce dernier ainsi que du symbole correspondant avec les résultats glycémiques.

2 Mesures de glycémie


Voici une liste des symboles de marquage qui peuvent être ajoutés à un résultat glycémique.

| Symbole | Nom | Description |
|--|---------------|--|
|  | Avant repas | Si la fonction Groupes est réglée sur Activer , sélectionnez Avant petit-déjeuner, Avant déjeuner, Avant dîner ou Avant en-cas (voir la page suivante pour l'ajout de marquages avec la fonction Groupes réglée sur Activer). |
|  | Après repas | Si la fonction Groupes est réglée sur Activer , sélectionnez Après petit-déjeuner, Après déjeuner, Après dîner ou Après en-cas (voir la page suivante pour l'ajout de marquages avec la fonction Groupes réglée sur Activer). |
|  | À jeun | Sélectionnez À jeun en l'absence d'apport calorique pendant au moins 8 heures.* |
|  | Au coucher | |
|  | Autre | Vous pouvez utiliser ce marquage pour marquer un événement tel qu'un résultat de prélèvement sur site alternatif ou un exercice physique. |
|  | Aucune saisie | 1. Vous ne souhaitez pas ajouter de marquage. 2. Vous souhaitez retirer un marquage du résultat glycémique actuel. |

*American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes-2020.

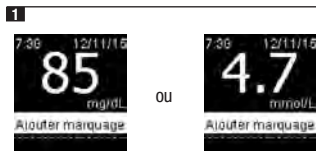

Après avoir effectué une mesure de glycémie, le résultat glycémique s'affiche à l'écran et **Ajouter marquage** est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK** pour ajouter un marquage.

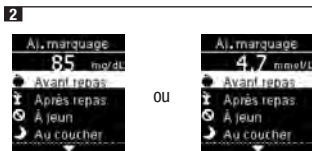

Le menu **Aj. marquage** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance le marquage souhaité (l'exemple ici est **Avant repas**). Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le marquage.



Si la fonction **Groupes** est réglée sur **Activer** et que vous sélectionnez **Avant repas** ou **Après repas**, appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner un repas spécifique (**Petit-déjeuner**, **Déjeuner**, **Dîner** ou **En-cas**). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le repas sélectionné associé au résultat glycémique.

2 Mesures de glycémie

3



ou



Le résultat final s'affiche à l'écran accompagné du symbole du marquage. Appuyez sur la touche **OK** ou **↵** pour confirmer le marquage et retourner au **Menu principal**.

Pour modifier le marquage, appuyez sur la touche **⏏** pour sélectionner le marquage.

Appuyez sur la touche **OK** pour retourner au menu **Aj. marquage**.

Réalisation d'une mesure de glycémie à partir de sang prélevé à la paume, à l'avant-bras ou au bras (prélèvement sur site alternatif, AST)

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

Votre niveau de glycémie varie plus rapidement à l'extrémité du doigt ou à la paume qu'à l'avant-bras et au bras. La réalisation d'une mesure de glycémie à partir de sang provenant de l'avant-bras ou du bras est susceptible de donner lieu à une erreur d'interprétation de votre niveau de glycémie effectif et donc à un traitement inapproprié.

- N'utilisez pas de prélèvement sur site alternatif (AST) pour étalonner un système de mesure du glucose en continu.
- N'utilisez pas de prélèvement sur site alternatif pour calculer votre dose d'insuline.
- Un prélèvement sur site alternatif ne doit être réalisé qu'à un état d'équilibre (lorsque la glycémie n'évolue pas rapidement).

Vous pouvez prélever le sang nécessaire à la mesure de glycémie ailleurs qu'à l'extrémité du doigt. Les sites alternatifs comprennent la paume, l'avant-bras ou le bras.

Le sang prélevé à l'extrémité du doigt ou à la paume peut être utilisé à n'importe quel moment pour la mesure de glycémie.

Si le sang est prélevé à l'avant-bras ou au bras, il y a certains moments où il est déconseillé d'utiliser ce sang pour la mesure de glycémie.

Pour toute mesure effectuée à partir de sang prélevé à l'avant-bras ou au bras, veuillez préalablement lire le paragraphe suivant.

2 Mesures de glycémie

| | |
|---|--|
| Il est possible d'effectuer une mesure de glycémie à partir de sang prélevé à l'avant-bras ou au bras | <ul style="list-style-type: none"> • juste avant un repas. • à jeun. |
| Il n'est PAS recommandé d'effectuer une mesure de glycémie à partir de sang prélevé à l'avant-bras ou au bras | <ul style="list-style-type: none"> • jusqu'à 2 heures après un repas, quand les valeurs glycémiques peuvent augmenter rapidement. • après une injection de bolus d'insuline, quand les valeurs glycémiques peuvent diminuer rapidement. • après un exercice physique. • en cas de maladie. • si vous suspectez une valeur glycémique basse (hypoglycémie). • s'il vous arrive parfois de ne pas ressentir les hypoglycémies. |

Si les prélèvements sur site alternatif (AST) vous intéressent, parlez-en tout d'abord à votre professionnel de santé.

Si vous avez besoin d'un embout AST et souhaitez obtenir des informations détaillées à propos des prélèvements sur site alternatif, contactez Roche.

Résultats glycémiques inhabituels

PRÉCAUTION

Risque de survenue d'un grave incident de santé

Si les résultats glycémiques obtenus ne correspondent pas à votre état de santé, reportez-vous à la liste suivante pour résoudre le problème.

| Origine possible | Résolution du problème |
|--|--|
| Est-ce que vous vous êtes lavé les mains ? | Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et séchez-les soigneusement. Recommencez la mesure de glycémie avec une nouvelle bandelette réactive. |
| La date de péremption des bandelettes réactives était-elle dépassée ? | Éliminez les bandelettes réactives si elles ont dépassé la date de péremption. Recommencez la mesure de glycémie avec une bandelette réactive dont la date de péremption n'est pas dépassée. |
| Avez-vous toujours refermé correctement le tube de bandelettes réactives ? | Remplacez les bandelettes réactives si vous pensez que le tube de bandelettes réactives est resté ouvert pendant un certain temps. Recommencez la mesure de glycémie avec une bandelette réactive conservée dans des conditions adéquates. |
| Avez-vous utilisé la bandelette réactive aussitôt après l'avoir retirée du tube de bandelettes réactives ? | Recommencez la mesure de glycémie avec une nouvelle bandelette réactive. |

2 Mesures de glycémie

| Origine possible | Résolution du problème |
|---|--|
| Avez-vous bien conservé les bandelettes réactives à l'abri de la chaleur et de l'humidité ? | Recommencez la mesure de glycémie avec une bandelette réactive conservée dans des conditions adéquates. |
| Avez-vous bien suivi les instructions ? | Reportez-vous au chapitre Mesures de glycémie, et recommencez la mesure de glycémie. Si le problème persiste, contactez Roche. |
| Le lecteur et les bandelettes réactives fonctionnent-ils correctement ? | Effectuez un test de contrôle. Reportez-vous au chapitre Tests de contrôle pour obtenir des instructions. |
| Avez-vous toujours un doute sur l'origine du problème ? | Contactez Roche. |

Symptômes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie

AVERTISSEMENT

Risque d'hypoglycémie

En reconnaissant les symptômes de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie, vous êtes en mesure d'interpréter les résultats glycémiques et de décider de l'attitude à avoir s'ils semblent inhabituels.

- Effectuez une mesure de glycémie à partir de sang prélevé à l'extrémité du doigt ou à la paume si vous présentez l'un des symptômes suivants ou d'autres symptômes inhabituels.
- Contactez votre professionnel de santé dans les plus brefs délais si le résultat glycémique est signalé comme étant bas (LO) ou élevé (HI).

Glycémie basse (hypoglycémie) : les symptômes d'hypoglycémie peuvent notamment consister en : anxiété, tremblements, transpiration, maux de tête, augmentation de l'appétit, sensation de vertige, pâleur cutanée, modifications soudaines de l'humeur ou irritabilité, fatigue, difficultés à se concentrer, maladresse, palpitations et/ou état confusionnel.

Glycémie élevée (hyperglycémie) : les symptômes d'hyperglycémie peuvent notamment consister en : augmentation de la soif, envie fréquente d'uriner, vision trouble, somnolence et/ou perte de poids inexpiquée.

Effets et prévalence de la maladie

Pour obtenir de plus amples informations sur les effets et la prévalence du diabète dans votre région, consultez le site web de la Fédération internationale du diabète sur www.idf.org ou envoyez un e-mail à info@idf.org. Pour obtenir des conseils ou connaître le numéro de la ligne d'assistance, consultez l'organisation nationale du diabète de votre pays.

3 Tests de contrôle

À quel moment faut-il effectuer un test de contrôle ?

Le test de contrôle sert à vérifier que le lecteur et les bandelettes réactives fonctionnent correctement. Effectuez un test de contrôle dans les cas suivants :

- Vous ouvrez une boîte de bandelettes réactives neuve.
- Vous avez laissé le tube de bandelettes réactives ouvert.
- Vous pensez que les bandelettes réactives sont endommagées.
- Vous souhaitez vérifier le fonctionnement du lecteur et des bandelettes réactives.
- Vos bandelettes réactives ont été exposées à des températures excessives, à l'humidité ou aux deux.
- Vous avez laissé tomber le lecteur.
- Votre résultat glycémique ne correspond pas à votre état de santé.
- Vous désirez vous assurer que vous effectuez la mesure de glycémie correctement.

À propos des solutions de contrôle

- Utilisez uniquement des solutions de contrôle Accu-Chek Guide.
- Refermez correctement le flacon de solution de contrôle après utilisation.
- Lorsque vous ouvrez un nouveau flacon de solution de contrôle, inscrivez la date sur l'étiquette du flacon. La solution de contrôle doit être éliminée au plus tard 3 mois après la date à laquelle le flacon de solution de contrôle a été ouvert (date d'élimination) sans toutefois dépasser la date de péremption imprimée sur l'étiquette du flacon.
- N'utilisez pas de solution de contrôle périmée ou dont la date d'élimination est dépassée.
- Pour connaître les conditions de stockage de la solution de contrôle, reportez-vous à la notice d'utilisation qui l'accompagne.
- Le lecteur fait automatiquement la différence entre la solution de contrôle et le sang.
- Les résultats de contrôle enregistrés ne peuvent pas être consultés à partir du lecteur.

- La solution de contrôle peut tacher les vêtements. Si vous en renversez, lavez vos vêtements à l'eau et au savon.

Réalisation d'un test de contrôle

Vous aurez besoin du lecteur, d'une bandelette réactive et de la solution de contrôle de niveau 1 (Control 1) ou de niveau 2 (Control 2).

1




Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées.

2



Retirez une bandelette réactive du tube de bandelettes réactives. Puis refermez-le correctement.

3

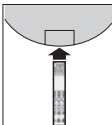

Insérez l'extrémité métallique de la bandelette réactive dans le lecteur. Placez le lecteur à plat.



Le lecteur s'allume. **Préparation de mesure** s'affiche à l'écran.



Appliquer goutte s'affiche à l'écran.

3 Tests de contrôle

4



Choisissez la solution de contrôle à utiliser pour le test de contrôle. Le niveau devra être saisi ultérieurement au cours du test de contrôle.

5



Enlevez le bouchon du flacon de solution de contrôle. Essayez l'embout du flacon avec un mouchoir en papier. Pressez le flacon doucement pour former une petite goutte.

6



Mettez la goutte en contact avec l'**extrémité jaune** de la bandelette réactive. Ne déposez pas de solution de contrôle sur le dessus de la bandelette réactive.



Mesure en cours s'affiche à l'écran lorsque la bandelette réactive a aspiré suffisamment de solution de contrôle.

7



ou



Rés. contrôle et le symbole du flacon de solution de contrôle s'affichent à l'écran. Appuyez sur la touche ou pour sélectionner le niveau de contrôle que vous avez utilisé pour le test de contrôle. Si vous ne sélectionnez pas de niveau, le lecteur enregistre le résultat de contrôle sans niveau de contrôle. Appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE

Réalisation d'un **test de contrôle** : si l'affichage **Rés. contrôle** N'APPARAÎT PAS à l'écran, une erreur est survenue.

- Ne prenez aucune mesure sur la base du résultat de contrôle.
- Éliminez la bandelette réactive et répétez le test de contrôle avec une nouvelle bandelette réactive.

8



ou



Dans objectif et le symbole s'affichent à l'écran si le résultat de contrôle se situe dans l'intervalle.



ou



Hors objectif et le symbole s'affichent à l'écran si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle.

9



Essayez l'embout du flacon avec un mouchoir en papier. Refermez correctement le flacon. Retirez et éliminez la bandelette réactive usagée.

REMARQUE

Le lecteur s'éteint 90 secondes après la réalisation correcte d'un test ou 15 secondes après avoir retiré la bandelette réactive si aucune autre action n'a lieu.

3 Tests de contrôle

Interprétation des résultats de contrôle hors de l'intervalle acceptable

AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

Des résultats glycémiques incorrects peuvent conduire à des recommandations thérapeutiques erronées.

Les intervalles de concentration sont imprimés sur l'étiquette du tube de bandelettes réactives. Si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle, assurez-vous que le lecteur et les bandelettes réactives fonctionnent correctement. Reportez-vous à la liste suivante pour résoudre le problème.

| Origine possible | Résolution du problème |
|--|---|
| La date de péremption des bandelettes réactives ou des solutions de contrôle était-elle dépassée ? | Éliminez les bandelettes réactives ou le flacon de solution de contrôle s'ils ont dépassé la date de péremption. De même, éliminez la solution de contrôle si l'ouverture du flacon remonte à plus de 3 mois. Recommencez le test de contrôle avec une bandelette réactive et une goutte de solution de contrôle dont la date de péremption n'est pas dépassée. |
| Avez-vous bien essuyé l'embout du flacon de solution de contrôle avant l'utilisation ? | Essuyez l'embout du flacon avec un mouchoir en papier. Recommencez le test de contrôle avec une nouvelle bandelette réactive et une nouvelle goutte de solution de contrôle. |
| Avez-vous toujours refermé correctement le tube de bandelettes réactives et le flacon de solution de contrôle ? | Remplacez les bandelettes réactives ou la solution de contrôle si vous pensez que le tube de bandelettes réactives ou le flacon de solution de contrôle sont restés ouverts pendant un certain temps. Recommencez le test de contrôle avec une bandelette réactive et une solution de contrôle conservées dans des conditions adéquates. |
| Avez-vous utilisé la bandelette réactive aussitôt après l'avoir retirée du tube de bandelettes réactives ? | Recommencez le test de contrôle avec une nouvelle bandelette réactive et une nouvelle goutte de solution de contrôle. |
| Avez-vous bien conservé les bandelettes réactives et les solutions de contrôle à l'abri de la chaleur et de l'humidité ? | Recommencez le test de contrôle avec une bandelette réactive et une solution de contrôle conservées dans des conditions adéquates. |
| Avez-vous bien suivi les instructions ? | Reportez-vous au chapitre Tests de contrôle et recommencez le test de contrôle. |
| Avez-vous choisi le bon niveau de solution de contrôle, niveau 1 ou 2, lorsque vous avez effectué le test de contrôle ? | Même si vous vous êtes trompé(e) de niveau de solution de contrôle, vous pouvez comparer le résultat de contrôle à l'intervalle imprimé sur le tube de bandelettes réactives. |
| Avez-vous toujours un doute sur l'origine du problème ? | Contactez Roche. |

4 Réglages du lecteur

Vue d'ensemble


Vous pouvez ajuster les réglages suivants dans le lecteur en fonction de vos préférences personnelles. Reportez-vous aux paragraphes du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails sur le réglage des options.

| Réglage | Options | Fonction |
|---|---|---|
| Heure/date | Heure / date | Réglez l'heure et la date. |
| Signal sonore | Activer / Désactiver | Sélectionnez Activer ou Désactiver. |
| Sans fil | Sélectionnez les réglages de communication sans fil. Reportez-vous au chapitre Communication sans fil et liaison du lecteur. | |
| Objectifs gly. (Objectifs glycémiques) | Désactiver / Obj. unique (Objectif unique) / 2 objectifs | <p>Définissez l'objectif glycémique qui vous convient.</p> <p>REMARQUE</p> <p>Votre professionnel de santé vous communiquera l'objectif glycémique adapté à votre cas.</p> <p>Désactiver – aucune flèche correspondant à l'objectif glycémique n'est affichée avec le résultat glycémique. La fonction Groupes est réglée sur Désactiver (reportez-vous au paragraphe Groupes du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails).</p> |
| | 70–180 mg/dL (objectif glycémique préréglé) 3,9–10,0 mmol/L (objectif glycémique préréglé) | Obj. unique – les résultats glycémiques sont accompagnés d'un marquage indiquant la position du résultat par rapport à l'objectif glycémique unique défini dans le lecteur (Dessus objectif, Dans objectif, Dessous objectif). |
| | Objectif glycémique Avant repas 70–110 mg/dL (objectif glycémique préréglé) 3,9–6,1 mmol/L (objectif glycémique préréglé) Objectif glycémique Après repas 70–180 mg/dL (objectif glycémique préréglé) 3,9–10,0 mmol/L (objectif glycémique préréglé) | 2 objectifs – objectifs glycémiques Avant repas et Après repas réglés. Les résultats glycémiques sont accompagnés d'un marquage Dessus objectif, Dans objectif ou Dessous objectif indiquant la position du résultat par rapport aux 2 objectifs glycémiques définis dans le lecteur (Avant repas et Après repas). |
| | | |


4 Réglages du lecteur

| Réglage | Options | Fonction |
|------------------|---------------------------------------|---|
| Groupes | Activer / Désactiver | Activer – un groupe est détecté lorsque 2 résultats glycémiques inférieurs à l'objectif glycémique ou 3 résultats glycémiques supérieurs à l'objectif glycémique associés au même marquage sont détectés au cours d'une période de 7 jours. |
| Rappels | Activer / Désactiver / Modifier heure | Activer – réglez jusqu'à 4 rappels de mesure par jour afin de vous rappeler d'effectuer une mesure. |
| Après repas | Activer / Désactiver / Modifier heure | Activer – vous rappelle d'effectuer une mesure de glycémie après le repas. |
| Dernier résultat | Activer / Désactiver | Définissez si vous souhaitez que le résultat glycémique précédent (des dernières 24 heures) s'affiche avec le résultat glycémique actuel. Activer – le résultat glycémique précédent s'affiche avec le résultat glycémique actuel. Désactiver – seul le résultat glycémique actuel s'affiche. |
| Langue | | Sélectionnez la langue du lecteur. |
| Format d'heure | 12 heures / 24 heures | Sélectionnez le format d'heure du lecteur. |

Heure/date

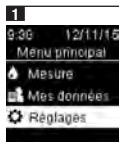

Appuyez sur la touche **OK**.

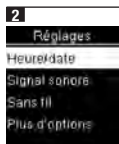

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Règlages**.

Heure/date est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**.



nécessaire.

Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.


Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour ajuster chaque champ. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage et passer au champ suivant. Réglez **am** ou **pm** si

4 Réglages du lecteur

Signal sonore


Le signal sonore prévient l'utilisateur :

- quand une bandelette réactive est insérée.
- d'appliquer le sang ou la solution de contrôle sur la bandelette réactive.
- quand une quantité suffisante de sang ou de solution de contrôle a été aspirée par la bandelette réactive.
- quand la mesure de glycémie ou le test de contrôle a été effectué.
- quand le lecteur est allumé.
- quand une touche a été enfoncée.
- qu'il est l'heure d'effectuer une mesure (si la fonction Rappels ou les rappels Après repas sont réglés sur **Activer**).
- quand les piles sont insérées.
- qu'il n'existe aucun résultat glycémique enregistré ou qu'il existe une saisie non valide dans le journal.
- qu'il n'existe aucune erreur dans le journal d'erreurs.
- en cas d'erreur (même désactivé, le signal sonore retentit pour signaler une erreur).

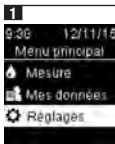


Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**.

Appuyez sur la touche **OK**.

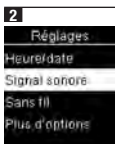

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Signal sonore**. Appuyez sur la touche **OK**.

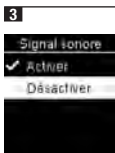

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance l'option **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

4 Réglages du lecteur

Objectifs glycémiques

Votre professionnel de santé peut vous indiquer l'intervalle glycémique qui vous convient. Il est très important de respecter les limites de votre objectif glycémique.

L'objectif glycémique peut être défini par une limite inférieure entre 60 et 100 mg/dL (3,3 et 5,5 mmol/L) à une limite supérieure entre 101 et 300 mg/dL (5,6 et 16,6 mmol/L).

| Options | Fonction |
|-------------------------------|---|
| Désactiver | Les flèches indiquant au-dessus de l'objectif glycémique, dans l'objectif glycémique ou au-dessous de l'objectif glycémique ne sont pas affichées avec les résultats glycémiques. |
| Obj. unique (Objectif unique) | Réglez la limite inférieure et supérieure de l'objectif glycémique. Le lecteur vous demande d'activer la fonction Groupes si souhaité (reportez-vous au paragraphe Groupes du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails). |
| 2 objectifs | Réglez les limites inférieure et supérieure des objectifs glycémiques Avant repas et Après repas. Vous devez marquer vos résultats glycémiques à l'aide d'un marquage afin de permettre au lecteur de détecter les résultats glycémiques Avant repas ou Après repas qui sont au-dessus de l'objectif glycémique, dans l'objectif glycémique ou au-dessous de l'objectif glycémique (reportez-vous au paragraphe Ajout de marquages à des résultats glycémiques du chapitre Mesures de glycémie pour obtenir de plus amples détails). Le lecteur vous demande d'activer la fonction Groupes si souhaité (reportez-vous au paragraphe Groupes du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails). |


Les symboles suivants s'affichent avec les résultats glycémiques lorsque la fonction Objectifs glycémiques est activée.

| Symbole | Signification |
|---------|---|
| ↓ | Le résultat glycémique est au-dessous de l'objectif glycémique. |
| ↕ | Le résultat glycémique est dans l'objectif glycémique. |
| ↑ | Le résultat glycémique est au-dessus de l'objectif glycémique. |

REMARQUE

Cette fonction ne remplace pas la formation sur l'hypoglycémie donnée par votre professionnel de santé.


1

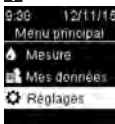

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance **Réglages**.

Appuyez sur la touche **OK**.


2

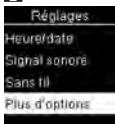

Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.


4 Réglages du lecteur

3

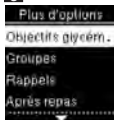

L'option **Objectifs glycém.** est mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**.

4

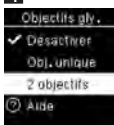

Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Désactiver**, **Obj. unique** ou **2 objectifs**.

Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner une option

(l'exemple ici est **2 objectifs**).

5




ou




Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour régler la limite inférieure de l'objectif glycémique **Avant repas**. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage et passer au champ suivant.

Réglez ensuite la limite supérieure de l'objectif glycémique **Avant repas** ainsi que les limites inférieure et supérieure de l'objectif glycémique **Après repas**. Appuyez sur la touche **OK**.

6

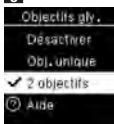

Le symbole **✓** s'affiche devant l'option sélectionnée. Appuyez sur la touche **◀** pour retourner au menu précédent.

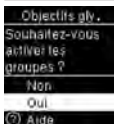

Le lecteur peut vous demander d'activer la fonction **Groupes**.

Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Oui** ou **Non**.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent (reportez-vous au paragraphe **Groupes** du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails).

REMARQUE

L'analyse de vos résultats glycémiques enregistrés dans votre lecteur vous permet ainsi qu'à votre professionnel de santé d'évaluer de manière efficace votre gestion du diabète. Cette analyse constitue un outil précieux pour améliorer votre gestion du diabète. Soyez vigilant(e) lors de l'ajout de marquages à vos résultats glycémiques. Des marquages incorrects peuvent générer la détection erronée de groupes par le lecteur si la fonction **Groupes** est réglée sur **Activer**.


Groupes

Un groupe est détecté par le lecteur lorsque 2 résultats glycémiques inférieurs à l'objectif glycémique (Groupe bas) ou 3 résultats glycémiques supérieurs à l'objectif glycémique (Groupe élevé) associés au même marquage sont détectés au cours d'une période de 7 jours.

- Le lecteur ne détecte PAS de groupe pour le marquage « autre » ajouté aux résultats glycémiques.
- Il est très important de régler l'heure et la date correctes sur le lecteur. Le réglage de l'heure et de la date correctes permet une interprétation précise des informations pour vous et votre professionnel de santé.


4 Réglages du lecteur

- Seuls les résultats glycémiques marqués à l'aide de marquages sont pris en compte par la fonction Groupes. Si les résultats glycémiques LO ou HI sont marqués à l'aide de marquages, les résultats glycémiques sont pris en compte dans les groupes (reportez-vous au chapitre Mesures de glycémie pour obtenir de plus amples détails).
- Les objectifs glycémiques doivent être réglés dans le lecteur pour pouvoir utiliser la fonction Groupes. En l'absence de réglage des objectifs glycémiques, le lecteur vous demande de régler ces derniers.

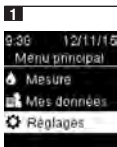


Appuyez sur la touche **OK**.


Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**.

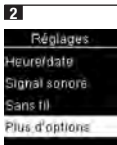


Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.

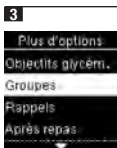

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Groupes**. Appuyez sur la touche **OK**.

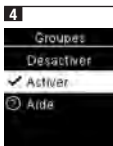


Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Activer**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option. Appuyez sur la touche **OK**.

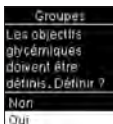

Ce message s'affiche à l'écran si les objectifs glycémiques sont réglés sur **Désactiver** :


Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Oui**. Appuyez sur la touche **OK**.

(Pour régler la fonction Groupes sur **Désactiver**, sélectionnez **Non**. Appuyez sur la touche **OK** pour retourner au menu **Groupes**.)

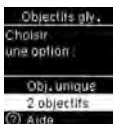

Objectifs gly. s'affiche à l'écran (reportez-vous au paragraphe Objectifs glycémiques du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails à propos du réglage des objectifs glycémiques).

Si la fonction Groupes est réglée sur **Activer** et qu'un nouveau groupe est détecté avec un résultat glycémique, un message s'affiche à l'écran.

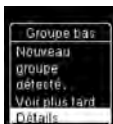

Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner **Détails** afin d'afficher les résultats glycémiques qui composent ce groupe.


OU



Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance **Voir plus tard**. Appuyez sur la touche **OK** pour retourner à l'affichage précédent.

4 Réglages du lecteur

Rappels de mesure


Vous pouvez créer jusqu'à 4 rappels de mesure généraux par jour afin de vous rappeler d'effectuer une mesure de glycémie. Une série de signaux sonores retentit et le symbole  est affiché pour indiquer l'échéance d'un rappel de mesure défini dans le lecteur.

Les rappels de mesure :



- cessent d'émettre des signaux sonores dès qu'une bandelette réactive est insérée ou que vous appuyez brièvement sur n'importe quelle touche.
- sont reportés au prochain rappel de mesure si une mesure a été effectuée dans les 15 minutes précédant un rappel de mesure.
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si le lecteur est en marche au moment du rappel de mesure (y compris si le lecteur est connecté à un câble USB).
- ne s'affichent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si le lecteur est connecté et communique avec un gestionnaire Continua.
- n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si la fonction Signal sonore du lecteur a été désactivée.
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si les piles doivent être remplacées.


Réglage de rappels de mesure

- Les heures de rappel préréglées dans le lecteur sont les suivantes : 8h00, 12h00, 18h00 et 22h00. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier les heures de rappel.
- Si un rappel de mesure général a été réglé à la même heure qu'un rappel de mesure Après repas, ce dernier apparaît/émet des signaux sonores à la place du rappel de mesure général (reportez-vous au paragraphe Rappels de mesure Après repas du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails).

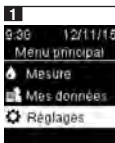


Appuyez sur la touche .

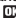Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche . À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Réglages**.

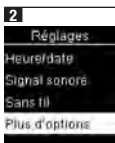

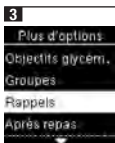

Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche .



Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **Rappels**. Appuyez sur la touche .



Les heures de rappel préréglées s'affichent à l'écran. Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance une heure de rappel. Appuyez sur la touche .

4 Réglages du lecteur

5



L'heure de rappel pré-réglée s'affiche. Appuyez sur la touche ou pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche pour afficher le

symbole devant cette option.



Pour modifier l'heure du rappel affichée :

Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Modifier heure**. Appuyez sur la touche .



Appuyez sur la touche ou pour ajuster chaque champ. Appuyez sur la touche pour passer au champ suivant. Appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

6



Une indique que le rappel de mesure a été défini pour l'heure affichée et automatiquement réglé sur **Activer**. Pour désactiver le

rappel de mesure, appuyez

sur la touche pour mettre en surbrillance l'option **Désactiver**. Appuyez sur la touche pour retourner au menu **Rappels**.

7



L'heure du rappel s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche pour continuer à régler des rappels de mesure supplémentaires ou sur la

touche pour retourner au menu **Plus d'options**.

Rappels de mesure Après repas

Les rappels de mesure Après repas peuvent être réglés pour vous rappeler de procéder ultérieurement à une nouvelle mesure lorsque vous ajoutez un marquage Avant repas à un résultat glycémique. Lors de l'émission d'un rappel de mesure, une série de signaux sonores retentit et le symbole est affiché.

Les rappels de mesure Après repas :


- cessent d'émettre des signaux sonores dès qu'une bandelette réactive est insérée ou que vous appuyez brièvement sur n'importe quelle touche.
- sont reportés au prochain rappel de mesure si une mesure a été effectuée dans les 15 minutes précédant un rappel de mesure.
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si le lecteur est en marche au moment du rappel de mesure (y compris si le lecteur est connecté à un câble USB).
- ne s'affichent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si le lecteur est connecté et communique avec un gestionnaire Continua.
- n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si la fonction Signal sonore du lecteur a été désactivée.
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si les piles doivent être remplacées.

Réglage des rappels de mesure Après repas

- L'ajout d'un marquage Avant repas à un résultat glycémique entraîne le réglage d'un rappel de mesure Après repas dans le lecteur.
- L'ajout d'un marquage Après repas à des résultats glycémiques permet d'obtenir de plus amples informations à propos de vos résultats glycémiques, ce qui vous aide et aide votre professionnel de santé à mieux gérer votre diabète.
- Consultez votre professionnel de santé pour déterminer l'heure de la mesure Après repas.


4 Réglages du lecteur

- Réglez l'échéance de rappels de mesure
Après repas sur 1 heure, 1 heure 30 ou 2 heures.

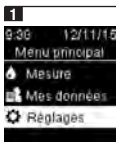


Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**.

Appuyez sur la touche **OK**.

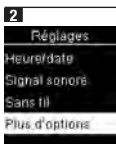


Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.

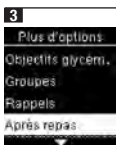

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Après repas**. Appuyez sur la touche **OK**.



Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Activer**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option.

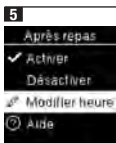

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Modifier heure**. Appuyez sur la touche **OK**.



Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **1 heure**, **1 heure 30** ou **2 heures**, ce qui correspond à la durée écoulée après un repas

avant qu'un rappel de mesure **Après repas** ne soit émis.

Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage et retourner au menu précédent.


Dernier résultat

Définissez si vous souhaitez que le résultat glycémique précédent s'affiche avec le résultat glycémique actuel. **Les résultats glycémiques remontant à plus de 24 heures ne sont pas affichés.**



Désactiver – seul le résultat glycémique actuel **1** s'affiche.


Activer – le résultat glycémique précédent **2** s'affiche avec le résultat glycémique actuel.

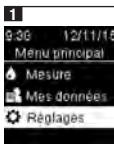

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**.

Appuyez sur la touche **OK**.


4 Réglages du lecteur

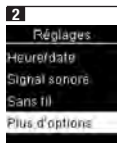

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.



Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Dernier résultat**. Appuyez sur la touche **OK**.

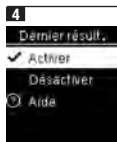


Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'option **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole ✓ devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.


Langue

Sélectionnez la langue du lecteur.

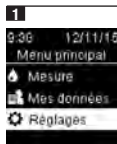


Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Réglages**.

Appuyez sur la touche **OK**.

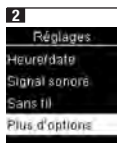

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.

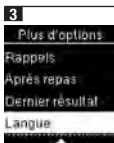

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Langue**. Appuyez sur la touche **OK**.




Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance la langue souhaitée. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole ✓ devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la langue et retourner au menu précédent.


Format d'heure

Sélectionnez le format de l'heure (12 heures ou 24 heures) du lecteur.

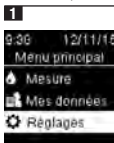

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Réglages**.


Appuyez sur la touche **OK**.

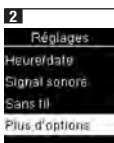

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.


4 Réglages du lecteur



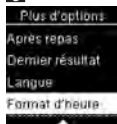

3

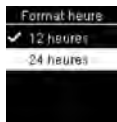

Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Format d'heure**. Appuyez sur la touche .

4



Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **12 heures** (am/pm) ou **24 heures**. Appuyez sur la touche  pour afficher le symbole  devant cette option.

Appuyez sur la touche  pour confirmer le format de l'heure et retourner au menu précédent.

5 Consultation des données

Vue d'ensemble

- Les résultats glycémiques sont enregistrés du plus récent au plus ancien.
- Le lecteur enregistre automatiquement jusqu'à 720 résultats glycémiques dans la mémoire avec l'heure et la date de la mesure ainsi que tous les éventuels marquages de résultat.
- Une fois la limite de 720 résultats glycémiques enregistrés dépassée, le résultat glycémique le plus ancien est remplacé par le résultat le plus récent.
- Seuls les résultats glycémiques affichant un marquage À jeun, Avant repas, Après repas ou Au coucher sont compris dans les moyennes du marquage correspondant.
- Tous les résultats glycémiques sont pris en compte dans le calcul des moyennes sur 7, 14, 30 et 90 jours, indépendamment du type de marquage qui y est lié.
- Les résultats de contrôle sont enregistrés dans la mémoire mais ne peuvent pas être consultés à partir du lecteur. Pour pouvoir être consultés, les résultats de contrôle enregistrés doivent être transférés vers un logiciel compatible.
- Les résultats de contrôle ne sont pas pris en compte dans le calcul des moyennes ou des rapports de glycémie.
- Une fois la limite de 32 résultats de contrôle enregistrés dépassée, le résultat de contrôle le plus ancien est remplacé par le résultat de contrôle le plus récent.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

L'utilisation d'un seul résultat glycémique dans la mémoire comme fondement pour la modification de votre traitement peut entraîner de mauvaises décisions thérapeutiques. N'apportez aucune modification à votre traitement en vous fondant sur un seul résultat glycémique dans la mémoire. Avant de modifier votre traitement


en vous fondant sur les résultats glycémiques dans la mémoire, consultez votre professionnel de santé.

REMARQUE

Le lecteur dispose d'une fonction d'auto-synchronisation de l'heure et de la date qui, en cas de liaison avec un dispositif mobile, permet de mettre automatiquement à jour l'heure et la date affichées sur le lecteur. Même en cas d'utilisation de votre lecteur dans différentes zones horaires, des résultats sont sauvegardés du plus récent au plus ancien et pas en fonction de l'heure et de la date.

Journal


1

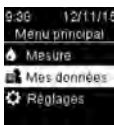

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Mes données**.

Appuyez sur la touche **OK**.

2

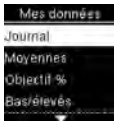

Journal est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**.

3



Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour faire défiler les valeurs de l'affichage **Journal**. Le résultat glycémique le plus récent **1**. Le deuxième résultat glycémique le plus récent **2**.

5 Consultation des données

4

Pour afficher les détails d'un résultat glycémique, appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour le mettre en surbrillance. Appuyez sur la touche OK. Les détails du résultat glycémique affichés ci-dessous apparaissent uniquement si la fonction **Objectifs gly.** est activée ou si des marquages ont été ajoutés à ce résultat glycémique.

Le résultat glycémique le plus récent



Le deuxième résultat glycémique le plus récent



Moyennes


1



Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche OK. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Mes données**.

Appuyez sur la touche OK.

2

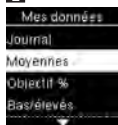

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Moyennes**. Appuyez sur la touche OK.

3



Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance une catégorie (l'exemple ici est **Tous**). Appuyez sur la touche OK.

4



Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance une période de temps (l'exemple ici est **90 jours**). Appuyez sur la touche OK.

5



ou




Appuyez sur la touche ▲ pour retourner au menu précédent si vous souhaitez consulter une autre période de temps OU appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour faire défiler les différentes moyennes.

5 Consultation des données

Pourcentage (%) objectif


La fonction Objectif % vous permet de consulter le pourcentage de résultats glycémiques appartenant aux catégories Tous, Avant repas, Après repas, À jeun et Au coucher qui sont considérés comme au-dessus de, dans ou au-dessous de vos objectifs glycémiques.

- Les résultats Objectif % peuvent être affichés pendant une période de 7, 14, 30 ou 90 jours.
- Les objectifs glycémiques doivent être réglés dans le lecteur pour permettre la consultation des résultats Objectif %.

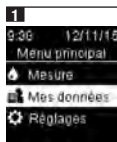


Appuyez sur la touche **OK**.

1 Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Mes données**.

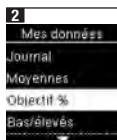

2 Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Objectif %**. Appuyez sur la touche **OK**.

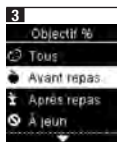

3 Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance une catégorie (l'exemple ici est **Avant repas**). Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner l'option.



4 Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance une période de temps (l'exemple ici est **90 jours**). Appuyez sur la touche **OK**.

A screenshot of the 'Objectif %' screen. It shows a table with two columns: the category and the percentage. The data is for 'Avant repas' over a 90-day period.

| Objectif % | |
|---------------|-----|
| ● Avant repas | |
| 90 jours | |
| ↑ Dessus | 15% |
| → Dans | 60% |
| ↓ Dessous | 25% |
| Mesures | 720 |

Objectif % s'affiche à l'écran (pour l'exemple **Avant repas**). Le nombre de l'ensemble des mesures comprises dans Objectif % s'affiche au bas de l'écran.

Appuyez sur la touche **↶** pour retourner au menu précédent.

REMARQUE

L'analyse de vos résultats glycémiques enregistrés dans votre lecteur vous permet ainsi qu'à votre professionnel de santé d'évaluer de manière efficace votre gestion du diabète. Cette analyse constitue un outil précieux pour améliorer votre gestion du diabète. Soyez vigilant(e) lors de l'ajout de marquages à vos résultats glycémiques. Des marquages incorrects peuvent générer la détection erronée de groupes par le lecteur si la fonction Groupes est réglée sur **Activer**.






5 Consultation des données

Résultats bas/élevés

Votre professionnel de santé peut vous indiquer l'intervalle glycémique qui vous convient. Il est très important de respecter les limites de votre objectif glycémique.

- Les objectifs glycémiques doivent être réglés dans le lecteur afin de pouvoir permettre un suivi des résultats glycémiques classés comme bas/élevés (reportez-vous au paragraphe Objectifs glycémiques du chapitre Réglages du lecteur pour obtenir de plus amples détails).
- Les résultats bas ou élevés comprennent uniquement des résultats glycémiques inférieurs ou supérieurs aux objectifs glycémiques définis dans le lecteur.
- Les résultats bas ou élevés font l'objet d'un suivi sur 30 jours dans le lecteur.

Vous pouvez sélectionner des résultats bas et élevés pour les catégories suivantes des résultats glycémiques : Tous, Avant repas, Après repas, À jeun ou Au coucher.

| Symbole | Nom | Description |
|--|-------------|---|
|  | Tous | Comprend les résultats glycémiques bas et élevés en fonction des objectifs glycémiques réglés dans votre lecteur. |
|  | Avant repas | Vous pouvez afficher des résultats glycémiques bas ou élevés associés à un marquage Avant repas pour les catégories suivantes des résultats glycémiques : Tous, Avant petit-déjeuner, Avant déjeuner, Avant dîner et Avant en-cas.* |
|  | Après repas | Vous pouvez afficher des résultats glycémiques bas ou élevés associés à un marquage Après repas pour les catégories suivantes des résultats glycémiques : Tous, Après petit-déjeuner, Après déjeuner, Après dîner et Après en-cas.* |
|  | À jeun | Comprend les résultats glycémiques bas ou élevés obtenus à jeun et associés au marquage À jeun. |
|  | Au coucher | Comprend les résultats glycémiques bas ou élevés obtenus au coucher et associés au marquage Au coucher. |

*Les résultats glycémiques classés comme avant ou après des repas spécifiques sont uniquement disponibles si la fonction Groupes est réglée sur **Activer**.

1



Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Mes données**.

Appuyez sur la touche **OK**.

2



Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Bas/élevés**. Appuyez sur la touche **OK**.

5 Consultation des données


3



Si la fonction **Objectifs glycémiques** est activée : Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Résultats bas** ou **Résult. élevés** (l'exemple ici est **Résult.**

élevés). Appuyez sur la touche **OK**.

ou

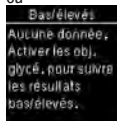


Si la fonction **Objectifs glycémiques** n'a **PAS** été activée dans les **30 derniers jours** :

Ce message s'affiche sur le lecteur (reportez-vous au

paragraphe **Objectifs glycémiques** du chapitre **Réglages** du lecteur pour obtenir de plus amples détails à propos de l'activation de la fonction **Objectifs glycémiques**).

4

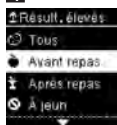

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance une catégorie (l'exemple ici est **Avant repas**). Appuyez sur la touche **OK**.



Si les **résultats glycémiques** associés à des **marquages détaillés relatifs aux repas** sont enregistrés dans le **journal** :

Le lecteur peut vous demander de sélectionner des catégories détaillées à afficher. Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance une catégorie (l'exemple ici est **Petit-déjeuner**). Appuyez sur la touche **OK**.

5



ou



Les données sélectionnées s'affichent (l'exemple ici est **Résult. élevés**). Appuyez sur la touche ▼ pour faire défiler les résultats glycémiques.

Appuyez sur la touche ◀ pour retourner au menu précédent.

REMARQUE

L'analyse de vos résultats glycémiques enregistrés dans votre lecteur vous permet ainsi qu'à votre professionnel de santé d'évaluer de manière efficace votre gestion du diabète. Cette analyse constitue un outil précieux pour améliorer votre gestion du diabète. Soyez vigilant(e) lors de l'ajout de marquages à vos résultats glycémiques. Des marquages incorrects peuvent générer la détection erronée de groupes par le lecteur si la fonction **Groupes** est réglée sur **Activer**.

5 Consultation des données

Groupes


- La fonction Groupes affiche uniquement les groupes bas ou groupes élevés actifs en fonction des marquages ajoutés aux résultats glycémiques dans les 7 derniers jours.
- Un groupe est généré lorsque 2 résultats glycémiques inférieurs à l'objectif glycémique ou 3 résultats glycémiques supérieurs à l'objectif glycémique associés au même marquage sont détectés au cours d'une période de 7 jours.

Les groupes peuvent être consultés sur le lecteur de 3 manières différentes :



si une option de la fonction Groupes est affichée au bas du **Menu principal**.

ou

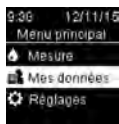

à partir de **Mes données** dans le **Menu principal**.

ou




si le message **Nouveau groupe détecté** s'affiche à l'écran lors de la réalisation d'une mesure de glycémie.


Les groupes détectés par le lecteur peuvent être affichés dans le Menu principal de la manière suivante :

| | | |
|--------------------|---|--|
| Groupes | Des groupes élevés et bas ont été détectés | Les groupes peuvent comprendre les résultats glycémiques suivants marqués à l'aide des marquages : Avant petit-déjeuner, Après petit-déjeuner, Avant déjeuner, Après déjeuner, Avant dîner, Après dîner, Avant en-cas, Après en-cas, À jeun ou Au coucher (reportez-vous au paragraphe Ajout de marquages à des résultats glycémiques du chapitre Mesures de glycémie). |
| Groupe(s) élevé(s) | Un ou plusieurs groupe(s) élevé(s) a/ont été détecté(s) | |
| Groupe(s) bas | Un ou plusieurs groupe(s) bas a/ont été détecté(s) | |
| Aucun groupe | Aucun groupe actif sur la base des résultats glycémiques des 7 derniers jours | |
| Vide | La fonction Groupes est réglée sur Désactiver | |


5 Consultation des données

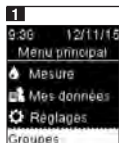

1 Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance l'option de la fonction **Groupes** au bas de l'affichage (l'exemple ici est **Groupes**). Appuyez sur la touche **OK**.

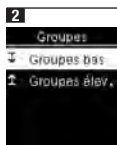

2 Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Groupes bas** ou **Groupes élev.** (l'exemple ici est **Groupes bas**). Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner l'option.

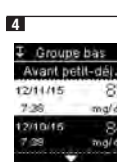


ou




Appuyez sur la touche **▼** pour faire défiler les résultats glycémiques. Appuyez sur la touche **↶** pour retourner au menu précédent.

Transfert de données sans fil

Cette fonction vous permet de transférer des données sans fil à partir de votre lecteur vers un autre dispositif.

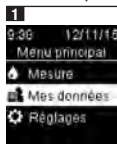

1 Appuyez sur la touche **OK**.

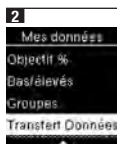

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Mes données**.


2 Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Transfert Données**. Appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.

5 Consultation des données

4

Si un dispositif n'a pas été lié à votre lecteur :

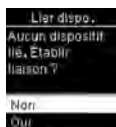



Le lecteur vous demande de lier un dispositif au lecteur (reportez-vous au paragraphe Première liaison du chapitre Communication sans fil et liaison du lecteur pour obtenir de plus amples détails).

ou

Si le lecteur a déjà été lié à au moins un dispositif :



Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un dispositif sans fil destiné au transfert de données.

5




Le lecteur transfère les données vers le dispositif.

Transfert de données à l'aide d'un câble USB

Cette fonction vous permet de transférer des données de votre lecteur vers un logiciel spécifique destiné à la gestion du diabète sur un PC à l'aide d'un câble USB.


Utilisez uniquement un câble USB pour connecter le dispositif à un ordinateur sûr et de confiance. Vous pouvez ainsi réduire le risque de transférer un logiciel malveillant sur votre dispositif.

1

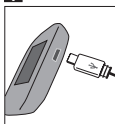

Connectez la petite extrémité du câble USB au lecteur.

2

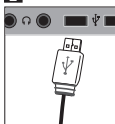

Connectez l'extrémité plus large du câble USB au port USB du PC.

Si le lecteur était éteint, il s'allume.

3

Lancez le logiciel de gestion du diabète et démarrez un transfert de données.

4



Le lecteur transfère les données vers le logiciel.

6 Communication sans fil et liaison du lecteur

Vue d'ensemble

Vous pouvez synchroniser vos données de diabète avec un dispositif mobile de manière automatique via une connexion sans fil. La procédure de création d'une connexion entre un lecteur et un autre dispositif est ce qu'on appelle une liaison. Vous devez disposer d'une application sur votre dispositif mobile qui prenne en charge les données du lecteur.

Ne liez le dispositif que dans un environnement sûr et de confiance. Vous pouvez ainsi réduire le risque que d'autres personnes ne se connectent à votre dispositif.

| Réglage | Options | Fonction |
|---|--|---|
| Mode avion | Activer / Désactiver | Définissez la disponibilité de la communication sans fil. Activer – la communication sans fil n'est pas disponible. Désactiver – la communication sans fil est disponible. |
| Dispo. par défaut (Dispositif par défaut) | Liste des dispositifs liés au lecteur | S'il existe plus d'un dispositif lié, sélectionnez le dispositif avec lequel les fonctions Envoi automatique et Synchronisation de l'heure communiqueront. |
| Envoi auto. (Envoi automatique) | Activer / Désactiver | Définissez si les données sont automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut après chaque mesure. Activer – les données sont automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut. Désactiver – les données ne sont pas automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut. |
| Synchro. heure (Synchronisation de l'heure) | Activer / Désactiver | Définissez si une synchronisation de l'heure et de la date avec le dispositif lié par défaut doit avoir lieu. Activer – l'heure et la date affichées sur le lecteur sont synchronisées avec l'heure et la date du dispositif lié par défaut. Désactiver – l'heure et la date affichées sur le lecteur ne sont pas synchronisées avec l'heure et la date du dispositif lié par défaut. |
| Liaison | Lier dispositif / Suppr. liaison (Supprimer liaison) | Définissez si vous souhaitez lier un dispositif ou supprimer un dispositif lié. |

6 Communication sans fil et liaison du lecteur

Première liaison

Les étapes ci-dessous s'appliquent à la première liaison.

Jusqu'à 5 dispositifs peuvent être simultanément liés au lecteur.


Chaque dispositif doit être lié au lecteur séparément.

Le lecteur et le dispositif à lier doivent se trouver à moins de 1 mètre l'un de l'autre.

1

Préparez le dispositif à la liaison. Reportez-vous aux instructions du dispositif pour savoir comment procéder à sa liaison.


2

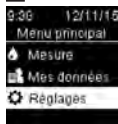

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**.


Appuyez sur la touche **OK**.

3

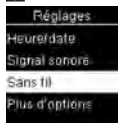


Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.

4

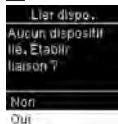

Lier dispo. s'affiche à l'écran. Pour lier un dispositif, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Oui**. Appuyez sur la touche **OK**.

5

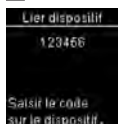

Le lecteur affiche son code.

6

Le dispositif mobile affiche une liste des dispositifs détectés, y compris le lecteur. Sélectionnez le lecteur dans la liste. Saisissez le code du lecteur de l'étape 5 sur le dispositif à lier lorsque celui-ci vous le demande.

7




Une fois la liaison terminée, le symbole **✓** et le nom du dispositif lié s'affichent à l'écran du lecteur.

Appuyez sur la touche **OK** pour retourner au menu précédent.

Mode avion

Définissez la disponibilité ou l'indisponibilité de la communication sans fil. Lorsque le **Mode avion** est activé, le symbole **✈** s'affiche dans la barre de titre et la communication sans fil est impossible.


1

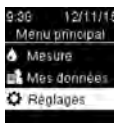

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**.


Appuyez sur la touche **OK**.

2

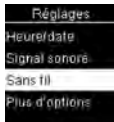

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.


3

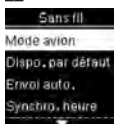

Mode avion est mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**.


6 Communication sans fil et liaison du lecteur

4

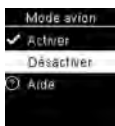

Appuyez sur la touche ou pour mettre en surbrillance l'option **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche pour afficher le symbole devant cette option.

Appuyez sur la touche pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

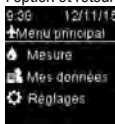


Menu principal avec lecteur en mode avion.

Dispositif par défaut

Si plus d'un dispositif est lié, sélectionnez le dispositif lié par défaut pour les fonctions **Envoi automatique** et **Synchronisation de l'heure**.


1

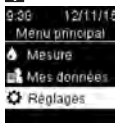

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche . À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Réglages**.


Appuyez sur la touche .

2

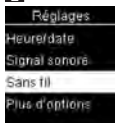

Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche .

3

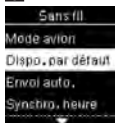

Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Dispo. par défaut**. Appuyez sur la touche .

4



Une liste des dispositifs liés s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance le dispositif que vous souhaitez sélectionner

comme dispositif par défaut.


Appuyez sur la touche pour afficher le symbole devant cette option.

Appuyez sur la touche pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

Envoi automatique

Définissez si les données sont automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut après chaque mesure.


1

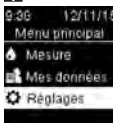

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche . À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Réglages**.


Appuyez sur la touche .

2

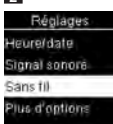

Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche .


3

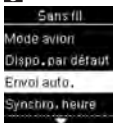

Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Envoi auto.**. Appuyez sur la touche .

6 Communication sans fil et liaison du lecteur

4

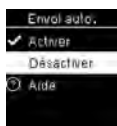


Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'option **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole ✓ devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

Synchro. heure (Synchronisation de l'heure)

Définissez si une synchronisation de l'heure et de la date avec le dispositif lié par défaut doit avoir lieu.


1

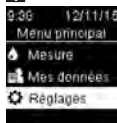

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Réglages**.


Appuyez sur la touche **OK**.

2

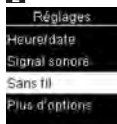


Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

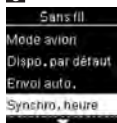

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Synchro. heure**. Appuyez sur la touche **OK**.

4

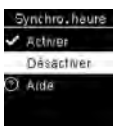

Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'option **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole ✓ devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

Liaison de dispositifs supplémentaires


Cette procédure permet d'ajouter un autre dispositif lié (ce qui suppose qu'il existe au moins 1 dispositif lié).

Vous pouvez lier jusqu'à 5 dispositifs.

Si 5 dispositifs sont déjà liés, vous devez supprimer une de ces liaisons avant de pouvoir ajouter un autre dispositif.

Tout dispositif sélectionné deviendra l'option par défaut jusqu'au prochain changement.


1

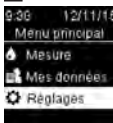

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Réglages**.


Appuyez sur la touche **OK**.

2

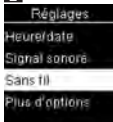

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

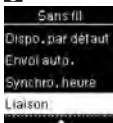

Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Liaison**. Appuyez sur la touche **OK**.

6 Communication sans fil et liaison du lecteur

4




Appuyez sur la touche ou pour mettre en surbrillance **Lier dispositif**. Appuyez sur la touche .

S'il existe moins de 5 dispositifs liés :

Lier dispositif s'affiche à l'écran. Passez à l'étape 5.

Lier dispositif

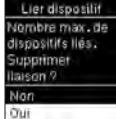


S'il existe déjà 5 dispositifs liés :

Le message **Nombre max. de dispositifs liés** s'affiche à l'écran. Vous devez supprimer un dispositif lié avant de pouvoir passer à l'étape 5.

Appuyez sur la touche ou pour mettre en surbrillance **Oui**. Appuyez sur la touche .

Suppr. liaison




Appuyez sur la touche ou pour mettre en surbrillance le dispositif à supprimer. Appuyez sur la touche . Passez à l'étape 5.

5

Préparez l'autre dispositif à la liaison. Reportez-vous aux instructions de l'autre dispositif pour savoir comment procéder à sa liaison.

6

Le lecteur affiche son code.

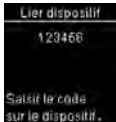

Saisir le code sur le dispositif.

7

Le dispositif mobile affiche une liste des dispositifs détectés, y compris le lecteur. Sélectionnez le lecteur dans la liste. Saisissez le code du lecteur de l'étape 6 sur le dispositif à lier lorsque celui-ci vous le demande.


8

Une fois la liaison terminée, le symbole et le nom du dispositif lié s'affichent à l'écran du lecteur. Appuyez sur la touche .



9

Lier dispositif

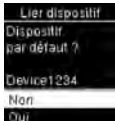

S'il existe plus d'un dispositif lié, vous devrez choisir si vous souhaitez définir le nouveau dispositif comme dispositif par défaut. Appuyez sur la touche ou pour mettre en surbrillance l'option **Non** ou **Oui**. Appuyez sur la touche pour confirmer l'option et retourner à **Liaison**. Appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.


Suppression d'une liaison

Cette procédure permet de supprimer un dispositif lié (ce qui suppose qu'il existe au moins 1 dispositif lié).

Vous pouvez lier jusqu'à 5 dispositifs. Si 5 dispositifs sont déjà liés, vous devez supprimer une de ces liaisons avant de pouvoir lier un autre dispositif.

Tout dispositif sélectionné deviendra l'option par défaut jusqu'au prochain changement.


1

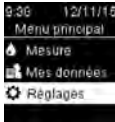


Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche . À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche .


6 Communication sans fil et liaison du lecteur

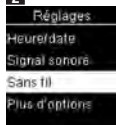

2




Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche .

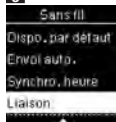

3



Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Liaison**. Appuyez sur la touche .

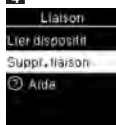


4



Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **Suppr. liaison**. Appuyez sur la touche .

5




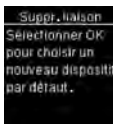
Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance le dispositif à supprimer. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.

6



Si le dispositif sélectionné n'est pas le dispositif par défaut :



La liaison est supprimée. Le nom de dispositif supprimé et le symbole  s'affichent à l'écran.



Si le dispositif sélectionné est le dispositif par défaut :

Le lecteur vous demande de sélectionner un nouveau dispositif par défaut. S'il ne reste plus qu'un seul dispositif, celui-ci deviendra le dispositif par défaut. La liste des dispositifs liés s'affiche à l'écran.



Mettez en surbrillance le nouveau dispositif par défaut et appuyez sur la touche . Le symbole  et le nom du dispositif supprimé s'affichent à l'écran du lecteur avec le nouveau dispositif par défaut.

7 Entretien et dépannage du lecteur

Entretien du lecteur

Le lecteur procède automatiquement à un autodiagnostic à chaque mise sous tension et vous avertit de tout problème. Reportez-vous au paragraphe Messages d'erreur du présent chapitre.

Si vous laissez tomber le lecteur ou si vous doutez de l'exactitude des résultats, contactez Roche.


AVERTISSEMENT

Risque de lésions mortelles

Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Reportez-vous à l'avertissement contenu dans l'introduction de ce manuel d'utilisation pour obtenir de plus amples informations.


Remplacement des piles


1

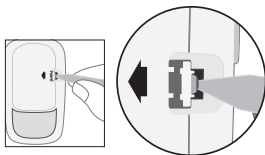


Ouvrez le couvercle du compartiment des piles avec sécurité enfants en insérant un objet fin, tel qu'un stylo, dans la fente (voir image ci-dessus). Appuyez sur l'onglet dans le sens de la flèche et soulevez le couvercle du compartiment des piles.


2

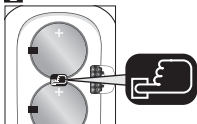

Relâchez les piles usagées en appuyant sur le bouton . Retirez les piles usagées. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK sur la face avant du lecteur et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.

3

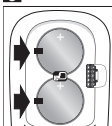

Faites glisser les nouvelles piles sous les languettes noires et le bouton  en veillant à ce que la **face positive (+) soit dirigée vers le haut**. Remettez le

couvercle du compartiment des piles en place et emboîtez-le. Éliminez immédiatement les anciennes piles.

REMARQUE

- Ayez toujours des piles de rechange en réserve.
- La durée de vie des piles peut varier en raison de facteurs tels que la température et le fabricant.
- Le lecteur utilise deux piles au lithium de 3 volts, de type pile bouton CR2032. Ce type de pile se trouve facilement en magasin.
- Veillez à toujours remplacer les deux piles en même temps et à utiliser une seule et même marque.
- Les données du journal sont enregistrées pendant le remplacement des piles.

Nettoyage et désinfection du lecteur

Protégez le lecteur de la poussière. S'il s'avère nécessaire de le nettoyer ou de le désinfecter, suivez attentivement les consignes qui suivent, afin d'obtenir le meilleur résultat possible.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection

En cas d'utilisation du lecteur par une autre personne assistant l'utilisateur, le lecteur doit être désinfecté préalablement à l'utilisation par l'autre personne.

7 Entretien et dépannage du lecteur

AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

- Ne pas nettoyer ni désinfecter le lecteur au cours de la réalisation d'une mesure de glycémie ou d'un test de contrôle.
- Ne pas faire pénétrer le moindre liquide dans aucune ouverture du lecteur.
- Ne rien vaporiser directement sur le lecteur.
- Ne pas immerger le lecteur dans un liquide.

Échéance de nettoyage ou de désinfection du lecteur :

- Nettoyez le lecteur pour en éliminer les souillures ou tous autres résidus visibles.
- Désinfectez le lecteur entre chaque usage sur un patient.

Ce qu'il faut nettoyer ou désinfecter :

- La zone environnant les fentes et les orifices
- L'écran du lecteur
- L'ensemble de la surface du lecteur

Roche a démontré que le produit est utilisable pour un total de 2 920 cycles de désinfection.

1

Assurez-vous que le lecteur est éteint.

Nettoyez l'extérieur du lecteur délicatement à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé de l'une des solutions suivantes (retirez tout excès de liquide) :

Nettoyage du lecteur

Mélange de liquide vaisselle doux et d'eau

Désinfection du lecteur

Alcool isopropylique à 70 %

Remarque : Au cours de la désinfection, veillez à ce que la surface du lecteur reste humide pendant 2 minutes après avoir été nettoyée à l'alcool isopropylique. Un nettoyage supplémentaire de la surface à l'aide de chiffons imbibés d'alcool isopropylique peut s'avérer nécessaire.

2

Séchez soigneusement le lecteur à l'aide d'un chiffon doux.

Messages d'erreur

AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

L'utilisation d'un message d'erreur comme fondement pour la modification de votre traitement peut entraîner de mauvaises décisions thérapeutiques.

- Ne prenez jamais de décisions thérapeutiques en vous fondant sur un message d'erreur.
- Si vous avez des questions ou constatez l'affichage de tout autre message d'erreur, contactez Roche.



Le lecteur ne s'allume pas ou l'écran reste vide.

- Les piles sont à plat.

Insérez de nouvelles piles.


- L'écran est défectueux. / Le lecteur est défectueux.

Contactez Roche.

- Températures excessives.

Déplacez le lecteur dans un endroit à température plus modérée.

7 Entretien et dépannage du lecteur

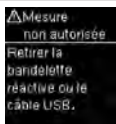


Le lecteur est connecté à un PC et aucune mesure de glycémie ni aucun test de contrôle ne peut avoir lieu.

Déconnectez le câble USB et effectuez une mesure de glycémie ou un test de contrôle OU retirez la bandelette réactive et lancez un transfert de données.




La connexion entre le lecteur et le PC a été interrompue.

Déconnectez et reconnectez le câble USB, puis réessayez la connexion. Si la connexion est à nouveau interrompue, contactez Roche.

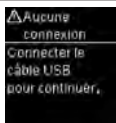


Il n'existe aucune connexion entre le lecteur et le PC.

Connectez le câble USB et réessayez la connexion.

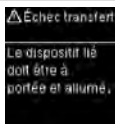


Les résultats glycémiques n'ont pas été transmis au dispositif lié.

Assurez-vous que le dispositif lié est à portée du lecteur et qu'il est allumé.

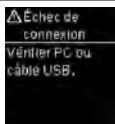


Les données n'ont pas pu être transmises du lecteur au PC.

Vérifiez le PC ou le câble USB.

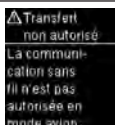


Les données ne peuvent pas être transmises au dispositif lié car le lecteur est en Mode avion.

Tentez à nouveau de transférer des données lorsque le lecteur n'est plus en Mode avion.

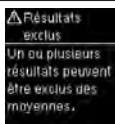


Un ou plusieurs résultats glycémiques sont exclus des moyennes sélectionnées car ils ne sont pas valides ou dépassent l'intervalle de mesure du système.


7 Entretien et dépannage du lecteur

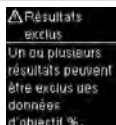


Un ou plusieurs résultats glycémiques sont exclus des données Objectif % sélectionnées car ils ne sont pas valides.

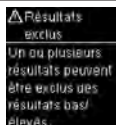


Un ou plusieurs résultats glycémiques sont exclus des résultats Bas/élevés sélectionnés car ils ne sont pas valides.

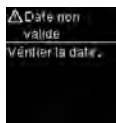

La date saisie n'est pas valide.
Saisissez une date correcte.

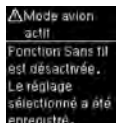


Un des réglages du lecteur a été modifié pendant que celui-ci était en Mode avion. La modification du réglage ne prendra effet que lorsque le Mode avion sera désactivé.

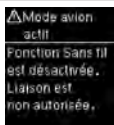

Toute liaison au dispositif est impossible en Mode avion.

Tentez à nouveau de lier le dispositif lorsque le lecteur n'est plus en Mode avion.

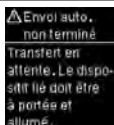


Le résultat glycémique n'a pas été envoyé au dispositif lié par défaut. Le transfert est toujours en attente.

Placez le lecteur et le dispositif lié près l'un de l'autre.




La liaison du lecteur à un dispositif a échoué. Tentez à nouveau de procéder à la liaison.

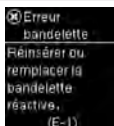

La bandelette réactive pourrait être endommagée, mal insérée ou a déjà été utilisée.

Retirez la bandelette réactive et réinsérez-la ou remplacez-la si elle est endommagée ou a déjà été utilisée.

7 Entretien et dépannage du lecteur

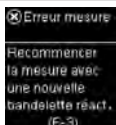


Une erreur est survenue au niveau du lecteur ou de la bandelette réactive.

Ce message d'erreur est susceptible d'apparaître si le bouchon du tube de bandelettes réactives n'a pas été correctement refermé. Les bandelettes réactives pourraient être endommagées à cause d'une conservation ou utilisation incorrecte.

Ne prenez jamais de décisions thérapeutiques en vous fondant sur un message d'erreur.


Recommencez la mesure de glycémie. En cas d'affichage d'un deuxième message d'erreur E-3, réalisez un test de contrôle avec la solution de contrôle et une nouvelle bandelette réactive. Reportez-vous au paragraphe Réalisation d'un test de contrôle du chapitre Tests de contrôle. Si vous continuez de recevoir un message d'erreur E-3, utilisez une méthode alternative de mesure de votre glycémie, telle qu'un lecteur et des bandelettes réactives auxiliaires. Si la méthode alternative fournit un résultat glycémique extrêmement élevé ou en l'absence d'une méthode alternative disponible, **contactez votre professionnel de santé dans les plus brefs délais.**

Dans de rares cas, le message d'erreur E-3 peut indiquer que votre glycémie est extrêmement élevée et au-dessus de l'intervalle de mesure du système. **Reportez-vous au paragraphe Résultats glycémiques inhabituels du chapitre Mesures de glycémie pour connaître d'autres causes possibles du message d'erreur.**

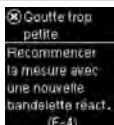


La bandelette réactive n'a pas aspiré suffisamment de sang ou de solution de contrôle pour que la mesure de glycémie ou le test de contrôle soit possible, ou bien l'aspiration suffisante de sang ou de solution de contrôle s'est produite après le démarrage de la mesure de glycémie ou du test de contrôle.

Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

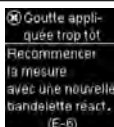

L'aspiration du sang ou de la solution de contrôle par la bandelette réactive a été effectuée avant que ne s'affiche **Appliquer goutte** à l'écran.


Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

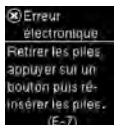

Une erreur électronique s'est produite.

Retirez les piles, appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes, puis réinsérez les piles. Effectuez une mesure de glycémie ou un test de contrôle.

7 Entretien et dépannage du lecteur

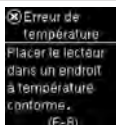


La température est supérieure ou inférieure aux températures préconisées pour l'utilisation du système.

Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour connaître les conditions de fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la température est conforme à l'intervalle de température préconisé et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du lecteur.




Il se peut que les piles soient à plat. Rallumez le lecteur. **Si vous vous trouvez dans un endroit frais, déplacez-vous dans un endroit à température modérée et renouvelez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.** Si le message s'affiche toujours après plusieurs tentatives, remplacez les piles. Si le message s'affiche de nouveau après le remplacement des piles, retirez les piles, appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes, puis réinsérez les piles.

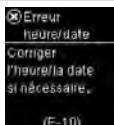


Il est possible que les réglages de l'heure et de la date soient erronés.

Assurez-vous que l'heure et la date sont correctes et corrigez si nécessaire.

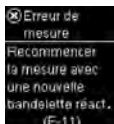

La bandelette réactive pourrait être endommagée.


Recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle avec une nouvelle bandelette réactive.

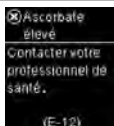

Votre échantillon de sang pourrait contenir un taux élevé d'ascorbate.

Contactez votre professionnel de santé.

7 Entretien et dépannage du lecteur

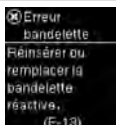


La fente d'insertion de la bandelette réactive pourrait contenir des fluides ou des matières étrangères.


Retirez et réinsérez la bandelette réactive ou recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle à l'aide d'une nouvelle bandelette réactive. Si l'erreur persiste, contactez Roche.




Une erreur électronique s'est produite. Contactez Roche.

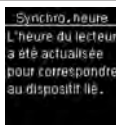


L'heure et la date du lecteur ont été changées pour correspondre à celles du dispositif lié.

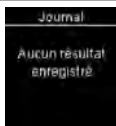



Il n'existe aucun résultat dans le journal.

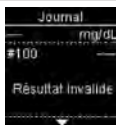


OU

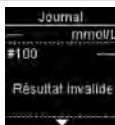


Le journal comprend un résultat non valide.

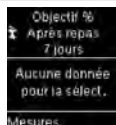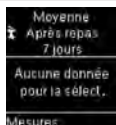

Il n'existe aucun résultat glycémique correspondant aux critères définis pour les données sélectionnées.


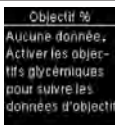


La fonction Objectifs glycémiques est réglée sur **Désactiver** et aucun résultat correspondant aux données Objectif % n'est enregistré dans le lecteur.

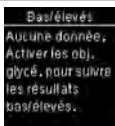


La fonction Objectifs glycémiques est réglée sur **Désactiver** et aucun résultat correspondant aux résultats Bas/élevés n'est enregistré dans le lecteur.



7 Entretien et dépannage du lecteur

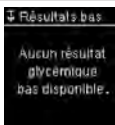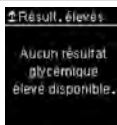


Il n'existe aucun résultat enregistré dans le lecteur pour les données sélectionnées.

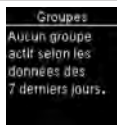

La fonction Groupes est réglée sur **Activer** mais il n'existe aucun groupe actif enregistré dans le lecteur.

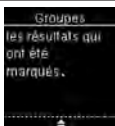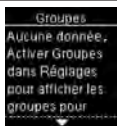


La fonction Groupes est réglée sur **Désactiver**.

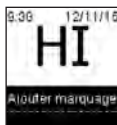

La glycémie peut être au-dessus de l'intervalle de mesure du système.

Reportez-vous au paragraphe Résultats glycémiques inhabituels du chapitre Mesures de glycémie.

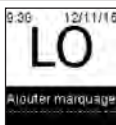

La glycémie peut être au-dessous de l'intervalle de mesure du système.

Reportez-vous au paragraphe Résultats glycémiques inhabituels du chapitre Mesures de glycémie.



Les piles sont presque à plat.

Remplacez les piles maintenant. Si le symbole s'affiche de nouveau après le remplacement des piles, retirez les piles, appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes, puis réinsérez les piles.

8 Informations techniques

Limitations du produit

Les caractéristiques techniques et les limitations du produit les plus récentes sont fournies dans la notice d'utilisation des bandelettes réactives et des solutions de contrôle.

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Volume de sang nécessaire Type d'échantillon Durée de mesure Intervalle de mesure Conditions de stockage des bandelettes réactives Conditions de fonctionnement du système | Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives. |
| Conditions de stockage du lecteur | Température : entre -25 et 70 °C |
| Capacité de la mémoire | 720 résultats glycémiques et 32 résultats de contrôle avec l'heure et la date |
| Arrêt automatique | 90 secondes |
| Alimentation | Deux piles au lithium de 3 volts (type pile bouton CR2032) |
| Écran | Écran à cristaux liquides |
| Dimensions | 80 × 47 × 20 mm (longueur × largeur × hauteur) |
| Poids | Environ 48 g (avec piles) |
| Construction | Portatif |
| Classe de protection | III |
| Type de lecteur | Le lecteur Accu-Chek Guide convient pour un fonctionnement en continu. |
| Conditions de stockage des solutions de contrôle | Reportez-vous à la notice d'utilisation de la solution de contrôle. |
| Interfaces | USB : connecteur micro-B ; technologie <i>Bluetooth®</i> Low Energy ; dispositif Continua à un gestionnaire Continua. |
| Connectivité par radiofréquence | Technologie Bluetooth Low Energy fonctionnant à la bande de fréquence de 2,402 GHz à 2,480 GHz avec une puissance transmise maximale de 0 dBm (1 mW). |

8 Informations techniques

Compatibilité électromagnétique – Ce lecteur répond aux exigences en matière d'émissions électromagnétiques et à l'immunité conformément à la norme EN 61326-2-6. Ses émissions électromagnétiques sont donc faibles. Il n'y a pas lieu de s'attendre à des interférences qui auraient des répercussions sur d'autres équipements électriques. En cas de suspicion de perturbation des performances par des interférences électromagnétiques, il convient de restaurer un fonctionnement correct en augmentant la distance entre l'équipement et la source d'interférence. L'environnement électromagnétique doit être évalué avant la mise en marche du dispositif.

Analyse des performances – Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives.

Principe de mesure – Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives.

Déclaration de conformité – Roche déclare que l'équipement radioélectrique du type lecteur de glycémie Accu-Chek Guide est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://declarations.accu-chek.com>

Protocole de communication – Le lecteur de glycémie Accu-Chek Guide est conforme aux normes applicables IEEE 11073-10417, et a été testé en accord avec les directives de conception Continua 2014 qui comprennent la spécification relative à la glycémie pour la technologie Bluetooth Low Energy, *Bluetooth SIG, Glucose Profile, Version 1.0* et *Bluetooth SIG, Glucose Service, Version 1.0*.

Renseignements sur la sécurité du produit

REMARQUE

- De puissants champs électromagnétiques sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du lecteur. Dans ces conditions, n'utilisez pas le lecteur à proximité de sources électromagnétiques de forte intensité.

- Pour éviter toute décharge électrostatique, assurez-vous de ne pas utiliser le lecteur dans un endroit où l'atmosphère est très sèche, notamment en présence de matériaux synthétiques.

Élimination du lecteur

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'infection

Lors de la mesure de glycémie, le lecteur peut être en contact avec du sang. Les lecteurs utilisés constituent par conséquent une source potentielle d'infection.

Avant l'élimination du lecteur, retirez la pile ou les piles.

Dans ces conditions, éliminez le lecteur usagé conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays. L'administration municipale vous indiquera la marche à suivre pour éliminer le lecteur.

Le lecteur ne tombe pas dans le champ d'application de la Directive Européenne 2012/19/UE (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).

Éliminez les piles usagées conformément à la réglementation locale en vigueur en matière d'environnement.



Le présent produit comprend des constituants internes qui contiennent des substances extrêmement préoccupantes (SVHC), en l'espèce du 1,2-diméthoxyéthane (CAS 110-71-4), de l'hexabromocyclododécane (CAS 25637-99-4), du titanate de plomb (CAS 12060-00-3) et/ou du titano-zirconate de plomb (CAS 12626-81-2) à une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse, telles qu'identifiées aux termes du règlement REACH et ajoutées à la liste des candidats en vue d'une autorisation.

Aucune exposition directe aux substances n'a lieu et aucun risque n'est donc encouru en cas d'utilisation de l'instrument conformément aux instructions d'utilisation.

8 Informations techniques

Explication des symboles

Les symboles figurant sur la boîte, sur la plaque d'identification et dans les instructions d'utilisation du lecteur Accu-Chek Guide sont présentés ci-dessous avec leur signification.

| | |
|---|---|
|  | Consulter les instructions d'utilisation ou consulter les instructions d'utilisation en format électronique |
|  | Suivre les instructions d'utilisation (symbole bleu) |
|  | Attention, se référer aux consignes de sécurité figurant dans les instructions d'utilisation du produit. |
|  | Limite de température |
|  | Limite d'humidité de l'air |
|  | Date de péremption La date de péremption indiquée sur le kit de lecteur de glycémie correspond à la date d'expiration la plus proche des composants du kit, qu'il s'agisse des piles du lecteur de glycémie, des bandelettes réactives ou des lancettes. |
|  | Patient unique – usage multiple |
|  | Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. |
|  | Pile bouton 3 volts, type CR2032 |
|  | Risques biologiques – Les lecteurs usagés constituent une source potentielle d'infection. |
|  | Date de fabrication |
|  | Dispositif médical de diagnostic in vitro |
|  | Dispositif d'autodiagnostic |
|  | Dispositif de diagnostic près du patient |
|  | Fabricant |
|  | Indique le mandataire établi en Suisse |

8 Informations techniques

| | |
|-------------|--|
| UDI | Identifiant unique du dispositif |
| GTIN | Code article international |
| REF | Numéro de référence |
| SN | Numéro de série |
| LOT | Numéro de lot |
| CE | Conforme aux exigences en vigueur fixées par la législation européenne |

Fournitures supplémentaires

Bandelettes réactives : bandelettes réactives
Accu-Chek Guide

Solutions de contrôle : solutions de contrôle
Accu-Chek Guide

Message aux professionnels de santé

Ce système peut être utilisé dans les environnements de soins de santé professionnels tels que les cabinets médicaux, au sein des services de médecine générale, en cas de soupçon de diabète et en cas d'urgence.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection

Tout objet en contact avec du sang humain constitue une source potentielle d'infection. Les professionnels de santé doivent suivre les mesures de prévention contre les infections en vigueur dans leur établissement. Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour obtenir des informations supplémentaires à l'attention des professionnels de santé.

Manipulation des échantillons

Portez toujours des gants lorsque vous manipulez des objets ayant été en contact avec du sang. Conformez-vous toujours à la réglementation en usage en matière de manipulation d'objets susceptibles d'être contaminés par du matériel humain. Respectez les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans votre établissement. Préparez le site de prélèvement sélectionné conformément à la politique en vigueur dans votre établissement. Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour savoir quels sont les types d'échantillon et les anticoagulants acceptables et connaître les consignes à respecter en termes de manipulation.

8 Informations techniques

Conseiller le prélèvement sur site alternatif aux patients

La décision de conseiller le prélèvement sur site alternatif doit s'appuyer sur le niveau de motivation du patient et sa capacité à comprendre l'information relative au diabète et au prélèvement sur site alternatif. Si vous envisagez de conseiller à un patient le prélèvement sur site alternatif, il est nécessaire que vous sachiez qu'il existe un risque de différence importante entre des résultats obtenus à partir de sang prélevé à l'extrémité du doigt ou à la paume et des résultats obtenus à partir de sang prélevé à l'avant-bras ou au bras. La différence qui existe en termes de concentration entre le lit capillaire et la perfusion sanguine dans tout l'organisme peut être à l'origine d'écarts entre les résultats glycémiques obtenus à différents endroits de prélèvement. Ces effets physiologiques varient d'un individu à l'autre et peuvent différer chez un même individu en fonction de ses activités et de son état physique au moment de la mesure de glycémie.

Les études que nous avons menées sur les prélèvements sur site alternatif chez des adultes diabétiques montrent que la plupart des personnes s'aperçoivent que leur niveau de glycémie évolue plus rapidement dans du sang prélevé à l'extrémité du doigt ou à la paume que dans du sang prélevé à l'avant-bras ou au bras. Ce phénomène est particulièrement important en cas de fluctuation rapide de la glycémie, vers le bas ou vers le haut. Si votre patient a l'habitude d'apporter des modifications à son traitement en fonction des mesures effectuées à partir de sang prélevé à l'extrémité du doigt ou à la paume, il devra prendre en compte le temps de latence affectant la mesure effectuée à partir de sang prélevé à l'avant-bras ou au bras.

9 Garantie

Garantie

Les dispositions légales relatives à la vente et aux garanties des biens de consommation dans le pays d'achat prévalent.

MISE À JOUR : 2024-09

■ Indique une mise à jour du contenu

France

Service après-vente :

Numéro vert : 0800 27 26 93

www.accu-chek.fr

Belgique

Tél : 0800-93626 (Accu-Chek Service Clientèle)

www.accu-chek.be

Luxembourg

PROPHAC S.à r.l.

5, Rangwee

L-2412 Howald

B.P. 2063

L-1020 Luxembourg

Phone +352 482 482 500

diagnostics@prophac.lu

Suisse

Service clientèle Accu-Chek 0800 803 303

appel gratuit

www.accu-chek.ch



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCU-CHEK et ACCU-CHEK GUIDE sont des marques de Roche.

Le nom et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées du groupe Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Roche est soumise à un contrat de licence.

Tous les autres noms de produits et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2024 Roche Diabetes Care

07545754021A-1124

07545754021(01)-1124

