

Le manuel d'utilisation de la pompe vous explique comment utiliser et programmer des rappels.

Rappels



R1 Administrer bolus (1 à 5)
N'oubliez pas d'administrer le bolus nécessaire.



R2 Bolus oublié (1 à 5)
Vérifiez que vous n'avez pas oublié d'administrer un bolus nécessaire.



R3 Réveil (1 à 5)
Debout !




R4 Changer le dispositif de perfusion
Changez le dispositif de perfusion, le cas échéant.




R7 Fin du DBT
La durée d'un débit de base temporaire programmé s'est écoulée. Programmez un nouveau DBT si nécessaire.

Avertissements

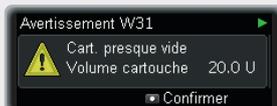


W31 Cartouche presque vide
La cartouche de votre pompe est presque vide. Préparez une nouvelle cartouche.

Avertissements

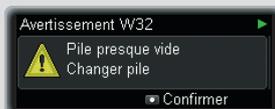

W32 Pile presque vide
La pile de votre pompe est presque vide. Soyez sûr d'avoir une pile neuve sur vous.

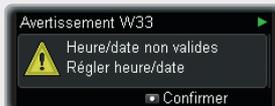

W33 Heure/date non valides
Lorsque la pompe n'a pas été alimentée pendant plus d'une heure, il se peut que la date et l'heure ne soient plus correctes. Réglez la date et l'heure correctes.



W34 Fin de garantie
La période de garantie de votre pompe a expiré. Contactez votre assistance technique pompe locale pour connaître la procédure à suivre.




W36 DBT annulé
Un débit de base temporaire a été annulé. Assurez-vous qu'il s'agit d'une annulation volontaire. Programmez un nouveau DBT si nécessaire.



W38 Bolus annulé
Un bolus a été annulé. Assurez-vous qu'il s'agit d'une annulation volontaire. Programmez un nouveau bolus si nécessaire.


Avertissements

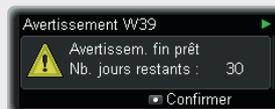

W39 Avertissement fin prêt
(pompes prêtées uniquement)
La durée de prêt de la pompe expire bientôt. Contactez l'assistance technique pompe locale pour connaître la procédure à suivre.

Lorsqu'un message d'entretien s'affiche, votre pompe passe en mode STOP ou PAUSE. Elle passe automatiquement en mode STOP si l'administration d'insuline n'est pas redémarrée dans les 15 minutes qui suivent. Redémarrez l'administration d'insuline, si nécessaire.

Entretien

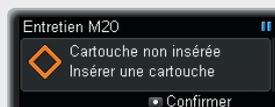

M20 Cartouche non insérée
Insérez une cartouche.



M21 Cartouche vide
Il ne reste plus d'insuline dans la cartouche. Insérez une nouvelle cartouche.



M22 Pile vide
La pile de votre pompe est vide. Insérez une nouvelle pile.




M23 Arrêt automatique
Vous n'avez appuyé sur aucune touche durant la période de temps définie pour l'arrêt automatique.

Entretien




M24 Occlusion
Le flux d'insuline est entravé. Remplacez le dispositif de perfusion complet. Si le message d'entretien réapparaît, remplacez aussi la cartouche.

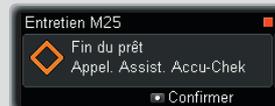

M25 Fin du prêt (pompes prêtées uniquement)
La période de prêt de votre pompe a expiré. Contactez l'assistance technique pompe locale pour connaître la procédure à suivre.



M26 Remplacement cartouche non abouti
Le remplacement de la cartouche a été interrompu. Ré-effectuez le remplacement de cartouche.

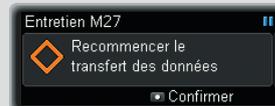


M27 Échec du transfert des données
Le transfert des données vers un ordinateur a été interrompu. Relancez le transfert de données.




M28 Délai admin. insuline expiré
Votre pompe est en mode PAUSE depuis plus de 15 minutes. Elle est donc passée en mode STOP. Les DBT et les bolus ont été annulés. Redémarrez l'administration d'insuline et reprogrammez les DBT et les bolus, si nécessaire.

Entretien

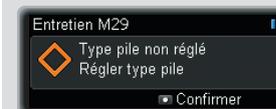

M29 Type pile non réglé
Le type de pile n'a pas été défini pendant le processus de démarrage. Réglez le type de pile.

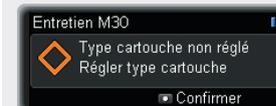


M30 Type cartouche non réglé
Le type de cartouche n'a pas été défini pendant le processus de démarrage ou au moment de remplacer la cartouche. Réglez le type de cartouche.

Si un message d'Erreur apparaît, cela signifie que la pompe a détecté une anomalie plus grave. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème la première fois et si l'erreur se répète, contactez l'assistance technique pompe et employez, au besoin, une autre méthode d'insulinothérapie.

Erreurs



E6 Erreur mécanique
Le système mécanique de la pompe ne fonctionne pas correctement. Changez la pile et la cartouche.

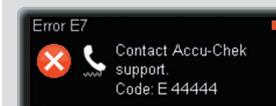

E7 Erreur électronique
Lorsque ce message apparaît, changez la pile. Si le message se répète, vous ne pouvez pas résoudre ce problème seul.

Erreurs



E10 Erreur retour tige fileté
La tige fileté télescopique n'est pas correctement revenue en position d'origine lors de l'insertion de la cartouche. Changez la pile et ré-effectuez le changement de cartouche.



E13 Erreur langue
La pompe ne peut plus afficher la langue sélectionnée. Changez de langue.

Activer ou désactiver le mode avion

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **☰** pour accéder au **Menu** principal.
- 2 Le **Menu** principal s'affiche. Appuyez sur la touche **▼** pour accéder au menu **Modes**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 3 Le menu **Modes** s'affiche. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour accéder au **Mode avion**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 4 L'écran du **Mode avion** s'affiche. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour accéder à l'option **Activé** ou **Désactivé**, selon vos besoins. Appuyez sur la touche **☑** pour confirmer.

La pompe revient à l'écran **MARCHE** et le mode avion est actif immédiatement. La communication **Bluetooth** est désactivée.

Régler l'heure

- 1 Depuis le **Menu** principal, appuyez sur la touche **▼** pour accéder au menu **Réglages**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 2 Dans l'écran **Réglages**, appuyez sur la touche **▼** pour accéder à l'écran **Heure et date**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 3 L'écran **Heure et date** s'affiche. Appuyez sur la touche **▼** pour accéder au menu **Heure**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 4 L'écran **Heure** s'affiche avec le champ des heures mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour modifier les heures. Appuyez sur la touche **☑** pour confirmer et passer au champ des minutes.

- 5 Le champ des minutes est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour modifier les minutes. Appuyez sur la touche **☑** pour confirmer.

Régler la date

- 1 Depuis le **Menu** principal, appuyez sur la touche **▼** pour accéder au menu **Réglages**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 2 Dans l'écran **Réglages**, appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour accéder à l'écran **Heure et date**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 3 L'écran **Heure et date** s'affiche. Appuyez sur la touche **▼** pour accéder à l'écran **Date**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 4 L'écran **Date** s'affiche avec le champ de l'année mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour modifier l'année. Appuyez sur la touche **☑** pour confirmer et passer au champ du mois.
- 5 Le champ du mois est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour modifier le mois. Appuyez sur la touche **☑** pour confirmer et passer au champ du jour.
- 6 Le champ du jour est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour modifier le jour. Appuyez sur la touche **☑** pour confirmer.

Programmer un bolus carré

- 1 Depuis l'écran **État**, appuyez sur la touche **☑**.
- 2 Le **Menu** principal s'affiche. Appuyez sur la touche **☑** pour sélectionner **Bolus**.
- 3 L'écran **Bolus** s'affiche. Appuyez sur la touche **▼** pour accéder à l'option **Bolus carré**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 4 L'écran **Bolus carré** s'affiche avec la dose de bolus prolongé mise en surbrillance.
- 5 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler la dose de bolus prolongé. Appuyez sur la touche **☑**.
- 6 La durée du bolus est mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler la durée. Appuyez sur la touche **☑** pour confirmer.
- 7 L'écran **Bolus à administrer** s'affiche. Il indique les unités d'insuline qui restent à administrer pour le bolus carré. Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur la touche **☑** pour reprogrammer le bolus.

Programmer un bolus mixte

- 1 Depuis l'écran **État**, appuyez sur la touche **☑**.
- 2 Le **Menu** principal s'affiche. Appuyez sur la touche **☑** pour sélectionner **Bolus**.
- 3 L'écran **Bolus** s'affiche. Appuyez sur la touche **▼** pour accéder au menu **Bolus mixte**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 4 L'écran **Bolus mixte** s'affiche avec la dose de bolus rapide mise en surbrillance.
- 5 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler la dose de bolus rapide. Appuyez sur la touche **☑**.
- 6 Le champ indiquant la dose de bolus prolongé est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler la dose de bolus prolongé. Appuyez sur la touche **☑**.
- 7 La durée du bolus retardé est mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler la durée. Appuyez sur la touche **☑** pour confirmer.
- 8 L'écran **Bolus à administrer** s'affiche. Il indique les unités d'insuline qui restent à administrer pour le bolus mixte. Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur la touche **☑** pour reprogrammer le bolus.

Annulation d'un bolus à l'aide du menu Annuler bolus

- 1 Depuis l'écran **État**, appuyez sur la touche **☑**.
- 2 Le **Menu** principal s'affiche. Appuyez sur la touche **☑** pour sélectionner **Bolus**.
- 3 Le menu **Bolus** s'affiche. Appuyez sur la touche **▼** pour accéder au menu **Annuler bolus**. Appuyez sur la touche **☑** pour effectuer la sélection.
- 4 L'écran **Annuler bolus** s'affiche.
- 5 Si plusieurs bolus sont en cours d'exécution, appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour accéder au bolus que vous souhaitez annuler. Appuyez sur la touche **☑** pour confirmer.
- 6 L'**Avertissement W38 : Bolus annulé** s'affiche. Appuyez sur la touche **☑** pour couper le son de l'avertissement. Appuyez à nouveau sur la touche **☑** pour confirmer.

Bolus	<ul style="list-style-type: none"> Bolus standard Annuler bolus Bolus carré Bolus mixte 	
Débit de base	<ul style="list-style-type: none"> Débit de base temporaire Activer profil débits de base Programmer profil débits de base 	<ul style="list-style-type: none"> DBT standard Annuler DBT Profils de débits de base 1 à 5 Profils de débits de base 1 à 5
Arrêter pompe		
Mettre pompe en marche		
Données de la pompe	<ul style="list-style-type: none"> Historique des événements Données bolus Données DBT Quantités quotidiennes Compteur de la pompe Version 	
Modes	<ul style="list-style-type: none"> Type de signal Mode avion 	<ul style="list-style-type: none"> Normal Vibreur Silencieux Fort
Réglages	<ul style="list-style-type: none"> Rappels Communication Réglages pompe Réglages personnels Heure et date 	<ul style="list-style-type: none"> Administrer bolus 1 à 5 Bolus oublié 1 à 5 Réveil 1 à 5 Remplacer dispositif perfusion Réglages mode <ul style="list-style-type: none"> Normal Vibreur Silencieux Fort Profil utilisateur <ul style="list-style-type: none"> Standard Expressif Son grave Verrouillage des touches Langue Écran <ul style="list-style-type: none"> Luminosité Orientation Couleur du fond Arrêt automatique <ul style="list-style-type: none"> Réglages bolus <ul style="list-style-type: none"> Incrément bolus direct Vitesse d'administration Quantité bolus max. Réglage délai admin. bolus Réglages dispositif perf. <ul style="list-style-type: none"> Réglage quantité tubulure Régler quantité canule Niveau critique de cartouche
Cartouche et dispositif de perfusion	<ul style="list-style-type: none"> Changer cartouche Remplir tubulure Remplir canule 	



Représentants locaux :

AR 0800-333-6081	IN 1800 22 60 20
AT +43 1 27787-596	IT 800 089 300
AU 1800 633 457	MX 01800-9080600
BE 0800 93626	NL 0800 022 05 85
BR 0800 77 20 126	NO +47 815 00 510
CA 1-800-688-4578	NZ 0800 80 22 99
CH 0800 11 00 11	PL +48 22 481 55 55
CN +86-21-24121000	PT 800 910 107
CZ +420 724 133 301	RU 8-800-200-88-99
DE 0800 44 66 800	SE 020-41 00 42
DK +45 36 39 99 54	SI 080 12 32
ES 900 400 000	SK 0800 120200
FI 800 92066	UK 0800 731 22 91
FR +33 4 76 76 30 00	US 1-800-688-4578
GR 800 11 71000	ZA 080-34-22-38-37
HU 06-80-200-694	

ACCU-CHEK et ACCU-CHEK INSIGHT sont des marques de Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany



FR : 06651917001/B Master: 00049011189/A Status: 02-2014

Je suis **atteint de diabète** et utilise une pompe à insuline qui m'administre de l'insuline via un cathéter sous ma peau. Si mon comportement est anormal ou si je suis inconscient, merci de retirer de ma peau l'aiguille ou bien de couper directement le cathéter au niveau de l'aiguille. Si je peux avaler, donnez-moi immédiatement du sucre sous n'importe quelle forme. Appelez un médecin, l'hôpital ou une ambulance.

I am a **diabetic patient** being treated with an insulin pump, that delivers insulin via a tube into my skin. If I show abnormal behavior or I am unconscious, please pull the tube with the needle out of my skin or cut the tube off directly at the needle. If I am able to swallow, give me sugar in some form immediately. Notify a doctor, hospital or ambulance.

Carte d'urgence

Nom

Adresse

Téléphone

En cas d'urgence, veuillez contacter :

Nom

Téléphone

Certificat médical

Ce document atteste que

Mme/M. _____

Date de naissance _____

est atteint de DIABÈTE SUCRÉ.

Il/elle doit bénéficier d'administrations régulières d'insuline au moyen de la pompe à insuline Accu-Chek Insight qu'il/elle porte sur lui/elle et dont le numéro de série est le _____ .

06651917001/B

Date et lieu

Nom du médecin

Téléphone

Fax

Signature

Cachet