




Accu-Chek® TenderLink

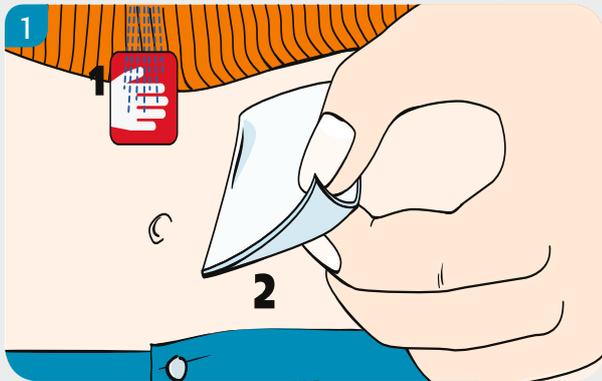


1. Lavez-vous les mains.
2. Désinfectez le site.

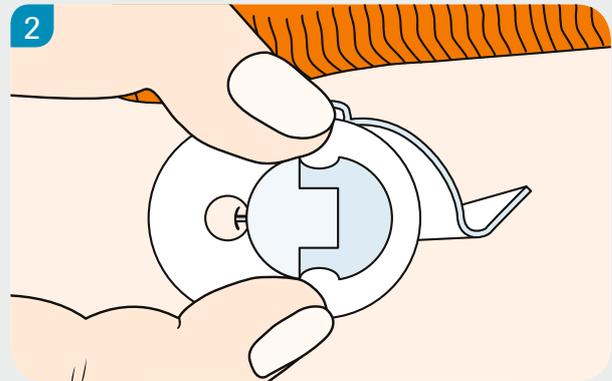


1. Repoussez l'embase adhésive avec l'index.
2. Enlevez l'embase adhésive de l'avant et la protection de l'aiguille-guide.
3. Pincez le tissu sous-cutané.
4. Insérez lentement le set de perfusion Accu-Chek TenderLink avec un angle de 20-45°.

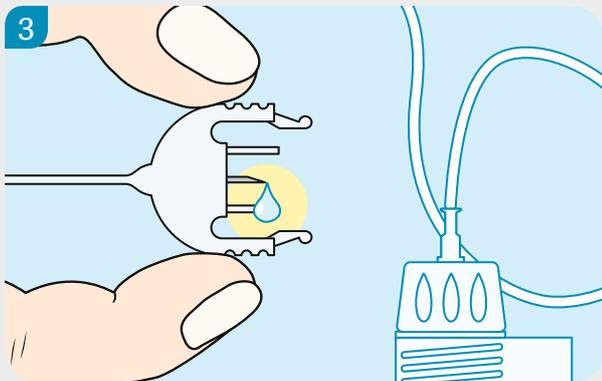


1. Appliquez l'embase adhésive sur la peau.
2. Retirez l'aiguille-guide en appuyant sur les côtés du système de déconnexion.

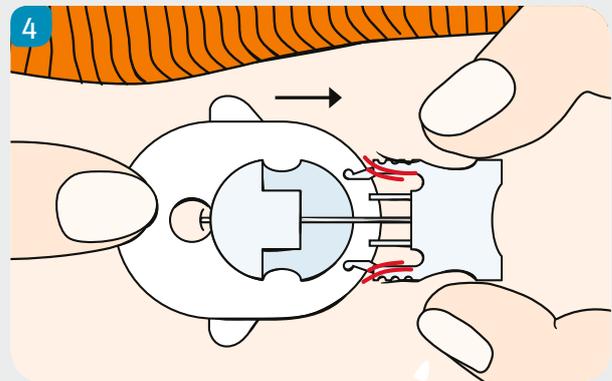

1. Enlevez l'embase adhésive de l'arrière.
2. Appliquez l'embase adhésive sur la peau.

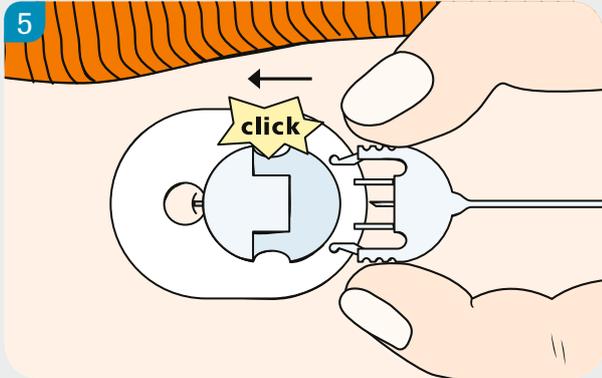

Purgez la tubulure et sa partie déconnectable (placez la pompe en position verticale).

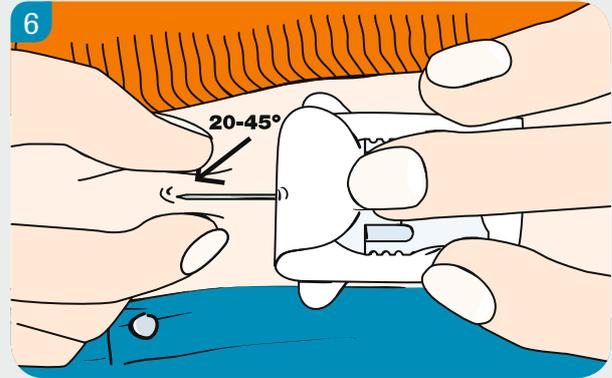

1. Clipez les deux parties du système de déconnexion (jusqu'à un «click» perceptible).
2. Mettez la pompe en mode «RUN».
3. Délivrez un bolus supplémentaire de 0.7 U.I.

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| Canule | Longueur: | 13 mm | 17 mm | |
| | Volume de purge: | 0,7 I.E.* | 0,7 I.E.* | |
| Tubulure | Longueur: | 30 cm | 60 cm | 80 cm |
| | Volume de purge: | 7 I.E.* | 10 I.E.* | 13 I.E.* |

* I.E. 100 Insuline

Pour des instructions détaillées et les consignes de sécurité importantes, veuillez consulter les instructions accompagnant ce produit.

ACCU-CHEK et ACCU-CHEK TENDERLINK sont des marques de Roche. ©2017 Roche

www.accu-chek.ch
 Roche Diabetes Care (Suisse) SA
 Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz