

Un solo Click. Punto.

Accu-Chek FastClix. Il primo
sistema pungidito al mondo con
cilindro di sicurezza igienico.



Facile, delicato e unico nel suo genere. Accu-Chek FastClix.

Il prelievo di sangue è parte integrante della misurazione della glicemia, ma l'impiego di singole lancette per il prelievo anche di una sola goccia di sangue può essere complesso e doloroso, per non parlare del rischio di possibili ferite da puntura d'ago durante la manipolazione e lo smaltimento delle lancette.

Il pungidito Accu-Chek FastClix è il primo sistema pungidito al mondo dotato di un cilindro di sicurezza igienico, formato da 6 lancette in un unico cilindro, da far scattare con un solo click. La tecnica unica nel suo genere rende il prelievo di sangue rapido, facile e praticamente indolore.

Provate l'esperienza di un prelievo di sangue con un solo click.
Le vostre dita vi ringrazieranno.

Prelievo di sangue con un solo click.

**Dimensioni adesso
ancora più compatte.**

Impiego adatto anche
per mani piccole
Sta in ogni tasca



1 click.

Caricare e far scattare
con un clic

**6 lancette
in un cilindro**

Comodo e igienico

Clixmotion® – movimento della lancetta guidato, in entrata e in uscita.

La tecnologia Clixmotion è stata integrata nel sistema pungidito Accu-Chek FastClix. Questa tecnologia con movimento guidato della lancetta, insieme alla speciale affilatura della lancetta, le garantisce una puntura delicata e aiuta a ridurre il rischio di danni alla cute e alle terminazioni nervose.



Supporto della lancetta



durante la puntura

Lancetta

con affilatura a 3 facce


Movimento guidato della lancetta nel cilindro

per ridurre al minimo le vibrazioni

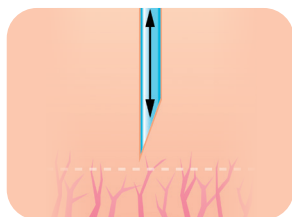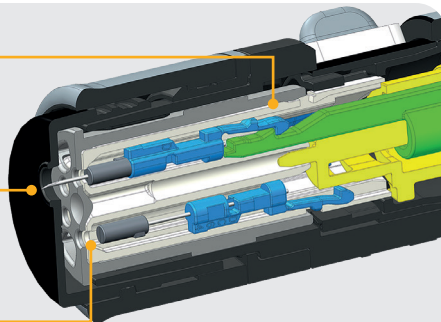

Con Clixmotion

- Vibrazioni ridotte al minimo, in entrata e in uscita
- La lancetta si arresta con precisione e viene ritirata immediatamente

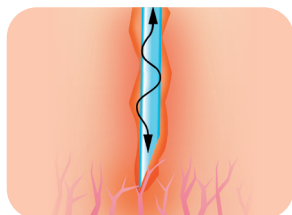


Senza Clixmotion


- Le vibrazioni causano dolorosi danni ai tessuti
- La lancetta si arresta bruscamente e rimbalza

La facile manipolazione


Prelievo di un campione di sangue

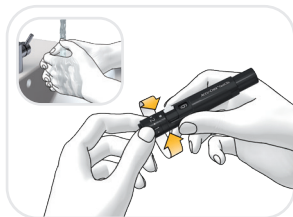

Lavarsi le mani
Selezionare uno degli
11 livelli di profondità di
puntura

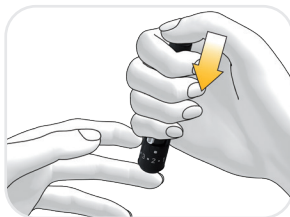


Caricare e far scattare
il pungidito in un solo
click.

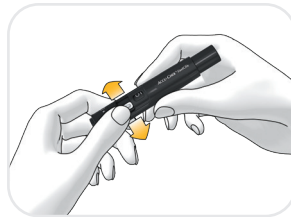


Caricare una nuova
lancetta spingendo
avanti e indietro la
levetta.


Inserimento del cilindro

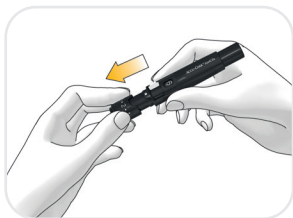

Prelevare il cappuccio

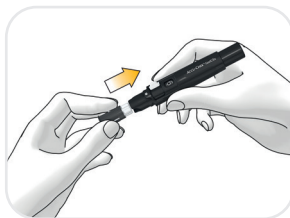

Inserire il cilindro delle
lancette

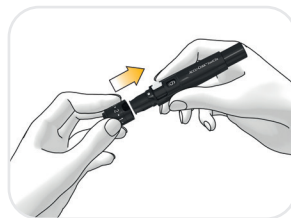

Applicare il cappuccio



Cilindro
nuovo



Cilindro
usato

Utilizzare tutte le 6 lancette prima di sostituire
il cilindro. Per motivi igienici, una volta rimosso,
il cilindro non può più essere riposizionato.

La facile manipolazione



5 consigli per prelevare delicatamente il sangue.

- 1 Accertarsi di avere le mani **pulite e asciutte**.
- 2 Pungere preferibilmente il **lato del polpastrello** anziché la punta.
- 3 **Tenere la pelle tesa**, premendo il pungidito fermamente sulla pelle.
- 4 **Selezionare la profondità** di puntura più bassa possibile che permetta ancora di ottenere del sangue.
- 5 Cambiare **ogni giorno** il dito ed eseguire le misure necessarie per ottenere una **buona circolazione**.

Per maggiori informazioni su Accu Chek FastClix consultare:
go.roche.com/fastclix-it

- 1 Schmid C et al. Integrated SMBG System—Handling step & potential handling error analysis. Poster presentation at the 5th International Conference on Advanced Technologies & Therapeutics for Diabetes (ATTD); 2012 February 8–11; Barcelona, Spain.
- 2 Müller M et al. The drum-based Accu-Chek® lancing devices Accu-Chek® Multiclix and Accu-Chek® FastClix: Global Value Dossier, Roche Diagnostics GmbH, 1st edition 2012.

Experience what's possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CLIXMOTION und FASTCLIX
sind Marken von Roche. © 2024 Roche



www.accu-chek.ch
Roche Diagnostics (Svizzera) SA
Forrenstrasse 2 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®