

ACCU-CHEK® FastClix

Roche

# Un solo Click. Punto.

Accu-Chek FastClix. Il primo sistema pungidito al mondo con cilindro di sicurezza igienico.



ACCU-CHEK®

## Facile, delicato e unico nel suo genere. Accu-Chek FastClix.

Il prelievo di sangue è parte integrante della misurazione della glicemia, ma l'impiego di singole lancette per il prelievo anche di una sola goccia di sangue può essere complesso e doloroso, per non parlare del rischio di possibili ferite da puntura d'ago durante la manipolazione e lo smaltimento delle lancette. Il pungidito Accu-Chek FastClix è il primo sistema pungidito al mondo dotato di un cilindro di sicurezza igienico, formato da 6 lancette in un unico cilindro, da far scattare con un solo click. La tecnica unica nel suo genere rende il prelievo di sangue rapido, facile e praticamente indolore.

**Provate l'esperienza di un prelievo di sangue con un solo click.  
Le vostre dita vi ringrazieranno.**

## Prelievo di sangue con un solo click.

**Dimensioni adesso  
ancora più compatte.**

Impiego adatto anche  
per mani piccole  
Sta in ogni tasca



**1 click.**

Caricare e far scattare  
con un clic

**6 lancette  
in un cilindro**

Comodo e igienico

# Clixmotion® – movimento della lancetta guidato, in entrata e in uscita.

La tecnologia Clixmotion è stata integrata nel sistema pungidito Accu-Chek FastClix. Questa tecnologia con movimento guidato della lancetta, insieme alla speciale affilatura della lancetta, le garantisce una puntura delicata e aiuta a ridurre il rischio di danni alla cute e alle terminazioni nervose.



## Supporto della lancetta



durante la puntura

## Lancetta

con affilatura a 3 facce


## Movimento guidato della lancetta nel cilindro

per ridurre al minimo le vibrazioni

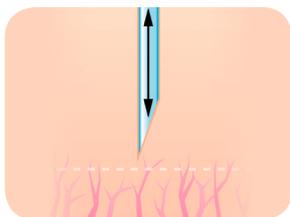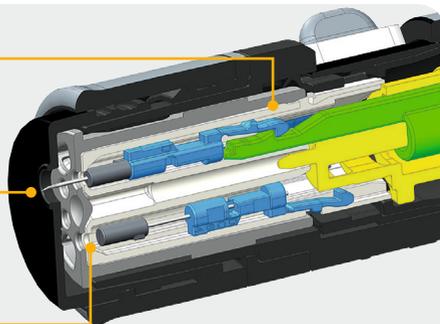

## Con Clixmotion

- Vibrazioni ridotte al minimo, in entrata e in uscita
- La lancetta si arresta con precisione e viene ritirata immediatamente

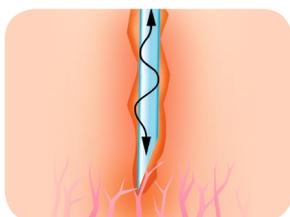

## Senza Clixmotion


- Le vibrazioni causano dolorosi danni ai tessuti
- La lancetta si arresta bruscamente e rimbalza

## La facile manipolazione

### Prelievo di un campione di sangue



Lavarsi le mani  
Selezionare uno degli  
11 livelli di profondità di  
puntura

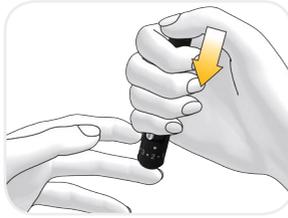

Caricare e far scattare il  
pungidito in un solo click.




Caricare una nuova  
lancetta spingendo avanti  
e indietro la levetta.

### Inserimento del cilindro



Prelevare il cappuccio

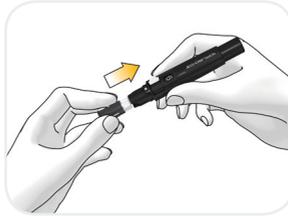

Inserire il cilindro delle  
lancette



Applicare il cappuccio



Cilindro  
nuovo



Cilindro  
usato

Utilizzare tutte le 6 lancette prima di sostituire  
il cilindro. Per motivi igienici, una volta rimosso,  
il cilindro non può più essere riposizionato.

## La facile manipolazione



## 5 consigli per prelevare delicatamente il sangue.

- 1 Accertarsi di avere le mani **pulite e asciutte**.
- 2 Pungere preferibilmente **il lato del polpastrello** anziché la punta.
- 3 **Tenere la pelle tesa**, premendo il pungidito fermamente sulla pelle.
- 4 **Selezionare** la profondità di puntura più bassa possibile che permetta ancora di ottenere del sangue.
- 5 Cambiare **ogni giorno** il dito ed eseguire le misure necessarie per ottenere una **buona circolazione**.

Per maggiori informazioni su Accu Chek FastClix consultare  
[www.accu-chek.ch/fastclix](http://www.accu-chek.ch/fastclix).

- 1 Schmid C et al. Integrated SMBG System-Handling step & potential handling error analysis. Poster presentation at the 5th International Conference on Advanced Technologies & Therapeutics for Diabetes (ATTD); 2012 February 8 -11; Barcelona, Spain.
- 2 Müller M et al. The drum-based Accu-Chek® lancing devices Accu-Chek® Multiclix and Accu-Chek® FastClix: Global Value Dossier, Roche Diagnostics GmbH, 1st edition 2012.

**Experience what's possible.**

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CLIXMOTION und FASTCLIX  
sind Marken von Roche. © 2016 Roche

[www.accu-chek.ch](http://www.accu-chek.ch)

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG  
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz



**ACCU-CHEK®**