

ACCU-CHEK® Instant

Roche



# SEMPLICEMENTE MISURARE

## Accu-Chek Instant

Il misuratore di glicemia affidabile per le persone affette da diabete che desiderano misurare in modo semplice. La scala cromatica permette di riconoscere in modo chiaro se il risultato è elevato, basso o compreso nell'intervallo glicemico ideale.



Compatibile  
con



# COMPRENSIONE CORRETTA ED INTUITIVA

Accu-Chek Instant semplifica la misurazione autonoma della glicemia per permettere ai Suoi pazienti di comprendere ed interpretare i valori della glicemia con un solo sguardo e acquisire fiducia nel trattamento del diabete.

La scala cromatica garantisce la sicurezza visiva<sup>1</sup> e aiuta ad identificare ed interpretare correttamente i valori della glicemia elevati e bassi<sup>1</sup>.



## Azzurro

Il risultato glicemico si trova al di sopra dell'intervallo ideale.

## Verde

Il risultato glicemico rientra nell'intervallo ideale.

## Rosso

Il risultato glicemico si trova al di sotto dell'intervallo ideale.

## Ampia area di applicazione del campione di sangue

Il campione di sangue può essere applicato a piacere lungo il contrassegno giallo. Perfino lateralmente.



# TEST SEMPLICE IN 4 PASSAGGI




## **Introduzione della striscia reattiva**

Lavarsi le mani con acqua calda e sapone e asciugarle accuratamente prima di iniziare la misurazione. Il misuratore si accende al momento dell'introduzione della striscia reattiva nell'apparecchio.



## **Prelievo di sangue**

Una volta che compare il simbolo della goccia lampeggiante, utilizzare il pungidito per il prelievo del campione di sangue.

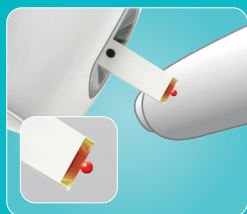

## **Applicazione del sangue**

Toccare il bordo giallo della striscia reattiva con la goccia di sangue. Rimuovere il dito dalla striscia reattiva non appena compare il simbolo della clessidra lampeggiante sul display.



## **Lettura del risultato del test**

Il risultato del test compare sul display in meno di 4 secondi. La freccia indica se il risultato del test si trova all'interno, al di sopra o al di sotto dell'intervallo di riferimento.



## **Tutorial disponibile online**

Su [www.accu-chek.ch](http://www.accu-chek.ch) è disponibile un tutorial sul misuratore di glicemia Accu-Chek Instant

# PANORAMICA DEI VANTAGGI

## Ampio display

Ampio display illuminato  
con un ottimo contrasto

## Pratico pulsante di estrazione

Espulsione igienica delle strisce  
con una semplice pressione



## Scala cromatica

Per un'interpretazione  
semplice e veloce

## Introduzione guidata

Semplifica l'introduzione  
della striscia

## Ha domande sul prodotto?

In caso di domande su Accu-Chek Instant, si rivolga al nostro  
servizio clienti allo 0800 803 303 o tramite e-mail [info@accu-chek.ch](mailto:info@accu-chek.ch).

1 Parkin CG, et al. Use of an integrated tool for interpretation of blood glucose data improves correctness of glycaemic risk assessment in individuals with type 1 and type 2 diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2017, 11(1), 74–82.