

## Scheda di istruzioni su Accu-Chek LinkAssist Plus

Utilizzare l'applicatore Accu-Chek LinkAssist Plus per inserire il set d'infusione Accu-Chek in modo facile e praticamente indolore perfino in siti d'infusione di difficile accesso.



**A** Pulsante di rilascio      **C** Vano di caricamento  
**B** Rilascio di sicurezza      **D** Cursore



1  
 Lavarsi bene le mani, prima di estrarre dalla confezione il set d'infusione. Inserire il set d'infusione nell'applicatore con la parte colorata della pellicola adesiva rivolta verso il rilascio di sicurezza.



2  
 Staccare entrambe le parti della pellicola adesiva dal cerotto adesivo.



3  
 Tenere il cursore su entrambi i lati e tirarlo indietro ino al punto di arresto. L'ago dell'introduttore con la cannula flessibile scatta all'esterno. Consiglio: il lato contrassegnato con "ACCU-CHEK" deve essere tirato un po' prima.



4  
 Posizionare l'applicatore sul sito d'infusione prescelto. Premere l'applicatore contro la pelle, accertandosi che il rilascio di sicurezza non sia più visibile.



5  
 Premere il pulsante di rilascio per inserire il set d'infusione.


## Accu-Chek LinkAssist Plus



6 Rimuovere l'applicatore.



7 Per riporre l'applicatore, tirare indietro il cursore in posizione iniziale.

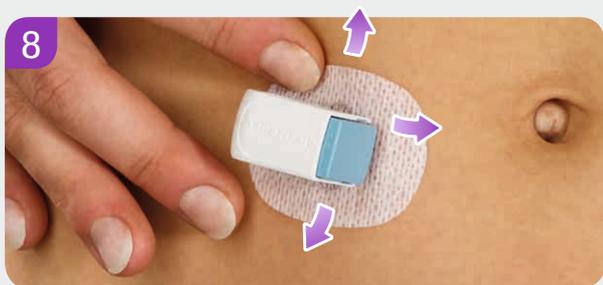


8 Premere con decisione il cerotto adesivo sul sito d'infusione, accertandosi che il contatto con la cute sia buono.



9 Rimuovere la scatola con l'ago dell'introduttore perpendicolarmente, lasciando l'alloggiamento della cannula in situ. L'ago dell'introduttore ritorna automaticamente nella scatola.



10 Collegare il set di trasferimento al microinfusore e attivarlo secondo le istruzioni fornite con il microinfusore. Accertarsi dell'assenza di bolle d'aria.

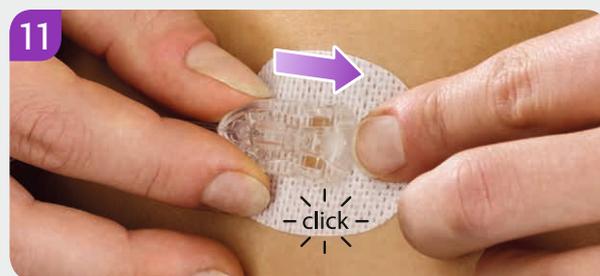

11 Collegare il set di trasferimento riempito dalla alloggiamento della cannula. Prima di riprendere la terapia con microinfusore, riempire l'alloggiamento della cannula e la cannula flessibile con 0,7 U di insulina.

Per istruzioni dettagliate e informazioni importanti sulla sicurezza consultare la documentazione di accompagnamento del prodotto e del set d'infusione.

**Experience what's possible.**

ACCU-CHEK e ACCU-CHEK LINKASSIST PLUS sono marchi di Roche. © 2014 Roche

[www.accu-chek.ch](http://www.accu-chek.ch)

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG  
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

**ACCU-CHEK®**