

ACCU-FINE®

Roche

# Aghi per penna per insulina Accu-Fine

## Iniezioni delicate per tutti



# NOVITÀ

Compatibile con la  
maggioranza delle penne

ACCU-CHEK®

# Delicatezza, compatibilità e doppia protezione

## Accu-Fine: panoramica dei vantaggi

La sicurezza prima di tutto: doppia protezione



**Cappuccio di protezione esterno**  
Sigillato e sterile



**Cappuccio di protezione supplementare**  
Per ridurre al minimo le punture accidentali



**L'ago**



Compatibile con tutte le penne per insulina disponibili

Cosa rende gli aghi Accu-Fine così delicati?

**Speciale affilatura,**  
per una puntura della cute delicata

**Speciale parete dell'ago,**  
per un flusso di insulina più elevato

**Speciale rivestimento,**  
per un facile scivolamento dell'ago nella pelle



Riutilizzare un ago può ritardare l'azione dell'insulina e causare infezioni e lipodistrofie.

**Pertanto, bisogna sempre utilizzare un nuovo ago.**



# Iniezione dell'insulina

## Consigli per un uso corretto

Un ago della lunghezza giusta e una corretta tecnica di iniezione...

...sono essenziali per una terapia insulinica efficace.

Gli studi **raccomandano aghi più corti**, perché di norma questi bastano a **trasportare l'insulina nel tessuto adiposo sottocutaneo**. Il rischio di un'iniezione nel muscolo, che può essere dolorosa e modificare il tempo d'azione dell'insulina, è limitato.<sup>1</sup>

Chieda al suo medico quali sono la lunghezza dell'ago e la tecnica di iniezione più adatte per lei.


**4 mm**  
32G

**5 mm**  
31G

**8 mm**  
31G

**Perpendicolare senza piega di pelle**

**Angolo di 45° Formare una piega di pelle**


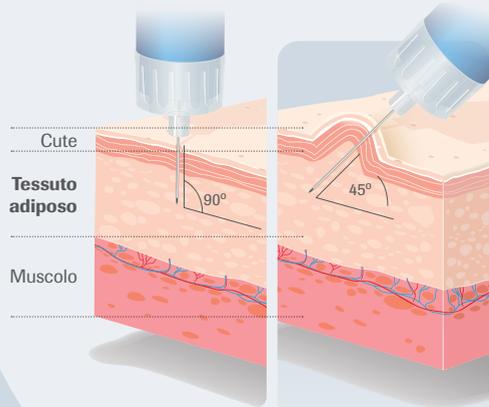


\* L'illustrazione mostra, a titolo esemplificativo, gli strati della cute di un adulto di peso normale.

## Il sito di iniezione...

...influenza la velocità di assorbimento dell'insulina.

- **Addome:**  
effetto più rapido
- **Parte superiore del braccio:**  
effetto più lento
- **Cosce e glutei:**  
effetto più lento

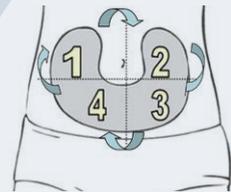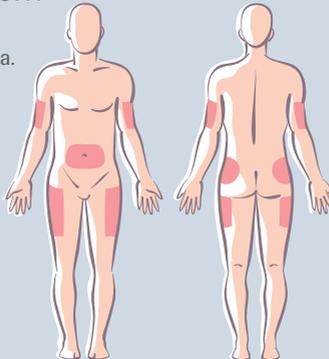

Cambi il punto di iniezione regolarmente, p. es. in senso orario attorno all'ombelico

# Aghi per penna per insulina Accu-Fine

## Iniezioni delicate per tutti

Gli aghi Accu-Fine sono per tutti!

Accu-Fine offre **diverse varianti** per soddisfare le **diverse esigenze** dei pazienti.



**PROVI SUBITO GRATUITAMENTE GLI AGHI ACCU-FINE!\***

**Spedisci un'e-mail all'indirizzo [info@accu-chek.ch](mailto:info@accu-chek.ch) per ordinare 5 aghi Accu-Fine (5 mm, 31G).**

\* Promozione valida fino a esaurimento scorte.

1 Michael A. Gibney et al. (2010). Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations, Current Medical Research and Opinion 26:6, 1519 – 1530.

ACCU-CHEK e ACCU-FINE sono marchi di Roche. © 2018 Roche Diabetes Care.



[www.accu-chek.ch](http://www.accu-chek.ch)  
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG  
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

**ACCU-CHEK®**