


PREMIERS PAS AVEC LE SYSTÈME À BOUCLE FERMÉE HYBRIDE




Vous avez configuré et associé votre système de surveillance en continu de la glycémie (CGM – Continuous Glucose Monitoring) Dexcom G6 et votre pompe à insuline Accu-Chek Insight au DBLG1. En loop mode, le système ajuste automatiquement les besoins en insuline. L'utilisateur doit annoncer au système deux éléments : les repas et l'activité physique – afin de prendre en compte ces situations de manière automatique et de mieux anticiper les tendances futures.

ANNONCE D'UN REPAS

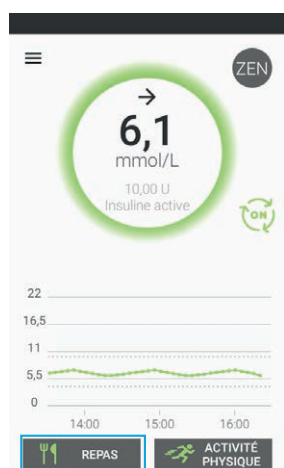

01

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur «REPAS».

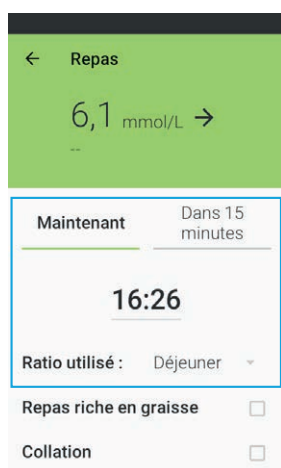


02

Sélectionnez l'heure de votre repas. Vous pouvez utiliser les raccourcis «Dans 15 minutes» ou «Maintenant». Le système choisit pour vous le ratio-repas le plus approprié.




03

Si vous prévoyez de prendre un repas riche en matières grasses, sélectionnez l'option «Repas riche en graisses». L'option «Collation» convient pour annoncer un repas pauvre en glucides (20 g) qui requiert cependant un bolus.

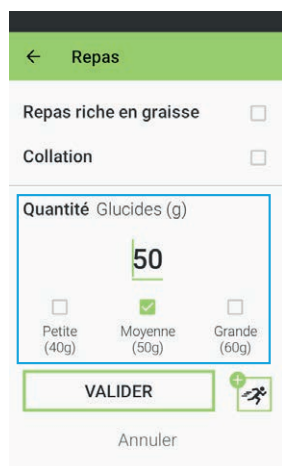

04

En faisant défiler la page vers le bas, vous pouvez saisir la quantité de glucides ou cliquer sur l'une des cases indiquant une quantité prédéfinie.

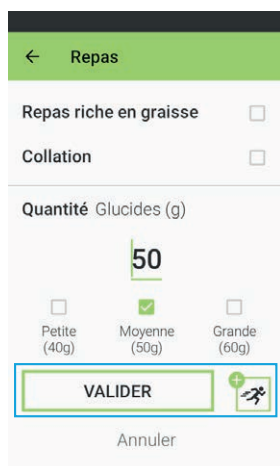

05


Cliquez sur «VALIDER» pour confirmer votre saisie. Le raccourci vers l'activité peut être utilisé pour indiquer une activité physique à venir.



06


Le système recommande automatiquement un bolus de repas qui peut être modifié ou confirmé. Veuillez contacter votre professionnel de santé si vous rencontrez des difficultés à évaluer les quantités de glucides.

ANNONCE D'UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

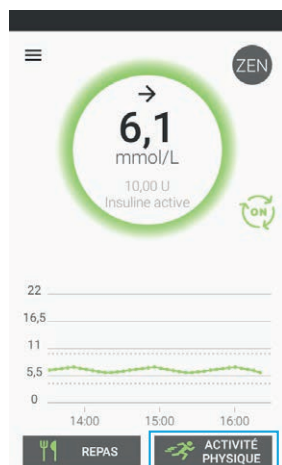


01

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur «ACTIVITÉ PHYSIQUE».

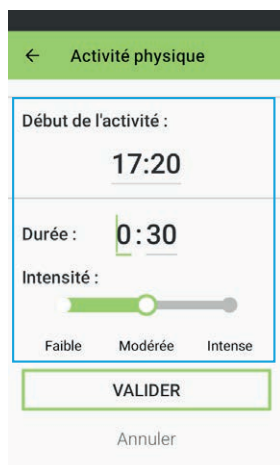

02

Réglez l'heure de début, la durée et l'intensité de votre activité physique.

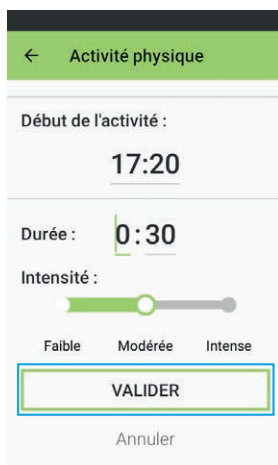

03

Enregistrez votre saisie en cliquant sur «VALIDER».



Vous trouverez d'autres conseils dans le manuel utilisateur.

ACCU-CHEK et ACCU-CHEK INSIGHT sont des marques commerciales de Roche. Le nom et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Roche est soumise à licence. Diabeloop, DBLG1 et YourLoops sont soit des marques, soit des marques déposées de Diabeloop en Europe et dans d'autres pays. Dexcom et Dexcom G6 sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-check.ch
Roche Diabetes Care (Suisse) SA
Industriestrasse 7
CH-6343 Rotkreuz

**POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR:
ACCU-CHEK.CH**

