


# PRIMI PASSI CON IL SISTEMA IBRIDO AD ANSA CHIUSA




Ha configurato e collegato il Suo sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) Dexcom G6 e la Sua pompa per insulina Accu-Chek Insight al DBLG1. Nella modalità loop, il sistema regola automaticamente il fabbisogno di insulina. L'utente deve segnalare al sistema due elementi, ovvero i pasti e l'attività fisica, in modo che il sistema possa considerare automaticamente queste situazioni e prevedere meglio i trend futuri.

## SEGNALAZIONE DI UN PASTO

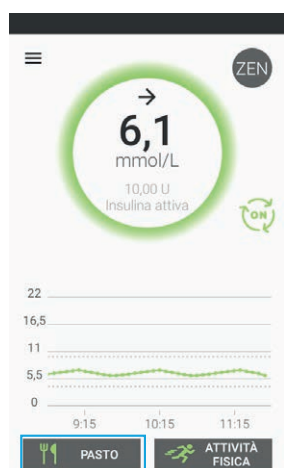


01

Sulla schermata iniziale, fare clic su «PASTO».

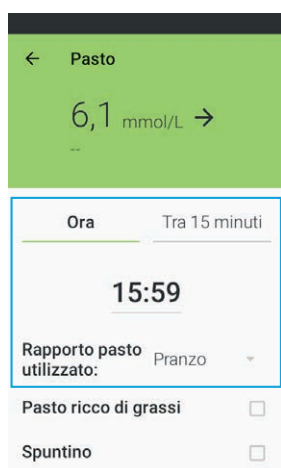


02

Selezionare l'ora del pasto. È possibile utilizzare le scorciatoie TRA 15 MINUTI oppure ORA. Il sistema sceglie il rapporto pasto più appropriato.

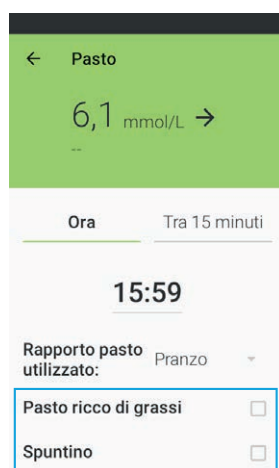


03

Per un pasto a elevato contenuto di grassi, selezionare l'opzione PASTO RICCO DI GRASSI. L'opzione SPUNTINO deve essere selezionata per annunciare un pasto a basso contenuto di carboidrati (20 g) che richiede comunque un bolo.

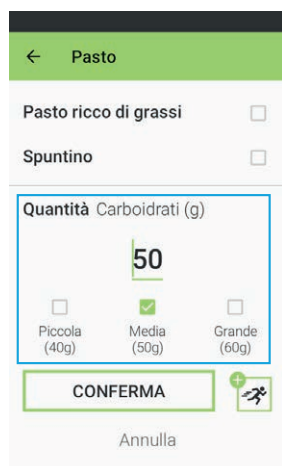

04

Scorrendo verso il basso, è possibile inserire la quantità di carboidrati o fare clic sulla casella con i pasti predefiniti.

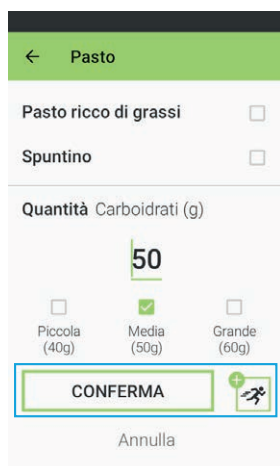

05


Fare clic su «CONFERMA» per confermare la segnalazione. La scorciatoia dell'attività potrebbe essere usata per annunciare un'attività fisica imminente.



06


Il sistema raccomanda automaticamente un bolo pasto che può essere modificato o confermato. In caso di difficoltà nel conteggio dei carboidrati, contattare il proprio medico curante.

## SEGNALAZIONE DI UN'ATTIVITÀ FISICA

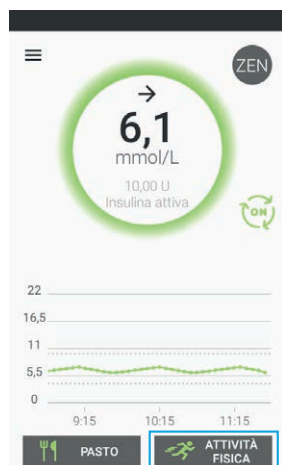


01

Sulla schermata iniziale, fare clic su «ATTIVITÀ FISICA».

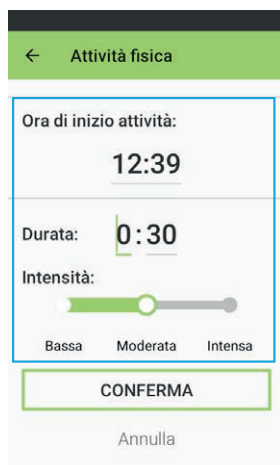

02

Impostare l'ora di inizio, la durata e l'intensità della propria attività fisica.

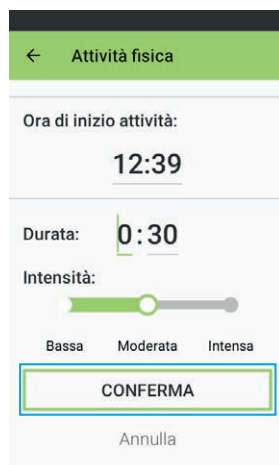

03

Fare clic su «CONFERMA» per salvare la segnalazione.



Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'uso.

